



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

## 50g/m<sup>2</sup>

### ثوب SMMS القياسي للاستخدام مرة واحدة

اسم المنتج ثوب SMMS القياسي للاستخدام مرة واحدة  
رمز المنتج  
FGS-SG-SM50-XL / FGS-SG-SM50-L  
FGS-SG-SM50-XXL  
وحدة مقياس المنتج: سم

رمز المنتج	رمز المنتج	المقاسات	الطول (من نقطة الكتف إلى الحواف)	العرض (أحادي الطبقة)	طول الحزام	طول الكم	الانحراف
21047	FGS-SG-SM50-L	L:120X150	120	150	65	59	±2
21048	FGS-SG-SM50-XL	XL:130X150	130	150	65	59	±2
21049	FGS-SG-SM50-XXL	XXL:140X160	140	160	69	61	±2

موديل المنتج نوع الثوب. L/XL/XXL  
الهيكل والتكوين المنتج يستخدم قماش 50جم SMMS غير منسوج. يتألف من المقدمة والمؤخرة والأكمام وربطة عنق وياقة. تتم العملية التكنولوجية عن طريق القص، اللحام بالموجات فوق الصوتية، الأربطة، الفيلكرو، السوار، الطي، اللحام.  
الاستخدام المقصود يتم تعقيم هذه العناصر بطريقة EO، وتستخدم كحاجز لاختراق السوائل والميكروبات بين المريض وغرفة العمليات والأجهزة الجراحية الأخرى وموظفي غرفة العمليات.  
المحاذير يمكن استخدام المنتج مرة واحدة فقط، ويجب استخدامها فور فتح العبوة. في حالة تلف العبوة أو أن أصبح المنتج رطباً أو متعفنًا لا تستخدمه.  
كيفية استخدام المنتج افتح العبوة وأخرج المنتج، وقم بهز الثوب برفق، وارفع جوانب الياقة، وأدخل اليدين في الأكمام، وقم بتمديد الذراعين للأمام، واربط الأجزاء.  
التخزين يجب أن يتم تخزينه في غرفة نظيفة برطوبة نسبية لا تزيد عن 80٪، ولا توجد غازات مسببة للتآكل، ويتم تخزينه في مكان بارد وجاف وجيد التهوية.



- هذا المنتج للاستخدام مرة واحدة، لا تعد استخدامه.
  - هذا المنتج للاستخدام مرة واحدة، ولا تشارك منتجك مع آخر.
  - يُمنع الاستخدام عند تلف العبوة أو المنتجات.
- تنويه يجب الإبلاغ عن أي حادث خطير وقع فيما يتعلق بالجهاز إلى الشركة المصنعة والسلطة المختصة في الدولة التي يقيم فيها المستخدم المريض.  
الصلاحية سنتان.

تاريخ الإنتاج انظر التاريخ المدون على العبوة  
تاريخ انتهاء الصلاحية انظر التاريخ على العبوة

شروط ضمان جيمما GIMA يُطبق ضمان B2B القياسي جيمما GIMA لمدة 12 شهر.

يُحفظ في مكان بارد وجاف		يُحفظ بعيداً عن ضوء الشمس		كود المنتج	REF
الحدس: قراءة التعليمات (التحذيرات) بعناية		جهاز طبي يتوافق مع التوجيه (UE) 2017/745		رقم الدفعة	LOT
الجهاز الطبي		تاريخ التصنيع		الشركة المصنعة	
لا تستخدم في حالة تلف الحزمة		تاريخ انتهاء الصلاحية		معقم بأكسيد الإيثيلين	STERILE EO
أداة أحادية الاستخدام، لا تستخدم من جديد		اقرأ بدقة وحرص تعليمات الاستخدام		حد نسبة الرطوبة	
هشة، والتعامل معها بحذر		ممثل معتمد في الاتحاد الأوروبي		حد درجة الحرارة	
		لتعامل مع الرعاية		هذا الجانب	

M21047-M-Rev0-12.21

REF

**FGS-SG-SM50-L (21047)**  
**FGS-SG-SM50-XL (21048)**  
**FGS-SG-SM50-XXL (21049)**



Xianning Full Guard Medical Products Co.,Ltd  
Yongan East Avenue,  
Xianning Economic Development  
Zone, Xianning City, Hubei Province, China  
Made in China

EC REF

ZOUSTECH S.L.  
Pso. Castellana, 141 - Planta 19,  
28046 - Madrid, Spain

**STERILE EO MD**

مستورد عن طريق :

**Gima S.p.A.**

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

