



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

ثوب جراحي مقوى - معقم

اسم المنتج ثوب SMMS المقوى للاستخدام مرة واحدة (معقم)

رمز المنتج

FGS-RF-SM50-M, FGS-RF-SM50-L,
FGS-RF-SM50-XL, FGS-RF-SM50-XXL

وحدة مقياس المنتج: سم

الانحراف	طول الكم	طول الحزام	العرض (أحادي الطبقة)	الطول (الكتف إلى الأرداف)	المقاسات	واقي كامل الكود	كود GIMA
2±	58	65	140	120	(M) 140 × 120	FGS-RF-SM50-M	21052
2±	59	65	150	120	(L) 150 × 120	FGS-RF-SM50-L	21053
2±	59	65	150	130	(XL) 150 × 130	FGS-RF-SM50-XL	21054
2±	61	69	160	140	(XXL) 160 × 140	FGS-RF-SM50-XXL	21055

مويل المنتج نوع الثوب. M/L/XL/XXL

الهيكل والتكوين المنتج يستخدم قماش 50 سم SMMS غير منسوج. يتألف من المقدمة والمؤخرة والأكماء وربطة عنق وياقة. تتم العملية التكنولوجية عن طريق القص، اللحم بالموجات فوق الصوتية، الأربطة، الفيلكرو، السوار، الطي، اللحم. الاستخدام المقصود يُستخدم المنتج بشكل أساسي للزلز العام في العيادات الخارجية والأجنحة وغرف الفحص وغرف التنظيف والمختبر وما إلى ذلك. ويُقصد استخدامها من قبل المتخصصين في الرعاية الصحية في المستشفيات والعيادات للحفاظ على مستوى جيد من النظافة والمساهمة في مكافحة العدوى. المحاذير يمكن استخدام المنتج مرة واحدة فقط، ويجب استخدامها فور فتح العبوة. في حالة تلف العبوة أو أن أصبح المنتج رطباً أو متعفنًا، لا تستخدمه.

كيفية استخدام المنتج افتح العبوة وأخرج المنتج، وقم بهز الثوب برفق، وارفع جوانب الياقة، وأدخل اليدين في الأكمام، وقم بتمديد الزراعين للأمام، واربط الأخرمة.

التخزين يجب أن يتم تخزينه في غرفة نظيفة برطوبة نسبية لا تزيد عن 80%، ولا توجد غازات مسببة للتآكل، ويتم تخزينه في مكان بارد وجاف وجيد التهوية.

⚠️ تحذير

1. هذا المنتج للاستخدام مرة واحدة، لا تعد استخدامه.

2. هذا المنتج للاستخدام مرة واحدة، ولا تشارك منتجك مع آخر.

3. يُمنع الاستخدام عند تلف العبوة أو المنتجات.

تنويه يجب الإبلاغ عن أي حادث خطير وقع فيما يتعلق بالجهاز إلى الشركة المصنعة والسلطة المختصة في الدولة العضو التي يقيم فيها المستخدم أو المريض. صالحة لمدة 3 سنوات

تاريخ الإنتاج انظر التاريخ المدون على العبوة

تاريخ انتهاء الصلاحية انظر التاريخ على العبوة

شروط ضمان جيمما GIMA يُطبق ضمان B2B القياسي جيمما GIMA لمدة 12 شهر.

REF	كود المنتج	☀️ يحفظ بعيداً عن ضوء الشمس	☂️ يحفظ في مكان بارد وجاف	MD	جهاز طبي
LOT	رقم الدفعة	⏰ يتوافق مع التوجيه 2017/745 (UE) 2017/745 (UE)	📅 تاريخ انتهاء الصلاحية	🌡️	حد درجة الحرارة
🏭	الشركة المصنعة	📅 تاريخ التصنيع	🚫 لا تستخدم في حالة تلف الحزمة	📦	عالي
📊	حد نسبة الرطوبة	👤 ممثل معتمد في الاتحاد الأوروبي	📖 اقرأ بنقطة وحرص تعليمات الاستخدام	🍷	هشة، والتعامل معها بحذر
STERILE EO	معقم باكسيد الإيثيلين	🚫 لا تستخدم من جديد	⚠️ (التحذيرات) بقراءة التعليمات	UDI	معرف فريد للجهاز

GIMA 21052
GIMA 21053
GIMA 21054
GIMA 21055



Xianning Full Guard Medical Products Co., Ltd
Yongan East Road Wenquan Economic
Development Zone, Xianning City,
Hubei Province, China
Made in China



FGS-RF-SM50-M
FGS-RF-SM50-L
FGS-RF-SM50-XL
FGS-RF-SM50-XXL



ZOUSTECH S.L.
Pso. Castellana, 141 - Planta 19,
28046 - Madrid, Spain

مستورد عن طريق

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com



STERILE EO MD



0123