



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

غطاء حذاء مضاد للانزلاق للاستخدام مرة واحدة

اسم المنتج غطاء حذاء مضاد للانزلاق للاستخدام مرة واحدة

كود المنتج FGSCAS-PP35 (GIMA 21095)

موديل المنتج غطاء حذاء عادي 40 x 15 سم

الهيكل والغطاين مصنوع من 35gPP، بمرونة ولتثبيت، مع مرونة وطباعة على الجزء السفلي لمقاومة الانزلاق. الاستخدام المقصود تُستخدم المنتجات بشكل أساسي للعزل العام في العيادات الخارجية والأجنحة وغرف الفحص وغرف التنظيف والمختبر وما إلى ذلك. ويُقصد استخدامها من قبل المتخصصين في الرعاية الصحية في المستشفيات والعيادات للحفاظ على مستوى جيد من النظافة والمساهمة في مكافحة العدوى.

المحاذير يمكن استخدام المنتجات مرة واحدة فقط، ويجب استخدامها فور فتح العبوة. في حالة تلف العبوة، يكون المنتج رطباً أو متعفنًا. لا تستخدمه.

كيفية استخدام المنتج

- افتح عبوة المنتج، وأخرج منها غطاء الحذاء، ومدد قدميك وافرّد أغطية الحذاء على قدميك.
- قم بترتيب أغطية الأحذية للتأكد من أن غطاء الحذاء يغطي الأقدام بالكامل.
- التخزين يجب أن يتم تخزينه في غرفة نظيفة برطوبة نسبية لا تزيد عن 80%، ولا توجد غازات مسببة للتآكل، ويتم تخزينه في مكان بارد وجاف وجيد التهوية.



تحذير

- هذا المنتج للاستخدام مرة واحدة، لا تعد استخدامه.
 - هذا المنتج يُستخدم لشخص واحد، ولا تشارك منتجك مع شخص آخر.
 - يُحظر الاستخدام عند تلف العبوة أو الأغطية.
- تنويه يجب الإبلاغ عن أي حادث خطير وقع فيما يتعلق بالجهاز إلى الشركة المصنعة والسلطة المختصة في الدولة العضو التي يقيم فيها المستخدم أو المريض.
- الصلاحية سنتان.

تاريخ الإنتاج انظر التاريخ المدون على العبوة

تاريخ انتهاء الصلاحية انظر التاريخ على العبوة

يُحفظ في مكان بارد وجاف		يُحفظ بعيداً عن ضوء الشمس		كود المنتج	REF
تاريخ انتهاء الصلاحية		تاريخ التصنيع		رقم الدفعة	LOT
لا تستخدم في حالة تلف الحزمة		ممثل معتمد في الاتحاد الأوروبي		الشركة المصنعة	
اقرأ بطاقة وحرص تعليمات الاستخدام		أداة أحادية الاستخدام، لا تستخدم من جديد		ليس معقم	
الجهاز الطبي		الحد: قراءة التعليمات (التحذيرات) بعناية		جهاز طبي يتوافق مع التوجيه (UE) 2017/745	
				حد درجة الحرارة	

REF FGSCAS-PP35 (GIMA 21095)

Xianning Full Guard Medical Products Co.,Ltd
Yongan East Avenue, Xianning Economic Development Zone,
Xianning City, Hubei Province, China
Made in China

Humiss Beratung GmbH Gneisenaustraße 8.40477,
Düsseldorf, Deutschland

مستورد عن طريق / Εισαγωγή από /
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

