



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

غطاء بأربطة للاستخدام مرة واحدة

اسم المنتج غطاء بأربطة للاستخدام مرة واحدة

كود المنتج FGDCT-SM35 (21098)

موديل المنتج أربطة على الغطاء، 62 x 14.5 سم

الهيكل والتكوين الغطاء مصنوع من 40gSMS-35، بشريط مرن للتثبيت.

الاستخدام المقصود تُستخدم المنتجات بشكل أساسي للزل العام في العيادات الخارجية والأجنحة وغرف الفحص وغرف التنظيف والمختبر وما إلى ذلك. ويُقصد استخدامها من قبل المتخصصين في الرعاية الصحية في المستشفيات والعيادات للحفاظ على مستوى جيد من النظافة والمساهمة في مكافحة العدوى.

المحاذير يمكن استخدام المنتجات مرة واحدة فقط، ويجب استخدامها فور فتح العبوة. في حالة تلف العبوة، يكون المنتج رطباً أو متعفنًا. لا تستخدمه.

كيفية استخدام المنتج

1. افتح عبوة المنتج، وأخرجه من الغطاء، واضغط على طرفي الغطاء بكلتا يديك.

2. ارفع يدك، وضع الغطاء على رأسك، واضبطه للتأكد من عدم تسريب شعرك. التخزين يجب أن يتم تخزينه في غرفة نظيفة برطوبة نسبية لا تزيد عن 80٪، ولا توجد غازات مسببة للتآكل، ويتم تخزينه في مكان بارد وجاف وجيد التهوية.



تحذير

1. هذا المنتج للاستخدام مرة واحدة، لا تعد استخدامه.

2. هذا المنتج يُستخدم لشخص واحد، ولا تشارك منتجك مع شخص آخر.

3. يُحظر الاستخدام عند تلف العبوة أو الأغشية.

تنويه يجب الإبلاغ عن أي حادث خطير وقع فيما يتعلق بالجهاز إلى الشركة المصنعة والسلطة المختصة في الدولة العضو التي يقيم فيها المستخدم أو المريض.

الصلاحية سنتان.

تاريخ الإنتاج انظر التاريخ المدون على العبوة

تاريخ انتهاء الصلاحية انظر التاريخ على العبوة

يُحفظ في مكان بارد وجاف		يُحفظ بعيداً عن ضوء الشمس		كود المنتج	REF
تاريخ انتهاء الصلاحية		تاريخ التصنيع		رقم الدفعة	LOT
لا تستخدم في حالة تلف الحزمة		ممثل معتمد في الاتحاد الأوروبي		الشركة المصنعة	
اقرأ بدقة وحرص تعليمات الاستخدام		أداة أحادية الاستخدام، لا تستخدم من جديد		ليس معقم	
الجهاز الطبي		الحذر: قراءة التعليمات (التحذيرات) بعناية		جهاز طبي يتوافق مع التوجيه (UE) 2017/745	
		معرّف فريد للجهاز		حد درجة الحرارة	

GIMA 21098

Xianning Full Guard Medical Products Co.,Ltd
Yongan East Avenue, Xianning Economic Development
Zone, Xianning City, Hubei Province, China
Made in China

Humiss Beratung
GmbH Gneisenastraße 8.40477,
Düsseldorf, Deutschland

FGDCT-SM35

مستورد عن طريق / Εισαγωγή από
Importerat av /
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

