



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

25g/m²

ثوب SMMS القياسي للاستخدام مرة واحدة

اسم المنتج ثوب عزل للاستخدام مرة واحدة

رمز المنتج FGIS-PP25-M• FGIS-PP25-L

وحدة مقياس المنتج: سم

| الانحراف | طول الكم | طول الحزام | العرض (أحادي الطبقة) | الطول (من نقطة الكتف إلى الحواف) | المقاسات | رمز المنتج | رمز GIMA |
|----------|----------|------------|----------------------|----------------------------------|-----------|-------------|----------|
| ±2 | 58 | 180 | 137 | 115 | M:115X137 | FGIS-PP25-M | 21131 |
| ±2 | 59 | 180 | 150 | 120 | L:120X150 | FGIS-PP25-L | 21132 |

موديل المنتج نوع الثوب. M/L/XL/XXL

الهيكل والتكوين المنتج يستخدم قماش 25جم SMMS غير منسوج. يتألف من المقدمة والمؤخرة والأكمام وربطة عنق وياقة. تتم العملية التكنولوجية عن طريق القص، اللحام بالموجات فوق الصوتية، الأربطة، الفيلكرو، السوار، الطبي، اللحام. الاستخدام المقصود تستخدم المنتجات بشكل أساسي للعزل العام في العيادات الخارجية والأجنحة وغرف الفحص وغرف التنظيف والمختبر وما إلى ذلك. ويُصَد استخدامهما من قبل المتخصصين في الرعاية الصحية في المستشفيات والعيادات للحفاظ على مستوى جيد من النظافة والمساهمة في مكافحة العدوى.

المحاذير يمكن استخدام المنتجات مرة واحدة فقط، ويجب استخدامها فور فتح العبوة. في حالة تلف العبوة أو أن أصبح المنتج رطباً أو متعفنًا. لا تستخدمه.

كيفية استخدام المنتج افتح العبوة وأخرج المنتج، وقم بهز الثوب برفق، وارفع جوانب الياقة، وأدخل اليدين في الأكمام، وقم بتمدد الزراعين للأمام، واربط الأخرى معاً.

التخزين يجب أن يتم تخزينه في غرفة نظيفة برطوبة نسبية لا تزيد عن 80٪، ولا توجد غازات مسببة للتآكل، ويتم تخزينه في مكان بارد وجاف وجيد التهوية.



تحذير

1. هذا المنتج للاستخدام مرة واحدة، لا تعد استخدامه.

2. هذا المنتج للاستخدام مرة واحدة، ولا تشارك منتجك مع آخر.

3. يُمنع الاستخدام عند تلف العبوة أو المنتجات.

تنويه يجب الإبلاغ عن أي حادث خطير وقع فيما يتعلق بالجهاز إلى الشركة المصنعة والسلطة المختصة في الدولة العضو التي يقيم فيها المستخدم أو المريض.

التاويرس 3 تدول 3حلاص

تاريخ الإنتاج انظر التاريخ المدون على العبوة

تاريخ انتهاء الصلاحية انظر التاريخ على العبوة

شروط ضمان جيمما GIMA يُطبق ضمان B2B القياسي جيمما GIMA لمدة 12 شهر.

| | | | | | |
|---|--|--|--|-----------------|-----|
| يُحفظ في مكان بارد وجاف | | يُحفظ بعيداً عن ضوء الشمس | | كود المنتج | REF |
| الحذر: قراءة التعليمات (التحذيرات) بعناية | | جهاز طبي يتوافق مع التوجيه (UE) 2017/745 | | رقم الدفعة | LOT |
| الجهاز الطبي | | تاريخ التصنيع | | الشركة المصنعة | |
| لا تستخدم في حالة تلف الحرمة | | تاريخ انتهاء الصلاحية | | لبس معقم | |
| أداة أحادية الاستخدام، لا تستخدم من جديد | | اقرأ بدقة وحرص تعليمات الاستخدام | | حد نسبة الرطوبة | |
| هشة ، والتعامل معها بحذر | | ممثل معتمد في الاتحاد الأوروبي | | حد درجة الحرارة | |
| | | لتعامل مع الرعاية | | هذا الجانب | |

REF

FGIS-PP25-M (GIMA 21131)
FGIS-PP25-L (GIMA 21132)



Xianning Full Guard Medical Products Co.,Ltd
Yongan East Avenue,
Xianning Economic Development
Zone, Xianning City, Hubei Province, China
Made in China

ec REP

Humiss Beratung
GmbHGneisenaustraße
8.40477, Düsseldorf, Deutschland

مستورد عن طريق
Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

MD

