

REF

I23204 (GIMA 23840)
I23105 (GIMA 23841)
I23106 (GIMA 23842)
I23108 (GIMA 23843)



Berpu Medical Technology Co., Ltd.
No.14 Xingji Road, Yongxing Street, Longwan District,
325000 Wenzhou, Zhejiang Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Made in China



Shanghai International Trading Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



تعليمات الاستخدام

اسم المنتج:

إبر قلم الأنسولين المعقمة للاستخدام الواحد

المواصفة:


القطر الخارجي للإبرة: 81.0 مم (43 ج)، 02.0 مم (33 ج)، 32.0 مم (23 ج)، 52.0 مم (13 ج)، 3.0 مم (03 ج)، 33.0 مم (92 ج)، 63.0 مم (82 ج)؛
 طول الإبرة: 5.3 مم ~ 31 مم؛
 مثال: القطر الخارجي لإبرة قلم الأنسولين المعقمة للاستخدام الواحد هو 81.0 مم، وطول الإبرة 4 مم، وتوضع علامة عليها توضح أنها 81.0 × 4 مم؛ يظهر التكوين والمكونات في الشكل 1.

تكوين المنتج

شكل تخطيطي لإبر قلم الأنسولين المعقمة للاستخدام الواحد:

الشكل 1. إبر قلم الأنسولين المعقمة للاستخدام الواحد

1. محور الإبرة
2. غمد المحور
3. ورق الغلق
4. غطاء حماية الإبرة
5. أنبوب الإبرة

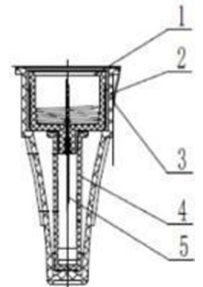

الغرض المقصود:

إبر قلم الأنسولين المعقمة للاستخدام الواحد مخصصة للأغراض الطبية، وتستخدم مع أجهزة الحقن على شكل القلم لحقن الأنسولين تحت الجلد. ولا يمكن استخدامها إلا مرة واحدة ويجب التخلص منها كنفائات طبية بعد الاستخدام.

المستخدمون المستهدفون:

في المنزل أو المؤسسات الطبية، يُستخدم من قبل الطبيب أو المريض لحقن الأنسولين.

موانع الاستعمال:

1. المرضى الذين يخبرهم الطبيب أنهم غير مناسبين للحصول على الأدوية من خلال الحقن.
2. العثور على التهاب وأورام وتقرحات مؤلمة في موضع الحقن.
3. النزيف الشديد أو الميل للتخثر أو عامل يقلل الصفائح الدموية أو التخثر بشكل كبير أو العلاج المضاد للتخثر بالهيبارين أو الديكومارين.
4. قد يؤدي الحقن أثناء نوبة الكزاز وتشنج داء الكلب إلى حدوث تشنجات انفعالية.
5. يجب حقن مرضى الصرع والمرضى النفسيين والمرضى غير المتعاونين تحت الإشراف.

التنبيهات والتحذيرات:

1. قفلات قوبعلا ت ناكاذل همدختست لاو؛ مدمختسلا لبق جتنملا لذه قوبع نم ققحتلا جبرؤ
2. دق قريلا عاطغن ناكاذل امو، عيساسلا قوبعلا في بئاوش وأقيرغ داومي دوجو نم ققحتلا لى لهبتنا تالاحلا هذه يف جتنملا مدختست الو، طقس
3. قداعل يدؤ دق همدختسا قداعل في بنيلو، طقف قدحاو قرم مدمختسلا صصخم جتنملا لذه بودعلا بياصلا نال جتنملا مادختسا
4. مدمختسلا لمعب قبيط تايافك نم صلختو، عيساسلا قوبعلا جتف دعب اؤوف جتنملا مدمختسا
5. لا تاوئس 5 جتنملا قحلاص قدم قصلملا لى عضموملا قحلاصلا اهلتنا خيرات لبق جتنملا مدمختسا هتيخالص قدم اهنتنا قلاح يف جتنملا مدختست
6. قيناؤ قرم جتنملا لذه ميقعد ائامت عتمير
7. دبيلان قحلاص صومو صرق في بنيلو
8. قريلا قزخول صبعتر لاى دزلخلا خيو مدمختسلا لى عبعج، مدمختسلا ائمتا
9. مذكوملا ناكاذل مدمختسلا لبق تاءوتى دوجو وأقريلا فرط في غلتي دوجو مدع نم دكأت جتنملا مدختست الف
10. عيسملا تازاغلا نم عيلاخو عيوهتلا قديجو قفيظنو قفاجو قدرا بةتييد في جتنملا لذه نيزخت بعجيد لكاتلل


المضاعفات المحتملة:

1. الألم؛
2. النزيف في موضع الحقن؛

3. الاحمرار؛

كيفية الاستخدام:

1. قم بإعداد حقنة قلم الأنسولين حسب التعليمات المرفقة معها؛
2. مَرِّق ورق الغلق الموجود على غمد محور إبرة قلم الأنسولين؛
3. صل حقنة قلم الأنسولين بإبرة قلم الأنسولين، ثم أحكم ربطها في اتجاه عقارب الساعة؛
4. أخرج الإبرة من غمد المحور وغطاء الحماية للإبرة بشكل عمودي؛
5. أزل الهواء الموجود داخل الحقنة، ثم احقن السائل؛
6. بعد الحقن، تخلص من إبرة قلم الأنسولين في أقرب مكان لجمع الأشياء الحادة أو وفقًا لسياسة موقعك.

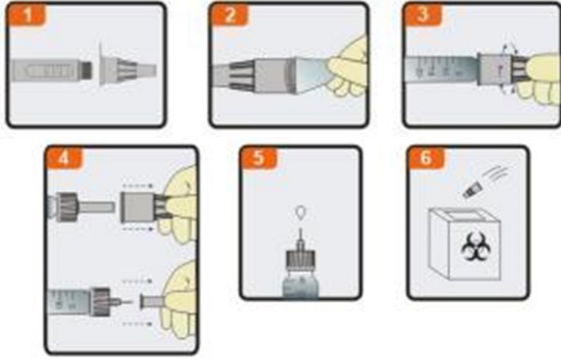

: التعقيم

التعقيم بأكسيد الإيثيلين.

مدة الصلاحية:

5 سنوات.

العلامات والرموز المستخدمة على الملصقات:

الوصف	الرمز	الوصف	الرمز	الوصف	الرمز
بلد الصنع وتاريخ الصنع		رقم الدفعة		مستورد عن طريق	
الحذر: قراءة التعليمات (التحذيرات) بعناية		معقم بأكسيد الإيثيلين		تاريخ انتهاء الصلاحية	
جهاز طبي		لا تستخدم في حالة تلف الحزمة		أداة أحادية الاستخدام، لا تستخدم من جديد	
الشركة المصنعة		ممثل معتمد في الاتحاد الأوروبي		لا تجدد	
معرف فريد للجهاز		اقرأ بدقة وحرص تعليمات الاستخدام		جهاز (EU) 547/7102 طبي يتوافق مع التوجيه	
نظام حازم معقم واحد		يحفظ في مكان بارد وجاف		يحفظ بعيدًا عن ضوء الشمس	
تاريخ التصنيع		كود المنتج		هشة ، والتعامل معها بحذر	

ظروف التخزين :

يجب تخزين المنتج في غرفة جافة جيدة التهوية وخالية من الغازات الكاوية.

شروط النقل :

يجب حماية المنتج من الخطاطيف والضغط الشديد والمطر أثناء النقل العادي.

GIMA اميج نامض طورش

رهش 12 دمل GIMA اميج يسايقلا B2B نامض قبطني