


مكسر لأقراص الدواء

يسحق الأدوية مهما كان حجمها

1. وضع قرص الدواء في التجوف الشفافي
2. برم القسم الأرق حتى النهاية
3. وضع الأدوية المسحوقة في الحليب, الماء, ...

الحذر: عدم تكسير الأقراص ذات الإطلاق المتحيز للوقت المناسب, في حالة الشك استشارة الصيدلي.

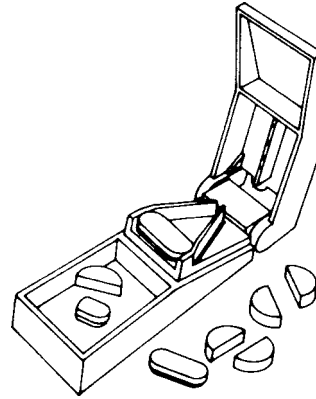

قاطع لأقراص الدواء

يقطع الأدوية مهما كان حجمها إلى قسمين

1. وضعه على سطح مستوي
2. وضع قرص الدواء في "V" بشكل يمس القرص طرافي "V"
3. إنزال الغطاء بلطف حتى إغلاق قاطع أقراص الدواء
4. حفظ الوجبات الغير مستهلكة في الخلية الملائمة



الحذر: شفرة حادة, الحفظ بعيدا عن متناول الأطفال



GIMA

TAGLIAPILLOLE - FRANTUMAPILLOLE
PILL SPLITTER - PILL PULVERIZER
COUPE-PILULE - BROYEUR DE PILULES
CORTAPÍLDORAS - TRITURADOR DE PÍLDORAS
CORTA-COMPRIMIDOS - QUEBRA-COMPRIMIDOS
ΚΟΜΜΑΤΙΑΣΤΗΣ ΧΑΠΙΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΧΑΠΙΩΝ

مكسر لأقراص الدواء - قاطع لأقراص الدواء

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.

AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.

ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.

ATENÇÃO: Os operadores devem ler e entender completamente este manual antes de usar o produto.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι χειριστές αυτού του προϊόντος πρέπει να διαβάσουν και να καταλάβουν πλήρως τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από την χρήση του.

الحذر: على العمال قراءة وفهم هذا الدليل بكامله قبل البدء باستعمال المنتج.



M25730-M-Rev.2-03.10

GIMA Spa - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italia

ITALIA: Tel. 199 400 401 (8 linee r.a.) - Fax 199 400 403

E-mail: gima@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com

INTERNATIONAL: Tel. ++39 02 953854209 - Fax ++39 02 95380056

E-mail: export@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com