



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BILANCIA ASTRA
ASTRA SCALE
BALANCE ASTRA
WAAGE ASTRA
BÁSCULA ASTRA
BALANÇA ASTRA
ΖΥΓΑΡΙΑ ASTRA
ASTRA ميزان


REF 27310



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China

CE 0476 CE M24 0474



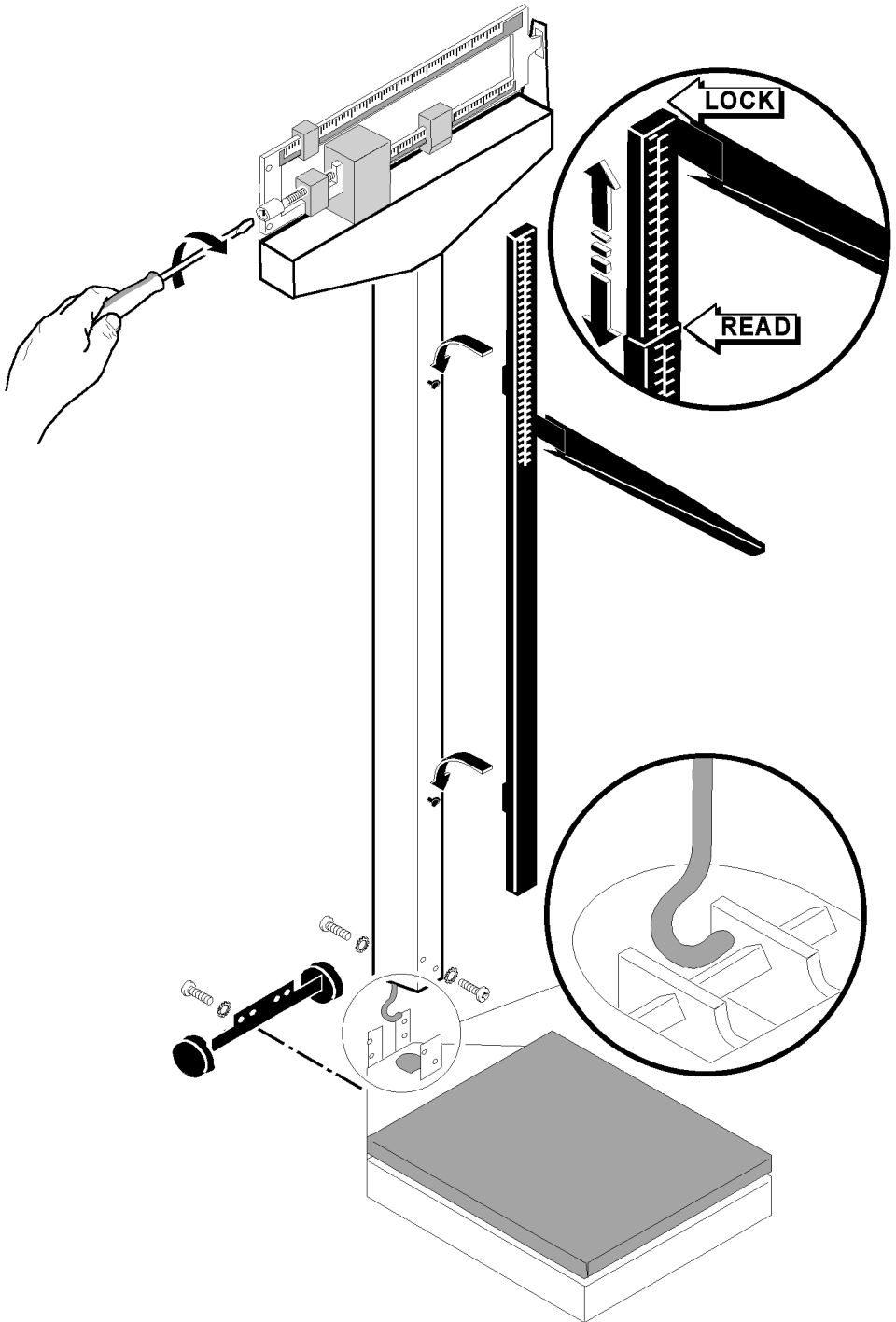

الميزات

الميزان Astra المصنوع من قبل GIMA عبارة عن أداة مفيدة لقياس الطول والوزن لجسد الإنسان. التدرج الواسع للمقاييس، الدقة العالية والحساسية تجعل من هذا الميزان الجهاز الملائم بالأكثر للإستعمال في المستشفيات، في العيادات الطبية، في المدارس، في عيادات أطباء العائلة، في قاعات الرياضة والخ.

الميزات التقنية

عمليات قياس الوزن

القدرة الأقصى: 200 كغم

الدقة: 100 غم

عمليات قياس الطول

سلم القياس: 75 – 200 سم

الدقة: 0,5 سم

مقاييس المنصّة: (الطول x العرض): 27,5 x 37,5 سم

المقاييس العامة (الطول x العرض x الإرتفاع): 148,5x43,5x56,5 سم

الوزن الفارغ: 15,3 كغم

محتويات العبوة

- عامود ورقاص الميزان
- منصّة
- عامود لقياس الطول
- نموذج عجلات
- براغي وحلقات

الإستعمال المخصّص للجهاز

هذا الجهاز موجّه للإستعمال فقط من قبل العاملين الطبيين المؤهلين.

عدم إستعمال الجهاز في حالة وجود أضرار به. التوجّه إلى بائعكم الخاص.

تحايد أي نوع من التصليحات الغير وافية. يجب أن تتم التصليحات فقط بإستعمال قطع غيار أصلية والتي يجب تركيبها بموجب الإستعمال المفروض.



الجهاز مصنوع من المواد القويّة المقاومة للتآكل والظروف البيئيّة المهيّأة للإستعمال العادي، لذلك فهو لا يحتاج إلى اهتمامات خاصّة؛ مع ذلك من الضروري حفظه فيبيئة مغلقة، وتعايد تعريضه إلى الضوء والعوامل المناخيّة، والاهتمام بحمايته من الغبار للمحافظة على الشروط الصحيّة المتعلقة بالنظافة. ينصح أيضا بحفظ الجهاز في مكان بحيث يكون من السهل الوصول إليه من قبل العاملين في حالات الحاجة.

إزالة التغليف

نذكر بأن العناصر المستعملة للتغليف (الورق، النايلون، الدبابيس المعدنيّة، الشريط اللاصق، إلخ...) قد تسبب إلى جروح فيما إذا لم يتمّ التعامل معها بعناية. من الضروري التخلّص منها باستعمال الأدوات الملائمة وعدم تركها لأشخاص غير واعيين وبدون مسؤوليّة، نفس الشيء يقال بالنسبة للمعدّات المستعملة للتخلّص من عناصر التغليف نفسها (المقصّ، السكاكين، إلخ...).



أول عمليّة يجب القيام بها بعد أن يكون قد تمّ فتح العبوة وتمّت إزالة التغليف هو القيام بفحص عام للقطع والأجزاء التي تكوّن الجهاز؛ التأكد من وجود كافة العناصر الضروريّة ومن حالتها الكاملة.

التركيب

الجهاز، بغالبه، يكون قد تمّ تركيبه في المصنع مسبقا، لذلك التركيب النهائي يبدو سهلا جدا (النظر إلى الرسومات).

- تثبيت العمود على القاعدة بواسطة البراغي والحلقات المزوّدة
- تمديد الميزان أفقيا على الأرضيّة وربط قضيب الإيصال في الموضع الخاص به.
- تثبيت العجلات على القاعدة بواسطة البراغي والحلقات المزوّدة
- ربط خط القياس على البرغيين ذوي الرأس السداسي المركبين مسبقا والموجودين على العمود.
- تثبيت القضيب بالشد على البراغي المسدسة الرأس بواسطة المفتاح الخاص. عدم شدّ البراغي كثيرًا!!

لعمليّة الضبط من الضروري، بعد أن يكون قد تمّ وضع الوزنين على القيمة 0، العمل على يرغي الضبط (النظر للصورة) حتى الحصول على تتطابق المشير إلى فرز القياس.

للحصول على ضبط ممتاز من الضروري أن تكون القاعدة مستوية جدا.

الفعاليّة

قبل أن يصعد الشخص إلى المنصّة من الضروري رفع المنزلة لمقياس الطول إلى ارتفاع يفوق إرتفاع الشخص نظريا. بعد أن يكون الشخص قد صعد إلى المنصّة، إنزال المنزلة ببطء حتى أن تمس الرأس.

الخط المدرّج في جزئين منها تتداخل ببعضها. الخط الأسفل يسمح بقياس أطوال حتى 101,5 سم وتتم القراءة بمحاذاة المنزلقة، الخط الأعلى يسمح بقياس أطوال حتى 201 سم ولكن يجب أن تتم القراءة بالقرب من المقطع الموجود بين الخطين المدرجين المميّزة بالسهم READ (النظر إلى الصورة).

ملاحظة: لاستعمال الخط الأعلى بالشكل الصحيح من الضروري تثبيت المنزلقة على القسم الأعلى للخط المنزلق.

تنبيه: عدم الحفظ على المنزلقة بالوضع الأفقي لأنها قد تؤدي إلى حالات خطيرة في حالة الاصطدام بها.








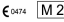



الصيانة

تمّ تصميم الجهاز هذا ليبقى لمدى الحياة، يصمد أمام أكبر نسبة من المواد الكيميائية باستثناء الكيتونات M.E.K، محاليل الإذابة والمواد الخاصة بإزالة الطلاء.

من فترة لأخرى، وفي كل مرة تتم بها إزاحة الميزان، القيام بفحص التعيير والتسوية (النظر إلى التركيب).

GIMA شروط ضمان جيما

لمدة 12 شهر GIMA القياسي جيما B2B يُطبق ضمان

	<p>IT Codice prodotto GB Product code FR Code produit DE Erzeugniscode ES Código producto PT Código produto GR Κωδικός προϊόντος</p> <p>SA كود المنتج</p>		<p>IT Numero di lotto GB Lot number FR Numéro de lot DE Chargennummer ES Número de lote PT Número de lote GR Αριθμός παρτίδας</p> <p>SA رقم الدفعة</p>
	<p>IT Conservare in luogo fresco ed asciutto GB Keep in a cool, dry place FR À conserver dans un endroit frais et sec DE An einem kühlen und trockenen Ort lagern ES Conservar en un lugar fresco y seco PT Armazenar em local fresco e seco GR Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον</p> <p>SA يحفظ في مكان بارد وجاف</p>		<p>IT Conservare al riparo dalla luce solare GB Keep away from sunlight FR À conserver à l'abri de la lumière du soleil DE Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern ES Conservar al amparo de la luz solar PT Guardar ao abrigo da luz solar GR Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία</p> <p>SA يحفظ بعيداً عن ضوء الشمس</p>
	<p>IT Fabbricante GB Manufacturer FR Fabricant DE Hersteller ES Fabricante PT Fabricante GR Παραγωγός</p> <p>SA الشركة المصنعة</p>		<p>IT Leggere le istruzioni per l'uso GB Consult instructions for use FR Consulter les instructions d'utilisation DE Gebrauchsanweisung beachten ES Consultar las instrucciones de uso PT Consulte as instruções de uso GR Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης</p> <p>SA اقرأ بدقة وحرص تعليمات الاستخدام</p>
	<p>IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB Caution: read instructions (warnings) carefully FR Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) DE Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen ES Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente PT Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente GR Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενοστάσεις)</p> <p>SA الحذر: قراءة التعليمات (التحذيرات) بعناية</p>		<p>IT Bilancia omologata in conformità a Direttiva 2014/31/EU e Norma EN 45501 GB - Balance harmonised according to Directive 2014/31/EU and EN 45501 standard FR Balance approuvée conformément à la directive 2014/31/UE et à la norme EN 45501 DE In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/31/EU und der Norm 45501 homologierte Waage ES Balanza homologada de acuerdo con la Directiva 2014/31/UE y con la norma EN 45501 PT Balança homologada nos termos da Diretiva 2014/31/UE e da Norma EN 45501 GR εγκεκριμένη ζυγαριά σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/31/ΕΕ και το Πρότυπο EN 45501</p> <p>SA - جهاز طلي يتوافق مع التوجيه 45501 EN</p>
	<p>IT Classe di precisione GB Accuracy class FR Classe de précision DE Classe de précision ES Classe de precisión PT Classe de precisão GR Classe de precisión</p> <p>SA قُوْدلأ SA</p>		<p>IT Dispositivo medico conforme alla Direttiva 93/42/CEE - GB Medical Device complies with Directive 93/42/EEC - FR Dispositif médical conforme à la directive 93/42 / CEE - DE Medizinprodukt gemäß Richtlinie 93/42/CEE - ES Dispositivo médico según la Directiva 93/42 / CEE - PT Dispositivo médico em conformidade com a Diretiva 93/42/CEE - GR Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την οδηγία 93/42 / CEE</p> <p>SA جهاز طبي يتوافق مع التوجيه 93/42/CEE</p>
	<p>IT Limite di temperatura - GB Temperature limit - FR Limite de température - DE Temperaturgrenzwert - ES Límite de temperatura - PT Limite de temperatura - GR Όριο θερμοκρασίας</p> <p>SA حد درجة الحرارة SA</p>		