



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**BILANCIA PESANEONATI DIGITALE**  
**ELECTRONIC BABY SCALE**  
**PÈSE-BÉBÉ ÉLECTRONIQUE**  
**ELEKTRONISCHE BABYWAAGE**  
**PESA BEBÉS ELECTRÓNICO**  
**BALANÇA PARA RECÉM-NASCIDOS ELETRÔNICA**  
**ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΑ**  
**إلكتروني لأطفال نازيم**


## GIMA 27313


Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Hersteller  
الشركة المصنعة / Παραγωγός / Fabricante / Fabricante

Shenzhen Healthcare Electronic Technology Co., Ltd.  
1F~3F of Block 48, 1F~3F of Block 46, Changxing Industrial Zone,  
Changzhen Community, Gongming Street, Guangming District,  
Shenzhen City, Guangdong Province, P.R. China  
elaine.li@healthscale.com  
Made in China

**REF** TH996A-V1

Importato da / Imported by / Importé par / Eingeführt von  
Importado por / Importado por / Εισαγωγή από / مستورد عن طريق  
**Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
**www.gimaitaly.com**

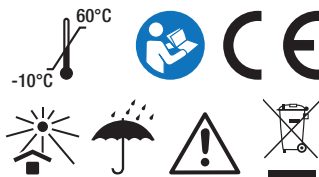

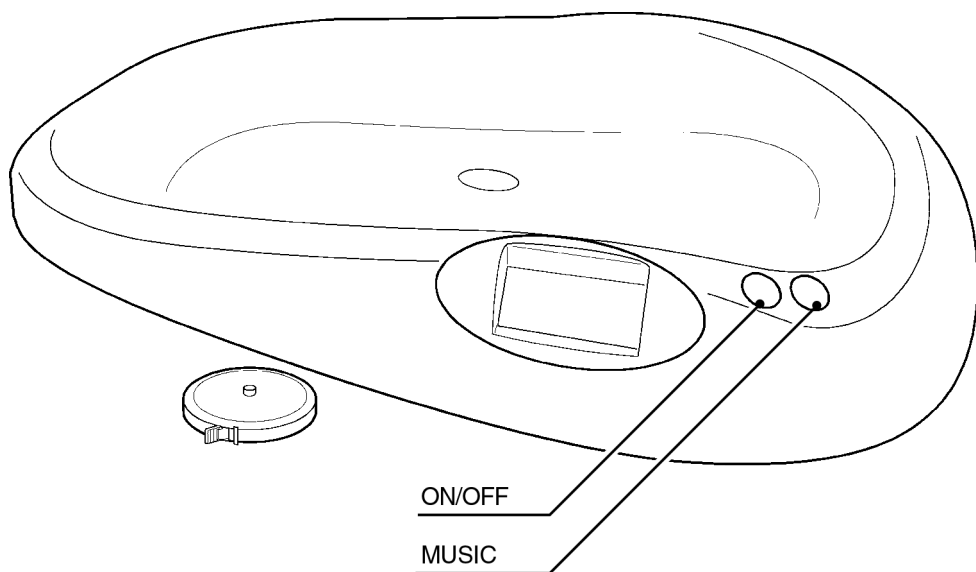

## ميزان أطفال إلكتروني Baby

ميزان الأطفال الإلكتروني Gima عبارة عن جهاز مفيد لقياس وزن وطول الأطفال. يتميز هذا الميزان بالدقة العالية ومزود بضبط أوتوماتيكي للصفر وكذلك ينطفئ أوتوماتيكيا بعد 30 ثوان من الاستعمال. بالوحدة إلى الميزان يتم تزويد شرشف صغير قابل للغسيل لتغطية الصحن خلال عملية القياس وعجلة قياس أمتار صغيرة لقياس طول الطفل. من الممكن إستعمال هذا الجهاز سواء في بيئة المستشفى أو في البيئة العائليّة.

### الميزّات التّقنيّة

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| القدرة القصوى: 20 كغم / 44 ليبرا        | القدرة الأدنى: 20 غرام                |
| الدقة: 10 غرام                          | قياس الطول: 0 - 150 سم / 0 - 60 إنش   |
| درجة حرارة الفعاليّة: 5 س - 35 س        | درجة حرارة التخزين : 10- °C - 60 °C   |
| التصميم: 4 بطاريات من النوع AA 1,5 فولط | التسامح: >5.00 كجم / $\pm 0.02$ كجم ، |
|                                         | $\leq 5.00$ كجم / $\pm 0.2\%$ كجم     |

### التوجيهات

عدم إستعمال الجهاز في حالة وجود أضرار به. التوجّه إلى بائعكم الخاص.

تحايد أي نوع من التصليحات الغير وافية. يجب أن تتم التصليحات فقط باستعمال قطع غيار أصليّة والتي يجب تركيبها بموجب الإستعمال المفروض.

الجهاز مصنوع من المواد القويّة المقاومة للتآكل والظروف البيئيّة المهيأة للاستعمال العادي. لذلك فهو لا يحتاج إلى اهتمامات خاصّة؛ مع ذلك من الضروري حفظه فيبيئة مغلقة، وتحايد تعريضه إلى الضوء والعوامل المناخيّة، والاهتمام بحمايته من الغبار للمحافظة على الشروط الصحيّة المتعلقة بالنظافة.

ننصح بعدم ترك الطفل على الميزان بدون حراسة وبعدم ترك لفافة قياس الطول على متناول يد الطفل.

### إزالة التغليف

نذكر بأن العناصر المستعملة للتغليف (الورق، النايلون، الدبابيس المعدنيّة، الشريط اللاصق، إلخ...) قد تسبب إلى جروح فيما إذا لم يتم التعامل معها بعناية. من الضروري التخلص منها باستعمال الأدوات الملائمة وعدم تركها لأشخاص غير واعيين وبدون مسؤوليّة، نفس الشيء يقال بالنسبة للمعدات المستعملة للتخلص من عناصر التغليف نفسها (المقصّ، السكاكين، إلخ...).



أول عمليّة يجب القيام بها بعد أن يكون قد تمّ فتح العبوة وتمّت إزالة التغليف هو القيام بفحص عام للقطع والأجزاء التي تكوّن الجهاز؛ التأكد من وجود كافة العناصر الضروريّة ومن حالتها الكاملة.

### التركيب

أول عمليّة يتوجب القيام بها حال إزالة التغليف عن الميزان هو إدخال البطاريات به. خلية البطاريات موجودة تحت قاعدة الميزان. تركيب 4 بطاريات حديثة والانتباه على أن تكون قطبية البطاريات ملائمة ومن ثم إغلاق غطاء خلية البطاريات. ميزان الأطفال لا يحتاج إلى تعيير ولكن من الضروري أن يكون موضوع على سطح مستو.

## الفعاليّة

التأكد دائماً من عدم وجود أجسام غريبة تحت ميزان الأطفال وأن تكون أرجل الميزان موضوعة جيداً على سطح الدعم.

الضغط على الزر والانتظار لبضع الثواني دون وضع أي حمل في صحن الميزان.

عند تشغيل المقياس ، سيتم عرض قيمة القياس الأخيرة (لا تقل عن 0.5 كجم وقفل) ، إن وجدت ، ثم إعادة التعيين إلى 0.00. عندما تظهر الرسالة "0.00" على الشاشة ، يكون ميزان الأطفال جاهزاً للاستخدام

مرة OFF/ON يتم ضبط المقياس عادة بالكيلوغرام. بعد تشغيل المقياس ، اضغط على مفتاح أخرى قبل أن يعرض 0.0

على كل ضغطة يكون من الممكن الاختيار بالتبادل بين كغم أو lb ، على شاشة العرض تظهر وحدة القياس المختارة.

لملاهة الطفل وتسهيل عملية قياس الوزن من الممكن تشغيل الموسيقى بالضغط على الزر "MUSIC"، ولفصل الموسيقى الضغط من جديد على نفس الزر. اقرأ وميض قيمة الوزن على الشاشة.

في حالة أن الوزن على الميزان يزيد عن القدرة القصوى له، تظهر على شاشة العرض الكتابة "0-LD".

عند إزالة الوزن ، تتم إعادة ضبطه إلى 0.00

لا تضرب.



لا تتراكم أشتات على الميزان.

لا تغطس في الماء.

عدم القيام بقياس وزن حمولات مفرطة وتحايد تحرك الأطفال على صحن الميزان. فإن هذا قد يسبب الضرر لخليّة الحمل!

في حالة عدم استعمال الميزان فينطفئ بشكل أوتوماتيكي بعد 10 ثوان تقريباً. لإطفاء الميزان

يدويا الضغط على الزر "OFF/ON" ما دام الميزان فارغ.

إزالة البطاريات في حالة عدم استعمال الميزان لمدة طويلة.

للقيام بقياس طول الطفل، وضع الطفل مستلقي على سطح ثابت واستعمال العجلة المترية المزودة.

## الصيانة

على الشاشة ، يجب استبدال البطاريات "Lo" عندما تظهر إشارة الجهد المنخفض

الميزان هذا لا يحتاج إلى عمليات صيانة خاصة. مدة حياة الجهاز تتعلق بمدى استعماله، لتنظيفه، عدم تغطيسه في الماء أو في السوائل؛ استعمال قطعة قماش ناعمة مبللة بمواد التنظيف و/أو المواد المطهرة التي لا تسبب الضرر للجهاز.

|                                   |                                                                                   |                                           |                                                                                    |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| اتبع التعليمات للاستخدام          |  | الحذر: قراءة التعليمات (التحذيرات) بعناية |  |
| يحفظ بعيدا عن أشعة الشمس          |  | يحفظ في مكان بارد وجاف                    |  |
| رقم الدفعة                        |  | كود المنتج                                |  |
| حد درجة الحرارة                   |  | WEEE التخلص                               |  |
| المنتج متوافق مع التوجيه الأوروبي |  | تاريخ التصنيع                             |  |

### التصريف

ممنوع تصريف المنتج هذا بالوحدة إلى النفايات المنزلية الأخرى. من واجب المستهلكين القيام بتصريف الأجهزة المراد التخلص منها بإحضارها إلى مراكز التجميع المشار إليها والخاصة في جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية واستغلالها من جديد.



### شروط ضمان جيمّا GIMA

يُطبق ضمان B2B القياسي جيمّا GIMA لمدة 12 شهر.