




PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

SCOLIOMETRO - SCOLIOMETER SCOLIOMÈTRE  
- DAS SKOLIOMETER - ESCOLIÓMETRO  
- ESCOLIÓMETRO - ΣΚΟΛΙΟΜΕΤΡΟ  
الذنف مق ياس

Manuale utente - User manual - Notice  
d'utilisation - Betriebsanweisungen - Manual  
de uso - Manual de uso - εγχειρίδιο -  
دليل الإستعمال والرعاية

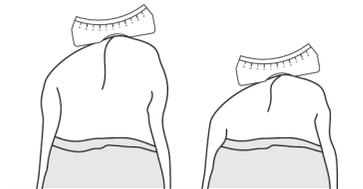

REF 27351   

Distribuito da/Distributed by/Distribué par/Distribuido por  
Gima S.p.A - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
www.gimaitaly.com  
Made in Italy

M27351 - M - Rev. 8-10/21

مانسلا تَقّو ىلَع ,يفلخا همزج يف ,صرفن عّججلل ساِملا (ي.غلضلا)

ردصلا يف قُّول عتملا سايقِّلا ةيلمع نّيبم **3 قروصلا** يف ءانجنال ضيرملا فرط نم اجتحت يتلا ,يولعلا مبرق يف حيحصلل عضولا ىلا ريشت **4 قروصلا** روصلل فيفخ هزجلا يف فصاَملا تاصوصفقلل ضوحلا ىلَع روصولل

يرقغلا دوماغلا نم ينطقلا ىلا سوكغلاب بلسطتت يتلا ىلَع روصولل لماللا ءانجنالا قرفب دوزم زاغلا .ضوحلا لخد حجراشت يتلا قريغص قرقلا لقلت .صاخلا راسملا لمسلا ىلَع ققشابم ريشت قذراقملا يوتسملا تاجرد ىلا اذّ .يقفال يوتسملا عم نييبعتب حمسئ فشرفلا يذلا يمللا مبيقتلابو بيغلا ربعت عم نا بجمي مل ققالغلاب واقوتت يتلا ميِّقلا ؤوببشم ىلا ففاضالاب ,تاجرد **5** لداعت جئاتنلا قزاقم نكمملا نم ,لفلذ روطتتل قيقلل ديدحتلا لفلذلو تقولا عم اهيلع لوصحملا ضيفختب اضيا احماس ,فيضرملا ةيلمغلا روطت ددع وا .ةيغاجملا ريوصتلل تاصوصف يف ديفم .ةيبيرقت فساقملا ميِّقلا

قزكرم تافطنم مدختست ال زاغلا فيظنت قلاح يف

ءاملاب لللبملا غرامقلا نم ةعطق لب املشاميام واتابيدم الو ريوطتلل ؛لذتعملا نوباصل او (لواناشيال) ريغمل لوحلا مادختساب حمسي

**شروط ضمان جيمبا GIMA**

يُطبق ضمان **B2B** القياسي جيمبا GIMA لمدة **12** شهر .


## GIMA ARABIC

وأ يلكفشلا) يرقغلا دوماغلا ءانحباب فنحلا فيحرجت متي ,يدارقت لكشرب نميالا وأ رسيالآ بناجلا ىلا ( يفئاطولل :دوجو ىلَع الوا دبتغي فنحلا ضررم صيخشت

تارقف ىتاونل يدوماعلا ءاجتالاب كعظنتم ريغ ءاذاحم **1**) ؛(اللتخا) يرقغلا دوماغلا ؛ئنيلفرولاو نيغتلكلا نزاوت ددع **2**) ؛نيغتلكلا دح حول زورب **3**) ؛يفلخا روصولل رادجل يغلض مانس**4**)

لوا ,ميقتسم عضوو يف وو ,فلخلا نم ضيرملا كيقارمب بخصالآ نم .نيبيتللا قلمس هالع ءرولكدم فوشك فتالئ ي روصولل رادجلل يغلضلا مانسلا ميقوو دوجو فشك تارقفلا ماسجال نارود ءيلمجل ءجيبئ اثنئني يذلا يفلخا فنحلا تالاح يف ,ل عغلاب .يرقغلا دوماغلا روح ىلَع يقفالآ حطسلا ىلا قزاقملا ب ,رخا عضوو بييسرت متي .نيبناجلل ةيفغلخا عالضالل

(بقاري نمل رسيالآ فرطلا **1 قروص**) فنحلا فيوجت هّج نم يف طوبه لفلذو ءينئ رمظت هّج نم امنيب يفلخا غلضلا فرطلا **1 قروص**) فنحلا بديحت عوتئ رمظي (بقاري نمل نميالا فنحلا نيبيبت .غلضلل ربكفا صحف مت اذا اميف حضوا نوكي مل عجب ,فلخلا نم ضيرملا ماملل يئانحنالا عضوولا ذختي اذّ يف .ضوحلا ىلَع روصولل قرف نيبيبت متي لكفشلا يوتسملا ىلَع يوتسملا يف ادح مهلا نم ,غدلا اذل .يقفالآ نا ,لمائلل احيوصللا مبيقتلل لكشلاب روصولل ضيرملا يئحي ماقالآ تمام ام ,حيحصللا ىلَع ققواس ءوزال او ,فبراقتم قظناحملا عم ,ناقيسلا لوط بلسرتم ريغ عضوو ىلَع

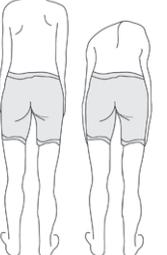

**2 قروص**

**1 قروص**

**(2 قروص)**

نس يف دلوالا نم **5%** نا فيك تكتبئئا تاساردلا نم ديدعلا نم قيقد صحف لفلذ ؛ةيبناج تافاطعنا نودبني فسردملا ,غولبلا نس ىتجو تاونس **6** نس نم ,حلا عملا بيبطلا لبق قزحملا ءيدياتعلا تاصوصحلا نمض نم نوكي نا بجي .يدياتع لكشرب

يف بيبطلل ديفملا زاغلا لشمي يذلا ,فنجلا سايقم دوجو نيبيبتو فشكبب حمسي ,لمغلل يويلا قيبطنتلا لدملا ,يوتسملا انبم ىلَع دنئسيو .يغلضلا مانسلا فلتخملا عافترالل يمللا فشركلاب حمسي لكشرب يفصن لبق نم ةديبملا ,يقفالآ يوتسملا عم قزاقملا ب .فنحلاب نيباصملا صاخشالا يف روصولا

فنجلل تاجردلاب هن ع ربعملا ,يملكلا مبيقتلا فندل رهظ ىلَع ,طغئمئلا نود فنحلا سايقم عضوو يفاكلا نم عم قفاوتئي زاغلل رعمملا حطسلا نوكي لكشرب ,ضيرملا ةيوازل ,نيبملا لمسلا ىلَع ,ءارقلا مت نمو يكوشلا عوتئلا حطسلا او يقفالآ حطسلا نياب ام ءيوازلا) روصولا نارود