



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

STAMPELLE - CRUTCHES - BÉQUILLES - KRÜCKEN MULETAS
- MULETAS - ΔΕΚΑΝΙΚΙΑ -

العكازات



يجب الإبلاغ فوراً عن أي حادث خطر وقع فيما يتعلق بالجهاز الطبي الذي زودنا به إلى الجهة الصانعة والسلطة المختصة في الدولة العضو التي يقع فيها

التحذيرات

اقرأ هذا النسخة بعناية قبل استخدام المحثارات.

يجب استخدام المحثارات من خلال إمساكها بشكل صحيح. وتدمج الجسم لقط (المعمولة المصنوع من 100 كجم) ويحجب وصلة طبية. لا بد من ضبط المحثارات بطريقة مناسبة للاستخدام والموصفات المصنعة قدر يمكن مع قناع تعديلات الطبيب المتخصص.

قبل الاستخدام تذكر من أن المحثارات ليست دافئة، وأن الأنبوب قد تم طيلها بشكل صحيح، وأن أطراف المنفاخ المطبوعة ثلاثاً لأن ليست مستطيلة، ولا يجب استبدالها على الفور. توحي قصير العرص عند استخدام المحثارات على الأسطح الممثلة أو المتعددة.

التضييق

محثارات المساعد، كود 27793

يمكن ضبط الارتفاع بين 90 و 119 سم بالضبط على المزلاج والعرص على جهة بلع في القاب العرصب. يتم استخدام يو جي الوصلة لمنع التفريق بين الأنبوبين ويجب اعتماد ويمنع فقط عند تشغيل المزلاج.

محثارات الإبطون، كود 27798

يمكن ضبط الارتفاع بين 112 و 132 سم بالضبط على المزلاج والعرص على جهة بلع في القاب العرصب. ومن الممكن أيضاً ضبط المسافة بين دعامة الإبطون والتضييق. تلك المسافة القياسية وأزل الفرعي من التضييق ثم أمثل الفرعي في القاب المتكرب. وثقته عن طريق ربط المسامولة.

محثارات الإبطون، كود 27792

يمكن ضبط الارتفاع بين 95 و 115 سم بالضبط على المزلاج والعرص على جهة بلع في القاب العرصب. ومن الممكن أيضاً ضبط المسافة بين دعامة الإبطون والتضييق. تلك المسافة القياسية وأزل الفرعي من التضييق ثم أمثل الفرعي في القاب المتكرب. وثقته عن طريق ربط المسامولة.

محثارات الإبطون، كود 27799

يمكن ضبط الارتفاع بين 119 و 139 سم بالضبط على المزلاج والعرص على جهة بلع في القاب العرصب. ومن الممكن أيضاً ضبط المسافة بين دعامة الإبطون والتضييق. تلك المسافة القياسية وأزل الفرعي من التضييق ثم أمثل الفرعي في القاب المتكرب. وثقته عن طريق ربط المسامولة.

محثارات الإبطون، كود 27770

يمكن ضبط الارتفاع بين 100 و 130 سم بالضبط على المزلاج والعرص على جهة بلع في القاب العرصب. ومن الممكن أيضاً ضبط المسافة بين دعامة الإبطون والتضييق. تلك المسافة القياسية وأزل الفرعي من التضييق ثم أمثل الفرعي في القاب المتكرب. وثقته عن طريق ربط المسامولة.

شروط ضمان جيمما GIMA

يُطبق ضمان B2B القياسي جيمما GIMA لمدة 12 شهر.

ممثل معتمد في الاتحاد الأوروبي	EC REP	كود المنتج	REF	جهاز طبي يتوافق مع التوجيه (UE) 2017/745	CE
الحذر: قراءة التعليمات (التحذيرات) بعناية	⚠	رقم الدفعة	LOT	يحفظ بعيداً عن ضوء الشمس	☀
يحفظ في مكان بارد وجاف	☂	تاريخ التصنيع	📅	اقرأ بدقة وحرص تعليمات الاستخدام	📖
شعار فريد	UDI	جهاز طبي	MD	الشركة المصنعة	🏭



Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory (LTD.)
5 Xingfu Road, Zone A, Shishan Industrial Park,
Nanhai District, Foshan City, China, 528000
Made in China



MedNet EC-Rep GmbH
Borkstrasse 10. 48163 Muenster.
Germany



FS937L - FS935S(M) - FS935S(S) - FS935S(L) - FS9252L

GIMA 27793 - 27798 - 27792
27799 - 27770

Importato da / Imported by / Importé par / Importiert von
Importado por / Importado por / Εισαγωγή από / مستورد عن طريق

Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

