



GIMA

GIMA BRUSH

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE BOOK
INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN
BETRIEBS UND WARTUNGS ANWEISUNGEN
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
دليل الإستعمال والرعاية

REF 29740

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.

AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.

ACHTUNG: Die Bediener müssen vorher dieses Handbuch gelesen und verstanden haben, bevor sie das Produkt benutzen.

ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.

ATENÇÃO: Os operadores devem ler e entender completamente este manual antes de usar o produto.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι χειριστές αυτού του προϊόντος πρέπει να διαβάσουν και να καταλάβουν πλήρως τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από την χρήση του.

الحذر: على العمال قراءة وفهم هذا الدليل بكامله قبل البدء باستخدام المنتج.

CE



GIMA Spa - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italia

ITALIA: Tel. 199 400 401 (8 linee r.a.) - Fax 199 400 403

E-mail: gima@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com

INTERNATIONAL: Tel. ++39 02 953854209 - Fax ++39 02 95380056

E-mail: export@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com



GIMABRUSH

فرشاة لأخذ العيّات الخلويّة من باطن عنق الرحم. الفرشاة مكوّنة من شعر من النايلون، مثبتة بتغطية معدنيّة. مركّبة على ساق من البلاستيك. ملائم لأخذ عيّات من الخلايا من القناة الباطنيّة لعنق الرحم. استعمال الجهاز يجب أن يتم على أيدي عمّال مؤهلين، مدربين وذوي تصريح للقيام بأخذ العيّات للقيام بـ Pap-test.

عدم التعريض لمصادر الحرارة. الاستعمال فقط إذا كان التغليف سليم. استخراج المادة من التغليف فوراً قبل الاستعمال، فحص المنتج للتأكد من كماله.

الاستعمال المسموح به: Gimabrush يلزم لأخذ عيّنة من الخلايا التي تنفصل عن القناة الباطنيّة لعنق الرحم. الإرشادات: يمكن استعماله أيضا في حالات وجود تضيق في قناة عنق الرحم. **موانع الاستعمال:** ممنوع استعماله في حالات الحمل. **طريقة الاستعمال:** إدخال المنظار المهبلي إلى المهبل لتبیین عنق الرحم، استخراج الفرشاة من التغليف والإمساك بها من طرف الساق، فحص الجهاز نظريا للتأكد من كماله، إدخاله ببطء في قناة عنق الرحم، القيام بإدارة كاملة للفرشاة، إخراجها ببطء، جرّ وإدارة شعر الفرشاة بتكرار على زجاجة الكشف.

المنتج غير معقم.
المنتج يستعمل لمرة واحدة فقط.



التخلص النهائي من المنتج يجب أن يتم حسب الأنظمة والقوانين المحليّة الخاصة بالمواد الطبيّة.