

ELETTRODI E PROLUNGHE STERILI MONOUSO PER ELETTROCHIRURGIA
STERILE ELECTRODES AND EXTENSIONS DISPOSABLE ITEMS FOR ELECTROSURGERY
ÉLECTRODES ET RALLONGES STÉRILES À USAGE UNIQUE POUR ÉLECTROCHIRURGIE
STERILE ELEKTRODEN UND VERLÄNGERUNG EINWEGNUTZEN FÜR DIE ELEKTOCHIRURGIE
ELECTRODOS Y CABLES ESTÉRILES MONOUSO PARA ELECTROCIRUGÍA
ELETRODOS E EXTENSÕES ESTERILIZADOS DESCARTÁVEL PARA A ELETRO-CIRURGIA
СТЕРИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ И УДЛИНИТЕЛИ ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В
ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΝΟΝΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ELEKTRODEN EN STERIELE VERLENGSNOEREN EENMALIG GEBRUIK VOOR ELEKTROCHIRURGIE
STERILE ELEKTRODER OG FORLÆNGERE ENGANGSBRUG TIL ELEKTROKIRURGI
ELECTROZI ŞI PRELUNGITOARE STERILE PRODUSE DE UNICĂ FOLOSINŢĂ PENTRU
ELECTROCHIRURGIE
ELEKTRODY I PRZEDŁUŻACZE STERYLNE DO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU W ELEKTROCHIRURGII
STERİL ELEKTROTLAR VE UZATMALAR ELEKTROCERRAHİ İÇİN TEK KULLANIMLIK
STERIL ELEKTÓDOK ÉS KÁBELEK EGYSZER FELHASZNÁLHATÓK ELEKTROSEBÉSZETBEN
STERIILIT ELEKTRODIT JA JATKEET KERTAKÄYTTÖINEN SÄKHÖKIRURGIAN VÄLINE
STERIILSED ELEKTROODID JA PIKENDUSJUHTMED ÜHEKORDELT KASUTATAVAD
ELEKTROKIRURGIA TOOTED
STERILI ELEKTRODI UN PAGARINĀJUMI VIENREIZ LIETOJAMI ELEKTROKIRURGIJĀ
STERILNÍ ELEKTRODY A PRODLUŽOVACÍ KABELY NA JEDNO POUŽITÍ PRO ELEKTROCHIRURGII
STERILNÉ ELEKTÓDY A PREDĽOVAČE JEDNORAZOVÉ KOMPONENTY PRE ELEKTROCHIRURGIU
STERILA ELEKTRODER OCH FÖRLÄNGNINGAR ENGÅNGSBRUK FÖR ELEKTROKIRURGI
СТЕРИЛНИ РЪКОХВАТКИ И УДЪЛЖИТЕЛИ ЕДНОКРАТНИ ЗА ЕЛЕКТРОХИРУРГИЯ
STERILNE ELEKTRODE I PRODUŽECI ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU ZA ELEKTROKIRURGIJU
ELEKTRODE I STERILNI SPOJNI KABLOVI JEDNOKRATNA OPREMA ZA ELEKTROHIRURGIJU
STERILNE ELEKTRODE IN PODALJŠKI ZA ENKRATNO UPORABO V ELEKTROKIRURGIJI
STERILE ELEKTRODER OG FORLENGELSER ENGANGSUTSTYR TIL ELEKTROKIRURGI
أقطاب كهربائية و وصلات اطالة الكابل المعقمة مكونات أحادية الاستخدام للجراحة الكهربائية



تعليمات الاستخدام

تحذير

المنتج معقم بواسطة أكسيد الإيثيلين و يجب استخدامه مرة واحدة فقط. لا يجب إعادة الاستعمال. حيث أن إعادة استعماله قد تتسبب فيما يلي : وجود بقايا عضوية قد تتسبب في حدوث عدوى مرضية. تدهور حالة المواد المكونة للكابوية. فقد بعض الخصائص الفنية للمنتج.

ان تم فتح أو اتلاف العبوة لا يمكن ضمان التعقيم ممنوع الاستخدام بعد انتهاء الصلاحية اذ لا يمكن ضمان التعقيم. بعد التأكد من سلامة العبوة ، يجب فحص المحتويات و في حالة اكتشاف أي تلف أو عيب لا يجب الاستعمال و يجب إعادة العبوة الى فياب.

يجب حفظ المنتجات بعيدا" عن مواد حارقة : التشغيل العفوي و الحرارة المنبعثة قد يؤدي الى حدوث حرائق.

يجب ان يقوم أفراد مؤهلين بتوصيل و تشغيل المعدات

يجب الاطلاع علي تعليمات الاستخدام الصادرة عن المنتج عند استخدام المولد و المقبض و الألواح المحايدة و الكابلات و غيره من الاكسسوارات.

ملحوظة ان أجهزة تنشيط ضربات القلب قد تتعرض للتلف عند تعرضها لتيار الكهرياء الجراحية .

لا يجب اخضاع مريض حامل لجهاز تنظيم ضربات القلب لتيار الكهرياء الجراحية قبل القيام باستشارة أخصائي امراض القلب. يجب التعامل مع فضلات العيادات الصحية طبقا لما تمليه قواعد القانون .

التعليمات

قطع و تخثير الأنسجة أثناء اجراء الجراحة الكهربية باستخدام جهاز مناسب لتوليد الموجات عالية التردد .

الحد الأقصى للتيار الكهربي المستخدم 9 ك ف بي بي

التجهيز و التوصيل

تأد من أن القطب الكهربي و الوصلة (ان وجدت) قد جرى توصيل أليهما في وصلة المقبض . عند استبدال القطب الكهربي و / أو الوصلة يجب التأد من عدم اتصالهما بالمولد و من أن المولد تم فصله (انتظار) .

قم بتوصيل مولد الموجات عالية التردد بالمقبض و بمفتاح التشغيل بالبدال (للموديل الذي يحتوي على التحكم من البديل).

انتبه الى عدم ملامسة الكابل النشط لجلد المريض بشكل مباشر و انتبه ألا يتعد الكابل.

ملحوظة : لو تم تغيير و ضع جسم المريض يجب التأكد دائما" من كل التوصيلات.

الاستخدام

بعد توصيل القطب الكهربي أو الوصلة في مكانها ، اتبع تعليمات المقبض للاختبار المبدئي للعمل بشكل سليم.

أثناء العمل يجب دائما" اختيار أقل مستو ممكن من الطاقة . لو قلت قدرة التخثير عن الطبيعي لا يجب رفع الخارج من الموجات العالية التردد قبل القيام بما يلي من الخطوات:

- التأكد من وضع اللوح المحايد بشكل سليم
- التأكد من تثبيت الكابلات و من وصلاتهم
- التأكد من التشغيل الصحيح لمفاتيح التشغيل (سواء اليدوية أو بالبدال)
- التأكد من عدم وجود أي أضرار بالمادة العازلة للكابلات
- التأكد من نظافة القطب الكهربي و الوصلة (ان وجدت) .



قوابط
ةيروأا
EEC/42/93



عجار ريذحت
تادنتسمل
قوفرمل



تاميلعت عجار
مادختسال



مقر
جول اتكل



زمر
قلي غشتلا



جاتنإل خيرات



مدختسي
لبق



داعي ال
مادختسأ



مق عم
ديسكواب
نيل يثإل



يف مدختسي ال
قوبعلا فلت قلاح




يوتحي ال
طاظم يلع
وأ ي عيبط
سكتال



ظفحي
نع اديعب
سمشلا عوض



قبيسن دح
قبوطرلا

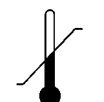

قراحل ةجرد دح



عناصل



عطقلا ددع



Via Costoli, 4 - 50039 - Vicchio (Florence , Italy) - www.fiab.it



52502390IU9A - 2019/06