

OTOSCOPIO CON FOTOCAMERA
OTOSCOPE WITH CAMERA
OTOSCOPE AVEC CAMÉRA
OTOSCOPIO CON CÁMARA
OTOSCÓPIO COM CÂMARA
OTOSKOP MIT KAMERA
OTOSCOOP MET CAMERA
OTOSKOP MED KAMERA
OTOSKOP MED KAMERA
OTOSKOP MED KAMERA
OTOSKOOPPI, JOSSA KAMERA
OTOSKOPAS SU KAMERA
OTOSKOPS AR KAMERU
KAAMERAGA OTOSKOOP
OTOSKOP Z KAMERA
OTOSKOP S KAMEROU
OTOSKOP S KAMEROU
OTOSZKÓP KAMERÁVAL
OTOSKOP S KAMERO
OTOSKOP S KAMEROM
OTOSCOP CU CAMERA
OTOSKOPI C KAMERA
ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ

منظار الأذن المزود بكاميرا

- Manuale d'uso e manutenzione
- Use and maintenance book
- Instructions de fonctionnement et entretien
- Manual de uso y mantenimiento
- Manual de uso e manutenção
- Betriebs und wartungs anweisungen
- Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης
- Instrukcje użytkowania i konserwacji
- Návod k použití a údržbě

- Instruktioner för användning och underhåll
- Manual de utilizare și întreținere
- Návod na použitie a údržbu
- Instructies voor gebruik en onderhoud
- Brugs- og vedligeholdelsesvejledning
- Käyttö- ja huolto-ohjeet
- Kasutus- ja hooldusjuhend

- Priročnik za uporabo i održavanje
- Kezelési és karbantartási útmutató
- audiojimo ir priežiūros instrukcijos
- Lietošanas un apkopes instrukcijas
- Instruksjoner for bruk og vedlikehold
- Navodila za uporabo in vzdrževanje
- Инструкции за употреба и поддръжка

- تعليمات الاستخدام والصيانة

GIMA 31410



AOJ HEALTH Technology Co.,Ltd
Room 202, Building 5, Shuhe Industrial Park,
Sanwei Community, Hangcheng Street,
Bao'an District, 518126 Shenzhen,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Made in China


REF OT-501

EC **REP**

Share Info GmbH
Am Schulzentrum 12,
41564 Kaarst, GERMANY



Gima S.p.A
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

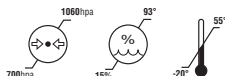

عربي

دليل تعليمات منظار الأذن

الطراز: OT-501

إصدار الدليل: A0

تاريخ الإصدار: 2023.11

الاستخدام المقصود

منظار الأذن هو جهاز محمول مزود بإضاءة وكاميرا، يُستخدم لفحص الأذن الخارجية وقناة الأذن وطبلة الأذن على شاشة الهاتف الذكي. أما استخدامه الثانوي فهو توفير إضاءة للحلق والممرات الأنفية بشكل عام، وذلك باستخدام الملحقات الإضافية.

المجموعة المستهدفة

يمكن استخدام منظار الأذن للأطفال فوق سن عام واحد تحت إشراف شخص بالغ، أو للاستخدام بشكل مستقل من قبل أي شخص فوق سن 12 عامًا.

موانع الاستعمال

لا موانع للاستخدام

شرح الرموز

هشّة ، والتعامل معها بحذر		الحذر: قراءة التعليمات (التحذيرات)	
يحفظ بعيدًا عن ضوء الشمس		الشركة المصنعة	
مؤشر النفاذية	IP22	تاريخ التصنيع	
إشعاع كهرومغناطيسي غير مؤين	((١٠))	اتبع التعليمات للاستخدام	
جهاز من النوع BF		الرقم التسلسلي	SN
ممثّل معتمد في الاتحاد الأوروبي	EC REP	رقم الدفعة	LOT
مستورد عن طريق		التخلص WEEE	
SA جهاز طبي يتوافق مع التوجيه (UE)/2017/745	CE	جهاز طبي	MD
كود المنتج	REF	معرف فريد للجهاز	UDI
حد نسبة الرطوبة		يحفظ في مكان بارد وجاف	
حد درجة الحرارة		حد الضغط الجوي	

تعليمات السلامة

يُرجى قراءة دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز، والاحتفاظ به من أجل الرجوع له مستقبلاً.

إذا كنت ستعطي هذا الجهاز لشخص آخر، فمن المهم أن تقدم له تعليمات الاستخدام هذه أيضاً. ستوفر الشركة، عند الطلب، مخططات الدوائر الكهربائية وقوائم أجزاء المكونات والأوصاف أو أي معلومات أخرى ضرورية لمساعدة الفنيين المؤهلين لدى المستخدم في إصلاح أجزاء الجهاز التي تحددها الشركة المصنعة على أنها قابلة للإصلاح. المواد التي يمكن للمستخدم ملامستها وليست سامة ولا تؤثر على الأنسجة وتتوافق مع ISO10993-5 و ISO10993-10 و ISO10993-23.

تحذيرات عامة


- لا يمكن استخدام هذا المنتج لتشخيص وعلاج أي مريض إلا إذا حدد الطبيب ذلك.
- هذا المنتج غير مناسب للأطفال دون سن 12 شهراً.
- لا تستخدم المنتج أثناء الشحن.
- يجب أن يخضع الأطفال لإشراف الوالدين عند استخدام منظار الأذن.
- عند استخدام هذا المنتج، يُرجى التأكد أن مظهر المنتج سليم وأنه لا توجد أي ملحقات مفقودة.
- يُرجى وضع المنظار الجوفي أو خافض اللسان المصنوعان من السيليكون بإحكام على منظار الأذن قبل الاستخدام.
- إذا لم تكن قناة الأذن مستقيمة تماماً، فعدّل موضع منظار الأذن برفق لرؤية طبلة الأذن بشكل أفضل.
- البعد البؤري للكاميرا مثبت عند 18±5 ملم. يُرجى ضبط المسافة بين عدسة الكاميرا وأذنك إذا لم تتمكن من رؤية الصورة بوضوح.
- لا تسقط الجهاز أو تغمره في الماء أو السوائل.
- لا تكسر منظار الأذن بيديك.
- التغييرات أو التعديلات التي لم يوافق عليها الطرف المسؤول عن الامتثال صراحةً قد تؤدي إلى إلغاء سلطة المستخدم في تشغيل هذا الجهاز.

- إذا لم يعمل الجهاز بشكل صحيح، أو إذا شعرت بتوعلك أو ألم، فتوقف عن استخدامه على الفور.
 - لا ينصح باستخدامه للحيوانات الأليفة أثناء حركتها.
 - لا تترك الأجزاء الصغيرة في مكان يمكن للأطفال الوصول إليه. فقد يبتلعها الأطفال. إذا ابتلع طفل الجهاز عن طريق الخطأ، فيُرجى الاتصال بالطبيب على الفور.
 - بالنسبة للمستخدمين الذين يستعملون الجهاز لأول مرة، يُرجى الاقتراب من قناة الأذن، الأنف أو الفم بلطف وببطء.
 - يُرجى اتباع دليل المستخدم عند الاستخدام الأول.
 - لا تعدل هذا الجهاز دون الحصول على إذن الشركة المصنعة.
 - تخلص من الجهاز عند انتهاء عمره الافتراضي.
 - اتبع القوانين المحلية وتعليمات إعادة التدوير الخاصة بالتخلص من الجهاز أو إعادة تدويره.
 - لا حاجة إلى الصيانة أو الخدمة عند الاستخدام.
 - لا تستخدم المنتج إذا ظهرت عليه علامات تلف. لا تحاول إصلاح الجهاز في حالة تعرضه لتلف! يُرجى الاتصال بالوكيل.
 - لا ينبغي إصلاح منظار الأذن أو صيانتها أثناء الاستخدام.
 - عند تغير الأداء (مثل: العرض غير الطبيعي)، يُرجى التوقف عن استخدامه فورًا والاتصال بموظفي خدمة ما بعد البيع في أقرب وقت.
- إشعار**
- إذا تعرض المستخدمون أو المرضى لأي حادث خطير يتعلق بالجهاز، فيُرجى الإبلاغ عنه إلى الشركة المصنعة والسلطة المختصة في الدولة العضو التي تقيم فيها.

السلامة من مصدر الطاقة

- تحقق من تصنيف الجهد قبل توصيل هذا الجهاز بمأخذ كهربائي. يُرجى استخدام قابس شحن عادي 5 فولت 1 أمبير لشحن المنتج.
- إذا لم يُستخدم الجهاز لفترة طويلة، فيُرجى شحن الجهاز مرة واحدة على الأقل كل شهرين لتجنب أن تفرغ البطارية بالكامل وخطر تعرضها للتلف الدائم.
- لا تترك الجهاز تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة. ضع محول التيار المتردد والجهاز في منطقة جيدة التهوية، مثل سطح المكتب أو الأرضية، عند استخدامه لشحن البطارية.
- لا تضع أشياء ثقيلة على المنتج.
- قد يصبح محول التيار المتردد والجهاز ساخنين أثناء الشحن.
- يُرجى عدم وضع المنتج بالقرب من مصادر الحريق تحت أي ظرف من الظروف
- إذا بدأ الجهاز في إصدار رائحة غير عادية، أو سخن بشكل مفرط، أو ظهرت عليه علامات الانتفاخ أو التشوه، فتوقف عن استخدامه فورًا واتصل بالشركة المصنعة للحصول على المساعدة.


الاستخدام المقصود

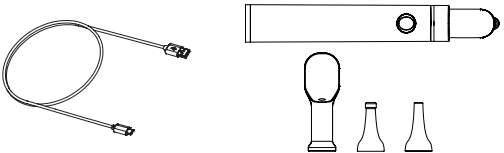

- 1 خافض لسان
- 2 منظار جوفي للأذن من السيليكون
- 1 دليل تشغيل

- 1 منظار أذن
- 2 منظار جوفي للأنف من السيليكون
- 1 كابل شحن

هيكل المنتج

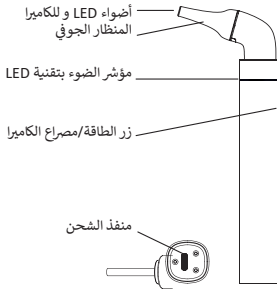

التحضير

شحن البطارية

قبل الاستخدام، اشحن الجهاز من خلال توصيله بكابل الشحن. يُرجى استخدام محول طاقة USB-A أو منفذ كمبيوتر لشحن الجهاز. يجب أن يتوافق المحول مع متطلبات المعيار IEC 60601-1 ولا بد أن تلي المواصفات المتطلبات: الدخل: تيار متردد 100~240 فولت 50/60 هرتز، الخرج: تيار مستمر 5 فولت 1.0 أمبير.

مؤشر الضوء بتقنية LED

يجب شحن الجهاز عندما يشير التطبيق إلى أن مستوى البطارية منخفض.

وميض مؤشر LED باللون الأزرق: يحتاج الجهاز إلى الشحن.



إضاءة مؤشر LED باللون الأزرق الثابت: جارٍ شحن الجهاز.



وميض مؤشر LED باللون الأبيض: سوف يومض مؤشر LED باللون الأبيض بشكل مستمر إذا كان الجهاز قيد التشغيل ولكن غير مقترن بالتطبيق.



إضاءة مؤشر LED باللون الأبيض بشكل ثابت: تم إنشاء الاتصال.



الاستخدام

ملاحظة: يتوجب عليك تحميل تطبيق Digital Endoscope قبل استخدام هذا الجهاز. يمكنك استخدام هذا التطبيق لفحص الأذن والحنجرة وتسجيل مقاطع فيديو/صور لإرسالها عبر تطبيقات الطبيب عن بُعد أو تتبع التغييرات.


- ابحث عن تطبيق "Digital Endoscope" في متجر تطبيقات الهاتف، وقم بتحميله وتثبيته.
- أخرج جهازك من الصندوق.

ملاحظة: نظف سطح الجهاز بمحلول كحول بنسبة 75% قبل ملامسته للجلد.



- يمكن اختيار أحد الملحقات الثلاثة وتركيبه ببطء على الجهاز.
- اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لتشغيل الجهاز. سوف يومض مؤشر الضوء باللون الأبيض، مما يشير إلى أن الجهاز قيد التشغيل وجاهز للاقتان بالتطبيق.

- اتصل بوحدة الواي فاي في "Digital Endoscope-XXXX" باستخدام الهاتف المحمول، وسوف يقوم الجهاز بمزامنة شاشة التطبيق. (XXXX هو رقم عشوائي)

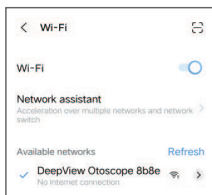

- ملاحظة: تتصل المنتجات المزودة بتقنية الواي فاي بإشارة الواي فاي ذات تردد 2.4 جيجاهرتز فقط.
قد تختلف قوة الإشارة حسب الموقع والنطاق الترددي وقوة الشبكة.
● بعد إقران الجهاز بالتطبيق، سيضيء المؤشر باللون الأبيض الثابت.



- ارجع إلى تطبيق Digital Endoscope، واضغط على الزر الأوسط لتشغيل الكاميرا وعرض الشاشة في الوقت الحقيقي.

	استخدام المنظار الجوفي للأذن
	استخدام خافض اللسان
	استخدام المنظار الجوفي للأنف

ملاحظة: تجنب الإدخال المفرط في قناة الأذن، وإذا شعر المستخدم بألم، فتوقف عن الاستخدام واستشر الطبيب.

- الضغط لفترة قصيرة على زر الجهاز يلتقط الصورة الحالية مثل مصراع الكاميرا ويحفظها في اليوم.
- أوقف تشغيل الجهاز. عند الانتهاء من استخدام الجهاز، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لإيقاف تشغيله. إذا ترك الجهاز قيد التشغيل، فسيتم إيقاف تشغيله تلقائيًا بعد 5 دقائق من عدم النشاط.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

المشكلة	الحل
شاشة التطبيق لا تعمل بشكل صحيح.	أعد تشغيل كل من الجهاز والتطبيق، ثم عاود الاتصال بشبكة الجهاز وارجع إلى التطبيق.
عند العودة إلى التطبيق بعد الاتصال بشبكة الجهاز، يظل بمقدور المستخدم الاقتران عبر الواي فاي.	
لا يستجيب الجهاز عند بدء التشغيل.	استخدم كابل الشحن من نوع USB المرفق في جهاز الشحن.
عندما يُظهر التطبيق انخفاض مستوى البطارية.	
يومض ضوء المؤشر.	
يتم إغلاق التطبيق بشكل عشوائي.	قم بإلغاء تثبيت التطبيق ثم إعادة تثبيته.

التنظيف والصيانة

- أوقف تشغيل الجهاز وافصله قبل التنظيف.
- نظف عدسة الكاميرا قبل وبعد كل استخدام بقطعة قماش ناعمة وجافة من الألياف الدقيقة أو قطعة قطن مبللة في كمية صغيرة من الكحول بنسبة 70%-80%. لا تستخدم كمية كبيرة من الكحول الطبي ولا تستخدم كحول الأيزوبروبيل النقي.
- إذا واجهت مشكلة في رؤية صورة واضحة، فتأكد من نظافة عدسة الكاميرا. استخدم قطعة قطن صغيرة لتنظيف أي شمع أو أوساخ قد تراكمت عليها.
- انتظر 5 دقائق تقريبًا بعد التنظيف للتأكد من تبخر الكحول تمامًا قبل استخدام الجهاز.
- لا تستخدم المنظفات الكاشطة أو المواد الكيميائية أو المذيبات مطلقًا لأنها قد تؤدي إلى إتلاف سطح الجهاز أو مكوناته الداخلية.
- تجنب دخول الرطوبة إلى أي فتحات أو منافذ في الجهاز. اترك الجهاز حتى يجف تمامًا قبل توصيله بالكهرباء أو استخدامه.
- لا تمسح أو تضغط على عدسة منظار الأذن بشكل مفرط، فقد يؤدي ذلك إلى تلف العدسة.
- لا تحاول تطهير منظار الأذن باستخدام منتجات الغلوتارالد هايد، أو غاز أكسيد الإيثيلين، أو البخار، أو أي سائل أو غاز مطهر آخر.

المواصفات

اسم المنتج	منظار الأذن
الطرز	OT-501
معيّار الشبكة	IEEE 802.11 b/g/n
الهوائي	هوائي مدمج
تردد التشغيل	2.4 جيجاهرتز
معدل نقل الصورة	30 معدل إطارات
قطر الكاميرا	4.0 ملم
مصدر ضوء الكاميرا	6 مؤشرات LED
البعد البؤري الأمثل	18±5 ملم
البكسلات	0.3 م

الجبروسكوب	3 محاور
دخل الطاقة	تيار مستمر 5 فولت 1 أمبير
نوع البطارية	بطارية ليثيوم 800 ملي أمبير
عمر البطارية	4 ساعات
درجة الحماية	IP22
درجة مقاومة الصدمات الإلكترونية	Type BF
نوع مضاد الصدمات الإلكترونية	إمداد طاقة داخلي
الوزن	60 جم
الأبعاد	23x55x155 ملم
مدة الخدمة	ثلاث سنوات
بيئة التشغيل	10 إلى 40 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 15% إلى 93% الضغط 700 هكتوباسكال إلى 1060 هكتوباسكال
النقل وبيئة التخزين	20- إلى 55 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 15% إلى 93% الضغط 700 هكتوباسكال إلى 1060 هكتوباسكال

الأداء الأساسي

- تردد التشغيل: 2.4 جيجاهرتز
- الطول البؤري الأمثل: 18±5 ملم
- البكسلات: 0.3 م

البيان التحذيري من لجنة الاتصالات الفيدرالية

تحذير:

- لا تقترب من المعدات الجراحية عالية التردد النشطة والغرفة المحمية بالترددات اللاسلكية لنظام الجهاز الطبي للتصوير بالرنين المغناطيسي، حيث تكون شدة الاضطرابات الكهرومغناطيسية عالية.
- ينبغي تجنب استخدام هذا الجهاز مجاورًا أو مكسدًا مع معدات أخرى لأنها قد تؤدي إلى تشغيل غير سليم. إذا استدعت الضرورة القيام بهذا الاستخدام، يجب ملاحظة هذا الجهاز والأجهزة الأخرى للتحقق من أنها تعمل بشكل طبيعي.
- يؤدي استخدام ملحقات وكابلات بخلاف تلك المحددة أو الموردة من قبل الشركة المصنعة لهذا الجهاز إلى زيادة الانبعاثات الكهرومغناطيسية أو تقليل الحصانة الكهرومغناطيسية لهذا الجهاز، مما ينتج عنه تشغيل غير سليم.
- معدات الاتصالات اللاسلكية المحمولة (بما في ذلك الأجهزة الطرفية مثل كابلات الهوائي والهوائيات الخارجية على مسافة تقل عن 30 سم (12 بوصة) من أي جزء من المعدات، بما في ذلك الكابلات المحددة من الشركة المصنعة. وإلا، فقد يؤدي ذلك إلى تدهور أداء هذا الجهاز.

الانبعاثات الكهرومغناطيسية

الإرشادات وبيان الشركة المصنعة - الانبعاثات الكهرومغناطيسية	
اختبار الانبعاثات	الامتثال
انبعاثات الترددات اللاسلكية CISPR 11	المجموعة 1
انبعاثات الترددات اللاسلكية CISPR 11	الفئة "ب"
الانبعاثات التوافقية IEC 61000-3-2	لا ينطبق
تقلبات الجهد/انبعاثات الوميض IEC 61000-3-3	لا ينطبق

الحصانة الكهرومغناطيسية

الإرشادات وإقرار الشركة المصنعة - الحصانة الكهرومغناطيسية		
اختبار الحصانة	مستوى اختبار IEC 60601-1-2	مستوى الامتثال
التفريغ الكهروستاتيكي (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 كيلو فولت اتصال ± 2 كيلو فولت، ± 4 كيلو فولت، ± 8 كيلو فولت، ± 15 كيلو فولت هوائي	± 8 كيلو فولت اتصال ± 2 كيلو فولت، ± 4 كيلو فولت، ± 8 كيلو فولت، ± 15 كيلو فولت هوائي
الكهربائية السريعة العابرة/الانفجارية IEC 61000-4-4	لا ينطبق	لا ينطبق
اندفاع التيار المفاجئ IEC 61000-4-5	لا ينطبق	لا ينطبق
انخفاضات الجهد وانقطاع التيار الكهربائي وتغيرات الجهد على خطوط دخل إمدادات الطاقة IEC 61000-4-11	لا ينطبق	لا ينطبق
تردد قدرة المجال المغناطيسي IEC 61000-4-8	30 أمبير/متر 50 هرتز/60 هرتز	30 أمبير/متر 50 هرتز/60 هرتز
الترددات اللاسلكية الموصلة IEC 61000-4-6	لا ينطبق	لا ينطبق
إشعاع الترددات اللاسلكية IEC 61000-4-3	10 ف/م 80 ميغا هرتز - 2,7 جيجا هرتز 80% تضمين سعة عند 1 كيلو هرتز	10 ف/م 80 ميغا هرتز - 2,7 جيجا هرتز 80% تضمين سعة عند 1 كيلو هرتز

ملحوظة: UT هو جهد التيار المتردد قبل تطبيق مستوى الاختبار.

الحصانة الكهرومغناطيسية

الإرشادات وإقرار الشركة المصنعة - الحصانة الكهرومغناطيسية						
إشعاعات ترددات الراديو IEC 61000-4-3 (مواصفات الاختبار لحصانة المنافذ المغلقة لمعدات الاتصالات اللاسلكية لترددات الراديو)	تردد الاختبار (ميغا هرتز)	النطاق (ميغا هرتز)	الخدمة	التضمين	مستوى اختبار IEC 60601-1-2 (فولت/متر)	مستوى الامتثال (ف/م)
	385	380-390	TETRA 400	التضمين النبضي 18 هرتز	27	27
	450	430-470	GMRS 460، FRS 460	انحراف FM ±5 كيلوهرتز 1 كيلو هرتز سيئي	28	28
	710 745 780	704-787	نطاق LTE 13,17	التضمين النبضي 217 هرتز	9	9
	810 870 930	800-960	GSM 800/900، TETRA 800، iDEN 820، CDMA 850، النطاق 5 لشبكة LTE	التعديل النبضي 18 هرتز	28	28
	1720 1845 1970	1700-1990	؛GSM 1800 ؛CDMA 1900 ؛GSM 1900 ؛DECT نطاق شبكة LTE 1، 3، 4، ؛25 UMTS	التضمين النبضي 217 هرتز	28	28

28	28	التضمين النبضي 217 هرتز	البلوتوث، WLAN، 802.11 b/g/n، RFID 2450، نطاق LTE 7	2400 - 2570	2450	
----	----	----------------------------	--	-------------------	------	--

الإرشادات وإقرار الشركة المصنعة - الحصانة الكهرومغناطيسية						
إشعاع الترددات اللاسلكية IEC6100 0-4-39 (مواصفات اختبار حماية المنافذ المغلقة من المجالات المغناطيسية القريبة)	تردد الاختبار	التضمين	مستوى اختبار IEC 1-2-60601 (أمبير/متر)	مستوى الامتثال (أمبير/متر)		
	30 كيلوهرتز	CW	8	8		
	134,2 كيلو هرتز	التضمين النبضي 2.1 كيلو هرتز	65	65		
	13,56 ميغا هرتز	التضمين النبضي 50 كيلو هرتز	7.5	7.5		

التخلص:

يجب عدم التخلص من المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى. يجب على المستخدمين القيام بالتخلص من الأجهزة المراد تكهينها بنقلها إلى نقطة التجميع المشار إليها لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية



GIMA امي ج نامض طورش
رهش 12 قدمل GIMA امي ج يساي قلا B2B نامض قب طي

AOJ HEALTH Technology Co., Ltd.
 :
 Room 202, Building 5, Shuhe Industrial Park, Sanwei Community,
 :
 Hangcheng Street, Bao'an District, 518126 Shenzhen,
 :
 PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

نشره: وفادرت حت مسؤولیتنا آن آیهت ج افای:

V1.0.0

لقد وفق معيت شريعات لتزني ذات أمان قلب التواجد ألورهي:

☒ تنويحه معونات لدراسه (53/2014/التحاد الوريه)

كذلك مع أربعين من الحشود ذات الأصول التركية، والتي هي سارية الفروع داخل المنظمة التي تساهم في:

مُطَوِّب مُلَاسِي		أَمْرَار لِمَطْبَق	رَاجِع لِقَاعِد
أَمْرَارَة 3.1 أ)	لِصَحَة	EN 62479:2010 EN 50663:2017	2402Z102690E
	أَلَمَان	EN 62368-1:2014+A11:2017	2402Z102690E-SF
أَمْرَارَة 3.1 ب)	EMC	11-2019 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3: 09-2020 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:	2402Z102690E-02
أَمْرَارَة 3.2	أَمْرَارَة	07-2019 ETSI EN 300 328 V2.2.2:	2402Z102690E-22

تد الفتحاء تمت هذه جوع مجموع الت أخبار أراي و السراية

لجوة الجملعة	رقم الجملعة	الذراع
-	-	مطلوع الفلج المبرود
Shenzhen Honghaosheng Electronics Co., Ltd	14500	المطالعة

الهيئة العامة للغذاء والدواء

لَعْنَةُ حَقِيقَةٍ

عرب و مآلات عربى

لشعبي طبق

تم التوقيع على هذه الاتفاقية في ١١ كانون الثاني ٢٠٠٤

CE

القلم : Jack Wang

العنوان : VP

البريد الإلكتروني : sales@aojmedical.com

اللَّهُمَّ

الضياء : Jack Wang

تاریخ : 05/02/2025