



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

SFIGMOMANOMETRI
SPHYGMOMANOMETERS
TENSIOMETRES
BLUTDRUCKMESSGERÄTE
ESFIGMOMANOMETROS
ESFIGMOMANMETROS
ΣΦΥΓΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΑ
مقاييس ضغط الدم



CM-1621 (GIMA 32704)
CM-3003 (GIMA 32713 - 32714)




Shanghai Caremate Medical Device Co., Ltd.
Building 4, No. 281 HongAn Road, Zhujing Town Jinshan,
201503 Shanghai, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Made in China



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Importato da / Imported by / Importé par / Importiert von
Importado por / Importado por / Εισαγωγή από / مستورد عن طريق
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

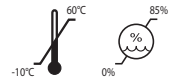

الميزات

نود أن نشكركم على شراء مقياس ضغط الدم GIMA الدقيق. جميع مقاييس ضغط الدم GIMA مصنوعة من مواد عالية الجودة وتضمن إذا ما تمت المحافظة على فعاليتها الممتازة من خلال معايرة الزمنية المنتظمة. موثوقية ودقة كاملة، حتى بعد سنوات. مجموعة مقاييس ضغط الدم المنتجة من طرفنا في واقع الأمر توفر نفس التأديبات النوعية الاعتيادية سواء أن كانت نماذج خاصة بالمهنيين أو نماذج موجهة للاستعمال المنزلي. مقياس ضغط الدم الذي قمت بشرائه مطابق للنظام الاوروبي 93/42/CEE .

الاستعمالات

تجدد الإشارة إلى أن جهاز القياس الذاتي لا ينبغي أن يحل محل زيارات الطبيب المنتظمة، وإنه فقط الطبيب يستطيع أن يحلل نتائج القياس بالضبط.



مقياس ضغط الدم

ضغط الدم الشرياني يتأثر بشكل كبير في الظروف التي يكون موجود بها توتر عصبي أو الارهاق البدني ، لذلك ينصح بالقيام بعملية القياس في ظروف من الراحة سواء العقلية أم الجسمانية، بحيث يكون الجسم في وضع جلوسى أو مستوي ، وإذا كان الأمر ممكنا فالقيام بعملية القياس في نفس الساعة من اليوم ، وبعيدا عن وجبات الطعام. ننصح بعدم التحرك خلال عملية القياس وعدم ارتداء الملابس التي ، بضغطها على الذراع ، من الممكن أن تقيد الدورة الدموية.

يجب ألا يتعرض المرضى لتغيرات درجة الحرارة ، ولا يجب أن ياكلوا أو يديخوا لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل أخذ القياس.

قيمة ضغط الدم تتغير خلال اليوم: تكون منخفضة أكثر في الصباح ومرتفعة أكثر في المساء ، أدنى في فصل الصيف وأعلى في فصل الشتاء.

التوصية هي أنه يجب أن تتقضي 5 دقائق قبل كل قياس.

لا تسمح لكفة ضغط الدم بالبقاء على المريض لأكثر من 10 دقائق عند النفخ فوق 10 مم زئبق. قد يتسبب ذلك في ضيق المريض ، وتعكير صفو الدورة الدموية ، ويساهم في إصابة العصب المحيطي.

عملية التركيب

أول عملية يجب القيام بها بعد فتح التغليف ، هو الفحص العام للقطع والأجزاء المكونة للجهاز ؛ التحقق من أن كافة المكونات الضرورية موجودة وفي حالة ممتازة. وضع لفافة الذراع على الذراع الأيسر العاري 2 3 سم فوق الكوع والمحافظة على الساعد بشكل يكون على مستوى القلب. لفافة ذراع من الفيلكرو: إغلاق لفافة الذراع بواسطة هيئة الإغلاق الخاصة. يجب وضع الكفة بشكل متساوي ومريح ، ولكن ليس بإحكام شديد

إذا لم يتم الذكر بشكل محدد، جميع مقاييس ضغط الدم مزودة بلفافات أذرعة خاصة للبالغين ، ويمكن بموجب الطلب الحصول على لفافات أذرعة خاصة في الاشخاص المهاتين من السمنة المفرطة، لفافات فخذية ولفافات أذرعة خاصة بالأطفال، من الصغار جدا وحتى جيل 14 سنة.

الفعالية

(1) بعد وضع الكفة ، استخدم المصباح لضخ ما يصل إلى 30 مم زئبق فوق مستوى الضغط الانقباضي الفردي: بمعنى آخر ، حتى يتم سد الشريان العضدي (المستوى الأقصى). من المهم جدا ان يكون الشخص الخاضع لعملية القياس جالسا. هادنا ومرتاح ، وأن يكون الساعد موجود على مستوى القلب مع الجهة الداخلية موجهة إلى الأعلى. (2) للتمكن من القيام بعملية قياس ضغط الدم، إدارة برغي التنفيس على الكمثرى وفكه ببطء باتجاه معاكس لاتجاه عقارب الساعة.

القيمة المثالية للتنفيس يجب أن تكون نحو 2 4 مم زئبقي / ثانية.

رقابة مرئية لسرعة التنفيس : المؤشر يدبج أن يتحرك على السلم في نطاق وسرعة من I إلى 5، I درجة في الثانية الواحدة في النماذج العاملة مع التنفيس التلقائي موجود صمام التنفيس على براءةتحمل شهادة اختراع التي تنظم تلقائيا سرعة التنفيس إلى 2 3 مم زئبقي / ثانية. الضغط بساطة على الصمام حتى الوصول إلى درجة الضغط الأولى.

(3) نتيجة لإزالة الضغط تدريجيا يعود الدم للتدفق مرة أخرى في الشريان العضدي. مسببا نبضة أولى والتي يتم سماعها بوضوح عن طريق سماعة مقياس دقات القلب: الضغط المشار إليه بواسطة الابرة على جهاز قياس الضغط في اللحظة التي يتم سماع النبضة الأولى بها يتوافق مع الضغط "الانقباضي أو الضغط الأقصى".

الانقباض = أقصى قيمة من الضغط الانقباضي الذي يحدث عندما ينبض القلب ويتم دفع الدم في الأوعية الدموية.

بالتابعة بتخفيض قيمة الضغط النبضات تستمر في الانخفاض حتى تختفي فجأة أو تنخفض بشكل تصبح به غير قابلة للسمعان.

الضغط المشار إليه من الإبرة على جهاز قياس ضغط الدم وقت اختفاء النبض يتوافق مع "الضغط الانبساطي أو الضغط الأدنى".

الانبساط = أدنى قيمة للضغط الدموي ، ويكون موجود عندما تكون عضلة القلب في مرحلة الانبساط وتعود تمتلئ بالدم.

(4) الآن فتح صمام التنفيس تماما بحيث يخرج الهواء فوراً من لفافة الذراع.

قياس ضغط الدم قد اكتملت الآن.

للخلع ، اسحب الطرف الفضفاص من الكفة بحركة سلسلة.

تحديد

نطاق مؤشر الضغط: 0-300 مم زئبق

نطاق قياس الكفة: 0-300 مم زئبق

الدقة: ≥ 3 مم زئبق أو $\pm 2\%$ أيهما أكبر

الحد الأدنى لقيمة المقياس: 2 مم زئبق

بيئة التشغيل: + 10 درجة مئوية إلى + 40 درجة مئوية ،

15% - 85% رطوبة نسبية

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار بسبب التحسينات في الأداء.

التنظيف والتخزين والصيانة

تنظيف

يمكن مسح المقياس والمصباح والصمام بقطعة قماش مبللة قليلاً أو وسادة كحولية. يمكن مسح الكفة بقطعة قماش مبللة قليلاً ، أو غسلها يدوياً بمنظف معتدل ومحلول مائي (محلول 1: 9) ؛ في الحالة الثانية ، اشطفه واتركه يجف في الهواء. لا تضغط أو تكوي الكفة بمكواة ساخنة لأن استخدام الحرارة سيذيب الخطاف والحلقة ويدمر فعاليتها ، يرجى ملاحظة:

- لا تسمح للسوائل بالدخول إلى مكونات مقياس ضغط الدم.

- يوصى بالتنظيف شهرياً ولكن الظروف التالية قد تتطلب زيادة في التكرار:

- قبل وبعد استخدام مرضى مختلفين ؛

- عندما يكون المنتج متسخاً

- نسبة عالية من الأمراض المعدية

- ملامسة الجلد عند وجود سائل ، مثل الدم والأدوية والعرق.

التخزين والصيانة

قم دائماً بتفريغ الحزام تماماً قبل التخزين ؛ يجب أن تشير الإبرة إلى الصفر عندما تكون الكفة سليمة تماماً

- قم بطي الحزام بخطاف وإغلاق حلقة بالداخل لحمايته من الغبار أو الوبر








- تخزين المنتج في درجات حرارة تتراوح بين -10 درجة مئوية و 60 درجة مئوية ورطوبة نسبية لا تزيد عن 85 درجة مئوية






- لا تقم بالإصلاح الذاتي أو التحويل

- لا تسقط أو تسحب بشكل مفرط مكونات مقياس ضغط الدم.

شروط ضمان جيمنا GIMA

يُطبق ضمان B2B القياسي جيمنا GIMA لمدة 12 شهر.

	<p>IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB Caution: read instructions (warnings) carefully FR Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) DE Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen ES Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente PT Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente GR Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενστάσεις)</p> <p style="text-align: right;">SA الحذر: قراءة التعليمات (التحذيرات) بعناية</p>
	<p>IT Conservare in luogo fresco ed asciutto GB Keep in a cool, dry place FR À conserver dans un endroit frais et sec DE An einem kühlen und trockenen Ort lagern ES Conservar en un lugar fresco y seco PT Armazenar em local fresco e seco GR Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον</p> <p style="text-align: right;">SA يحفظ في مكان بارد وجاف</p>
	<p>IT Fabbricante GB Manufacturer FR Fabricant DE Hersteller ES Fabricante PT Fabricante GR Παραγωγός</p> <p style="text-align: right;">SA الشركة المصنعة</p>
	<p>IT Dispositivo medico conforme alla Direttiva 93/42/CEE GB Medical Device complies with Directive 93/42/EEC FR Dispositif médical conforme à la directive 93/42 / CEE DE Medizinprodukt gemäß Richtlinie 93/42/CEE ES Dispositivo médico según a la Directiva 93/42 / CEE PT Dispositivo médico em conformidade com a Diretiva 93/42/CEE GR Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την οδηγία 93/42 / CEE</p> <p style="text-align: right;">SA جهاز طبي يتوافق مع التوجيه 93/42/CEE</p>
	<p>IT Codice prodotto GB Product code FR Code produit DE Erzeugniscode ES Código producto PT Código produto GR Κωδικός προϊόντος</p> <p style="text-align: right;">SA كود المنتج</p>
	<p>IT Conservare al riparo dalla luce solare GB Keep away from sunlight FR À conserver à l'abri de la lumière du soleil DE Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern ES Conservar al amparo de la luz solar PT Guardar ao abrigo da luz solar GR Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία</p> <p style="text-align: right;">SA يحفظ بعيداً عن ضوء الشمس</p>
	<p>IT Leggere le istruzioni per l'uso GB Consult instructions for use FR Consulter les instructions d'utilisation DE Gebrauchsanweisung beachten ES Consultar las instrucciones de uso PT Consulte as instruções de uso GR Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης</p> <p style="text-align: right;">SA اقرأ بدقة وحرص تعليمات الاستخدام</p>

	<p>IT Numero di lotto GB Lot number FR Numéro de lot DE Chargennummer ES Número de lote PT Número de lote GR Αριθμός παρτίδας</p> <p style="text-align: right;">SA رقم الدفعة</p>
	<p>IT Rappresentante autorizzato nella Comunità europea GB Authorized representative in the European community FR Représentant autorisé dans la Communauté européenne DE Autorisierter Vertreter in der EG ES Representante autorizado en la Comunidad Europea PT Representante autorizado na União Europeia GR Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση</p> <p style="text-align: right;">SA ممثل معتمد في الاتحاد الأوروبي</p>
	<p>IT Limite di temperatura GB Temperature limit FR Limite de température DE Temperaturgrenzwert ES Límite de temperatura PT Limite de temperatura GR Όριο θερμοκρασίας</p> <p style="text-align: right;">SA حد درجة الحرارة</p>
	<p>IT Limite di umidità GB Humidity limit FR Limite d'humidité DE Feuchtigkeitsgrenzwert ES Límite de humedad PT Limite de humidade GR Όριο υγρασίας</p> <p style="text-align: right;">SA حد نسبة الرطوبة</p>
	<p>IT Latex free GB Latex free FR Sans latex DE Ohne Latex ES Sin látex PT Isento de látex GR Χωρίς λάτεξ</p> <p style="text-align: right;">SA طاظملا نم يعيبط طاظم دوجو وأ يلغ يوتحي</p>