



# GIMA

**GUIDA RAPIDA DI PRONTO SOCCORSO  
PALLONE RIANIMATORE PORTATILE**

***PORTABLE RESUSCITATOR BAG  
FIRST AID BASIC GUIDE***

**BALLON DE RÉANIMATION PORTATIF  
GUIDE RAPIDE DE PREMIER SECOURS**

***BALÓN REANIMADOR PORTÁTIL  
GUÍA RÁPIDA DE URGENCIAS***

**BALÃO DE REANIMAÇÃO PORTÁVEL  
GUIA RÁPIDA DE PRONTO SOCORRO**

***ΦΟΡΗΤΟ ΜΠΑΛΟΝΙ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ  
Γρήγορος οδηγός πρώτων βοηθειών***

**كرة مطاطية منعشة سهلة النقل  
دليل سريع للإسعاف الأولي**

**GIMA Spa - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italia**

**ITALIA: Tel. 199 400 401 (8 linee r.a.) - Fax 199 400 403**


**E-mail: [gima@gimaitaly.com](mailto:gima@gimaitaly.com) - [www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)**

**INTERNATIONAL: Tel. ++39 02 953854209 - Fax ++39 02 95380056**

**E-mail: [export@gimaitaly.com](mailto:export@gimaitaly.com) - [www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)**


## كرة مطاطية منعشة سهلة النقل دليل سريع للإسعاف الأولي

١. التأكد من كون المريض بعيد عن مصادر خطيرة مثل: الحخان، الماء، الغاز، البخار، الأسلاك الكهربائية الموصولة بالتيار، وإلخ.

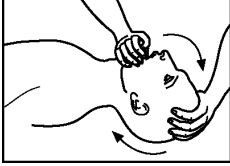


٢. التأكد من أن المسارات التنفسية غير مسددة. في حالة تواجد أجسام غريبة مثل الماء، اللعاب، القيام بتحريرها أولاً باستعمال مخروط خاص لفتح الفم، إذا كان متوفراً، ووضعه بين أسنان المريض لمحايدة الجروح على الأصابع.


٣. وضع رأس المريض إلى الوراء بدفع الفك تجاه الأعلى لمد العنق والتمكن من فتح المسارات التنفسية.

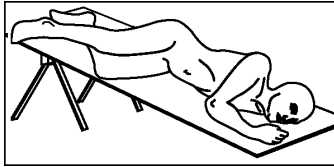


٤. فحص إذا ما كان المريض يتنفس وإذا كان لون البشرة يعود إلى اللون الطبيعي. في حالة وجود التنفس ولون طبيعي، إدارته على المعدة (أو على بطنه) بموضع "الغيبوبة" بشكل تكون الأرجل تجاه الأعلى (على سطح مائل أو بوضع الأرجل على شيء ما) والرأس تجاه الأسفل. القيام بطلب حضور طبيب أو سيارة إسعاف أولي.

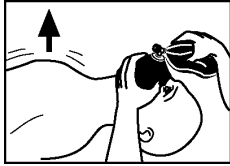


في حالة أن عملية التنفس لا تعود لفاعليتها عشوائياً، تخلوا بممارس عملية التنفس الإصطناعية دون انقطاع حتى يتمكن المريض من التنفس لوحده أو حتى يصل الطبيب.

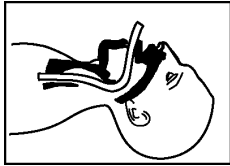

٥. التنفس الإصطناعي بمساعدة الكرة المطاطية Gima  
ضغط الكمامة على وجه المريض وتغطية الفم والأنف بها. الاهتمام بأن يكون الرأس مقلوب إلى الوراء وبمساعدة اليد التي تمسك بالكمامة دفع الفك إلى الأمام. الضغط على الكرة المطاطية كاملاً والتأكد من أن الصدر يتسع. المحافظة على المسارات التنفسية مفتوحة بإمكانكم استعمال الأنايب الطبية الصغيرة المزودة بوضعها تحت الكمامة. الحذر من أن لا يقوم اللسان بتسييد الحلق، في حالة التسد فاستعمال الملقط الخاص لسحب اللسان إلى الخارج.

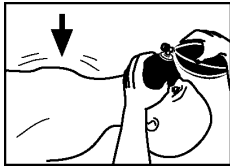

٦. تخفيف الضغط على الكرة المطاطية فوراً وانتظار تفريغ الصدر. إعادة العملية ١٠-٢٠ مرة بالدقيقة. إذا توفر لديك الأكسجين، فإدخاله عبر الموصل الخاص بكمية لا تزيد عن ٢-٤ لتر بالدقيقة. فحص وجود النبض على عنق المريض.

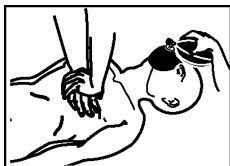

٧. في حالة توقف القلب، يتوجب القيام بالضغط الخارجي على القلب. بوضع كلتا اليدين على الصدر بمحاذاة مستوى القلب، الضغط بقوة لعدد ٦٠-٧٠ مرة بالدقيقة. خلال الضغط يجب فحص النبض على العنق. الحذر: في حالة أن المريض هو طفل، يجب الضغط بقوة منخفضة وببيد واحدة. كل ٥-٨ دفعات القيام بث تنفس اصطناعي. المتابعة بالضغط حتى يكون النبض على العنق محسوس بوضوح وبكل حال بالأقل لمدة ساعة. أيضاً بعد أن يعود القلب لعملية النبض قد تكون هنالك الحاجة للتنفس الإصطناعي لمدة معتبرة.