



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

LACCI EMOSTATICI MONOUSO
DISPOSABLE TOURNIQUETS
GARROTS JETABLES
TORNIQUETES DESECHABLES
GARROTES DESCARTÁVEIS
EINWEG-STAU BINDE
JEDNORAZOWE OPASKI UCISKOWE
STASSLANGAR FÖR ENGÅNGSBRUK
ΤΟΥΡΝΙΚΕ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
EGYSZER HASZNÁLATOS ÉRSZORÍTÓK
ÛHEKORDSED ŽGUTID
TOURNIQUETS VOOR EENMALIG GEBRUIK
ÛHEKORDSED ŽGUTID

دحواولا لامعتسائل تابصاع

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede - All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located - Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social - Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado - É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós - Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden- Należy poinformować producenta i kompetentne władze danego Kraju członkowskiego o każdym poważnym wypadku związanym z wyrobem medycznym naszej produkcji - Det är nödvändigt att meddela tillverkaren och de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten, om alla allvarliga olyckor som inträffat i samband med den medicintekniska utrustning som levererats av oss - Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται- Potrebno je prijaviti svaku ozbiljnu nezgodu koja se dogodila u vezi s isporučenim medicinskim proizvoduću i nadležnom tijelu države članice u kojoj se nalazi- Peate teatama kõigist meie tarnitud meditsiiniseadmega seotud tõsisest vahetuhtumistest tootjale ja teie asukohaliikmesriigi pädevale asutusele - Alle ernstige ongelukken die zich in verband met het door ons geleverde medische hulpmiddel voordoen, moeten gemeld worden aan de fabrikant en aan de bevoegde instantie van de lidstaat waar u gevestigd bent - Orice accident grav produs, privitor la dispozitivul medical fabricat de firma noastră, trebuie semnalat producătorului și autorității competente in statul membru pe teritoriul căruia își are sediul utilizatorul - مصرتجبنا تظلمنا و عناصرا لةجلا ىلا ب انوز ىذلا ىبظلا زامجلاب ول عنتى امىف عؤو رىطخ شداح یا نع اروف عالبال بىجى - امىف عؤى ىتلا وضر علما طودلا ىف ىف

REF JS-TQ001 (GIMA 37510-37511-37512)



Ningbo Jenius Polymer Sci-Tech Co. Ltd
 N° 2112, Ningheng South Road, Hengxi Town, Yinzhou District,
 Ningbo, Zhejiang, China (Mainland)
 Made In China



MedNet GmbH Borkstrasse 10,
 48163 Münster, Germany



Gima S.p.A.
 Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
 gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com





مهم*0.635م*25م*450م ساقملا، JS-TQ001 زارملا

تويكي يتسابلل رمي لوبلا نئادل نم عون صم جتنملا اذه نم ،نولم و ا بييلح ضيبا نول تاذ ،تويبملا تيرارحلا ،ليوطلا حطسمل اعونلا
 وهو ،قودنصل ا تيبعتل تديجلا ميمصتلا فقطن مدختست
 فرمتسم قفصصب هجارخا نكفسيو نرم
 تجملا عملا لجا نم تويبملا نكفسيو مل بسانم جتنملا اذه
 مادختستال او مدلا لقنو بييرستلاب تجملا عملا او تين تيورلا
 تدمحاو قمرل فيزنلا فتقول
 و ا مسجلا نم فيزنلا تلحح يف تروطلا بي فيزنلا فاقوي
 تارشحلا و لقا ن ا ب ت ع غ ل ة ج ي ت ن فيزنلا

تاريختلا ،هابتنال اي عدتست روم ،لام عتستال اعنوم :تاهي بن تمل او

1. فعال ت ا ب ج ي و د ح و ل ا لام عتستال ص ص خ جتنملا اذه
 :مادختستال ادعب
2. امادختستال اعطق رطحي ،تفلات توبعلا تنك اذا
3. لجا نم طفشلا اطغ تيطغت ي جري ،مادختستال ادعب
 :تيريكتفيل شول تمل و رابغلا بنجت
4. تيبعتلا قودنص بناج يل ع حضورم جاتنالا خيرات
 :تلي هاتلا تدماش يل ع و ا

:تاهي بن تو تاريخت

تدمل اطبر نكلو ،مدلا قفدت تبصاعلا فقوت نا نكفي
 ،تريط لكشيب تيسنالا فلت ل ا ي دوي نا نكفي تليوط
 فرطلا رخن ل ا ل ذلك ي دوي دو
 سيلو طوق فارطال طبر يف تبصاعلا مدختست نا بجي
 عذملا و ا تبقورلا و ا سارلا
 قطوبملا تبصاعلا ي طغت الو ،رخا عيش يا ب امطغت ال
 فرطلاب

،مي تجملا يف مدرفمب ضيرملا كرت ترورضلا تدمتست اذا
 تيقوت ،هافش رمح و ا ملق قسطاوب ،هاسر قوف بتكاف
 .مقطلا عضومو طبرلا

:تويوملا قودنل ص ح ف

عبصا و ا مدقلا عبصا ص ح ف بجي ،تبصاعلا طبر دعب
 تيناو ج ا ع ق ب د و ج د ع نم لكاتلل ارارمو اراركت ديلا
 تجرد ضافخنا مدع نم لكاتلل ،تبصاعلا تاهان يف قنكاد
 .تبصاعلا تاهان يف مسجلا قرارح
 طيرش طبر ا خرا بجي ،قراظلا هذه لثم دوج تلاح يف
 تدمل دوجو دنع ،تيسنالا رخن ببسي ال او ،شامقلا
 .تل يوط

طبر لجا نم تبصاع مادختست اي غ بني ال ،ببسال سفنل
 ل ا ل ذ ترورضلا تدمتست اذا ل ا ،تل يوط تارتغل فارطال دح
 .ني يارشللا طبر ا ن ش ا

اعويبتم ،الوا رشابملا طغضلا تبيرجت بجي ،ماع هجوب
 رشابملا طغضلا يل ع ظلفحلا متي يتح طغضلا طاقنب
 .حرجلا يل ع
 .هعفر ،فرطلا تاهان يف حرجلا نك اذا

:ني زختلا طورش

ال تيبسن تيوطر يف ا ب عمل تبصاعلا ني زخت اي غ بني
 لكاتلل تببسملا تازاغلا نم لا خ نكفم يف ،80% زواجتت
 تيوهنتلا دي جو
 جاتنالا خيرات نم تاو نس 3 تدمل تجملا تبصاعلا
 لقا ن لا و ني زختلا فورظب مازتلا دنع

	فاجو دراب نكفم يف ظفحي
	ةعنصملا لكشلا
	ةعندلا مقر
	هي جوتلا عم قفاوتي يبط زاغ 2017/745 (UE)
	يبط زاغ
	سمشلا عوض نع ادي عب ظفحي
	عينصتلا خيرات
	جتنملا دوگ
	مادختستال تاميلجت صرحو قودب ارقا
	يبوروالا داحتالاي يف دمت عم لشمم
	ديدج نم مدختست ال ،مادختستالا تيدجا قادا
	تويح الصرلا هامت خيرات
	قيرط نع دروتسم

GIMA اميج نامض طورش

رشد 12 تدمل GIMA اميج يساي قلا B2B نامض قبطي