

أقرا كافة التعليمات قبل الاستخدام. استشر الطبيب قبل الاستخدام.

يغاون من حساسية اللاتكس. لا تعرض الحبل المطاطي للقطع أو التآكل أو التلف. توقف عن الاستخدام. لا تقم بتمديد الحبل أكثر مما هو مطلوب لتفكيك أو تجميع الأجزاء. لضبط ارتفاع العكاز، قم بلف قفل الأنواء عن طريق تدويره في اتجاه عقارب الساعة لعدة دورات. اضغط على زر القفل، واسحب المقبض لأعلى لزيادة الطول، أو اضغط لأسفل على المقبض لتقصيره. تذكر أن تعيد ربط قفل الأنواء بعد ضبط العكاز إلى الارتفاع المطلوب. تحذير: لتجنب السقوط، تأكد دائمًا من تثبيت أجزاء العمود الفردية في مكانها بشكل آمن وثابتين مؤخرة القفل بالكامل. تأكد دائمًا من تثبيت قدم التاراجح بالعكاز بشكل آمن على العكاز لتجنب السقوط.

لطي العكاز: يمكن طي عكازك بسهولة إلى حجم سفر مناسب من خلال فصل أجزاء العمود الأربعة الفردية عن بعضها البعض. امسك كل مجموعة من أجزاء العمود بالقرب من المفصل ثم افصلها عن بعضها. سيتم طي أجزاء العمود الفردية معًا بشكل أنيق لاستخدام الأضواء على عكازك. يتم تنشيط الأضواء عن طريق الضغط على الزر الموجود أعلى مقبض العكاز. الضغط على الزر مرة واحدة سوف يؤدي إلى تنشيط الضوء الموجود أمام العكاز. الضغط عليه مرة أخرى سوف يؤدي إلى تشغيل الضوء الأحمر الموجود في قاعدة المقبض أيضًا. الضغط عليه للمرة الثالثة سوف يؤدي إلى إيقاف تشغيله. يمكن تدوير الضوء الأمامي لتوجيهه إلى المكان الذي تحتاجه.

إشارة الاستغاثة: لتنشيط إشارة الاستغاثة، اضغط على الزر الموجود على جانب المقبض، وسوف يومض الضوء الموجود في القاعدة، وسوف يصدر العكاز صوت إنذار. استبدال البطاريات: افتح حجرة البطارية الموجودة في الجزء الخلفي من المقبض. قم بإزالة أي بطاريات فارغة، وتخلص منها بشكل صحيح. باستخدام بطاريات AAA، أدخلهما بالمقطبي الصحيحة (القطب الموجب للخارج حيث يوجد الزنبرك). أغلق غطاء حجرة البطارية. قم بفحص العكاز بانتظام بحثًا عن علامات التآكل، بما في ذلك أي تآكل في الحبل المطاطي أو التآكل في الأقدام المقاطعية. إذا لاحظت أي علامات تآكل، توقف عن الاستخدام على الفور.

تحذير: لا تخلط البطاريات القديمة والجديدة. لا تخلط البطاريات القلوية أو القياسية (الكربون والزنك) أو القابلة لإعادة الشحن (النيكل والكادميوم).

شروط ضمان GIMA: ينطبق ضمان GIMA القياسي بين الشركات لمدة 12 شهرًا.

