


يبرع

استخدم التعليمات الخاصة بالدراجة الصغيرة

1. قم بإخراج هيكل الدراجة الصغيرة من الصندوق، ثم تعامل معه بعناية. انظر إلى الصورة 1.
2. ضع هيكل الدراجة الصغيرة على الأرض بنفس المستوى، ثم ضع برغي المقبض "أ" عليه كما هو موضح في الصورة. انظر إلى الصورة 2.
3. قم بتدوير برغي المقبض "ب" بحيث يضغط المحور "ب" بشكل صحيح. (باتجاه اليسار لزيادة الضغط، وإلا قم بتقليل الضغط)، ثم قم بتشغيل زر الآلة الحاسبة "ج"، وقم بتدوير المحور "ب"، وسوف تبتدأ في الاستخدام على الفور. انظر إلى الصورة 3. (راجع تعليمات الآلة الحاسبة للحصول على التفاصيل).
4. اسحب الخابور 0 نحو الداخل بعد الاستخدام، وقم بطييه جيداً كما هو الحال في الصورة 5.
5. ملاحظة:

- (1) افحصه، وتأكد من وضعه بثبات وفي نفس المستوى قبل الاستخدام؛
- (2) لا تنس أن تجعل الضغط عند الحد الأدنى عند البدء في الاستخدام، ثم قم بزيادته حتى يصل إلى ما يحتاجه؛
- (3) الأشخاص المعنيون: الكبار، الأطفال، كبار السن؛

تحذير: من فضلك لا تحاول الوقوف على الدراجة الصغيرة، فهذا من شأنه أن يؤدي إلى إتلاف الجهاز.

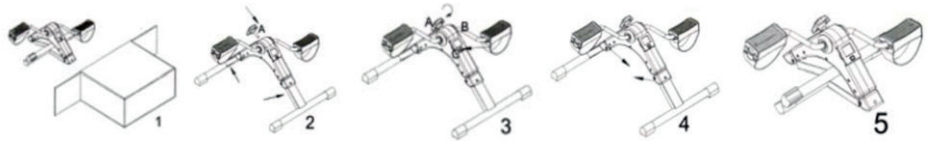

دليل تعليمات الكمبيوتر للتمرين

SPECIFICATIONS:

الوقت 00:59:59
العداد 0-9999
التكرار/دقيقة 0-9999
السعرات الحرارية 0-9999KAL


الوظيفة الرئيسية:

الوضع: يتيح لك هذا المفتاح تحديد وظيفة معينة تريدها، وقفلها، ثم الضغط باستمرار على المفتاح لمدة 4 ثوانٍ لإعادة تعيين جميع قيم الوظيفة.


إجراءات التشغيل:

الوقت "العداد" بالضغط على مفتاح "الوضع" حتى يشير " < " إلى الوقت. عندما يكون لدى مستشعر السرعة أي إشارة إدخال، فإنه يبدأ العد، ويترك العد أوتوماتيكياً أثناء التمرين بعد بدئه. COUNT لعداد "عندما تشير " < " إلى COUNT "العداد"، سيعرض الكمبيوتر الخطوات. عندما يكون لدى مستشعر السرعة أي إشارة إدخال، فإنه يبدأ العد ويجمع أوتوماتيكياً عدد التمارين منذ بدئها. REPS/MIN التكرار/الدقائق "من خلال الضغط على مفتاح "الوضع" حتى يشير " > " إلى REPS/MIN التكرار/الدقائق"، وعندما يكون لدى مستشعر السرعة أي إشارة إدخال، فإنه يبدأ العد، ويجمع أوتوماتيكياً عدد التمارين منذ بدئها. CALORIE B السعرات الحرارية "بالضغط على مفتاح "الوضع" حتى يشير " < " إلى CAL "السعرات الحرارية". عندما يتلقى مستشعر السرعة أي إشارة إدخال، فإنه يبدأ العد، ويجمع السعرات الحرارية الناتجة عن التمرين أوتوماتيكياً منذ بدء التمرين. SCAN مسح ضوئي "عندما يشير " < " إلى SCAN مسح ضوئي "سيعرض الكمبيوتر أوتوماتيكياً الوظائف التالية بالترتيب الموضح: TIME "الوقت"-----COUNT "العداد"-----STRIDES "الخطوات"-----CALORIES "السعرات الحرارية" ملاحظة: 1. مواصفات البطارية: 1.5 فولت، LR44 (قطعة واحدة) 2. إذا كان العرض على الشاشة غير صحيح، فيرجى إعادة تثبيت البطاريات. 3. إجراء تركيب البطارية:


Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante
Hersteller / Producent / Producător / Gyártó / Παράγωγός:
ZHEJIANG TODO HARDWARE MANUFACTURE CO., LTD
No.31th Floor, Jinmao Building, CBD Centre,
Yongkang, Zhejiang, China
Made in China

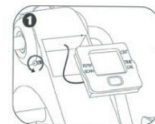


قم بتركيب البطارية في حجرة البطارية الموجودة على جانب وحدة الشاشة، ثم قم بإغلاق حجرة الشاشة بعناية من أعلى.

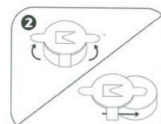

في الجزء الخلفي من وحدة الشاشة، لغم البسة البطارية ثم اسحب البطارية بعناية.

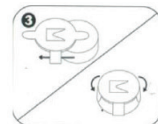

قم بإدخال بطارية AG13 جديدة بقوة 1.5 فولت، بحيث يكون الجانب الموجب (اليمين) متوافقاً مع البطارية.

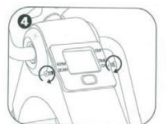

أدب وحدة الشاشة إلى مكانها وبها بالمتساو.

REF TD001P-3

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado por / Eingeführt von / Importowane przez / Importat de / Importálta / Εισαγόμενα από:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

GIMA 43151

GIMA ام جي نامض طورش
رهش 12 كدمل GIMA ام جي جيسا يقيال B2B نامض قبطي