

**MASCHERINA CHIRURGICA LAVABILE  
DI TIPO II AD USO MEDICALE**

**TYPE II WASHABLE SURGICAL MASK  
FOR MEDICAL USE**

**MASQUE CHIRURGICAL LAVABLE  
DE TYPE II À USAGE MÉDICAL**

**TYP II WASCHBARE CHIRURGISCHE MASKE  
FÜR MEDIZINISCHE ANWENDUNGEN**

**MASCARILLA FACIAL QUIRÚRGICA  
DE TIPO II LAVABLE PARA USO MÉDICO**

**MÁSCARA CIRÚRGICA LAVÁVEL TIPO II  
PARA USO MÉDICO**

**TYP II TVÁTTBART KIRURGMUNSKYDD MED  
FÖR MEDICINSK ANVÄNDNING**

**ΠΛΕΝΟΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ  
ΤΥΠΟΥ II ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

**MASKA CHIRURGICZNA MEDYCZNA  
MOŻLIWA DO PRANIA TYPU II**

**MASCĂ CHIRURGICALĂ DE UZ MEDICAL,  
DE TIP II, LAVABILĂ**

قناع جراحي قابل للغسيل ومن النوع الثاني  
للاستخدام الطبي


Distribuito da / Distributed by / Distribué par / Vertrieben von  
Distribuido por / Distribuído por / Distribuieras av / Διανέμεται  
από / Rozprowadzana przez / Distribuit de / توزيع :



**REF 20770 / BP2020V3 -JUNIORS**

 MYCROCLEAN ITALIA SRL  
Via Carlo Porta, 14  
20064 Gorgonzola - Italy  
Made in Italy

**LOT** Vedere etichetta / See label / Voir l'étiquette  
Siehe Etikett / Ver la etiqueta / Ver rótulo  
Se etikett / Δείτε ετικέτα / Patrz etykieta  
Consultați eticheta / انظر الملصق

 Vedere etichetta / See label / Voir l'étiquette  
Siehe Etikett / Ver la etiqueta / Ver rótulo  
Se etikett / Δείτε ετικέτα / Patrz etykieta  
Consultați eticheta / انظر الملصق



UNI EN 14683:2019



000001



**JUNIOR**

**IT** - La mascherina deve essere indossata come mostrato nella foto. Parte piccola sul naso, parte grande sotto

**GB** - The mask must be worn as shown in the photo  
Small part on the nose, large part below.

**FR** - Le masque doit être porté de la façon montrée dans la photo : petite partie sur le nez, grande partie en-dessous.

**DE** - Die Maske muss, wie in der Abbildung gezeigt, getragen werden, d.h. der kleinere auf der Nase und der größere Teil unten.

**ES** - La mascarilla se debe colocar tal y como muestra la foto. Parte pequeña en la nariz, parte grande abajo.

**PT** - A máscara deve ser utilizada conforme mostrado na foto. Parte pequena sobre o nariz, parte grande para baixo.

**SE** - Ansiktsmasken ska bäras som fotot visar. Mindre del på näsan, större nedtill.

**GR** - Η μάσκα πρέπει να φοριέται όπως φαίνεται στη φωτογραφία. Το μικρό τμήμα στη μύτη, το μεγάλο τμήμα.

**PL** - Maseczka musi być noszona w sposób pokazany na zdjęciu stronie. Mniejsza część na nosie, większa część pod brodą.

**RO** - Masca trebuie purtată așa cum se observă în fotografia. Partea mai îngustă pe nas, partea mai lată dedesubt.

**SA** - يجب ارتداء القناع كما هو موضح في الصورة على اليمين، الجزء الصغير على الأنف، الجزء الكبير أدناه

SVENSKA

**1 - Produktbeskrivning och avsedd användning**

Tvättbar ansiktsmask i tyg, 99 % polyester och 1 % kolfiber, avsedd till skydd för näsa och mun.

**2 - Klassificering**

Ansiktsmaskerna av serie BP2020V3 är klassificerade som Typ II enligt standard UNI EN 14683:2019.

**3 - Egenskaper**

Anordningen, som består av ett skikt kan tvättas i tvättmaskinen i upp till 60 °C (tyget håller i 150 °C) den är inte steril  
**PFE-värden: Filtrering av partiklar (%) 0,3 pm 0,5 pm vid 95%**

Tyget resulterat **EJ CYTOTOXISKT**, av test som utförts på fibroblaster i enlighet med standard UNI EN ISO 10993-5.

**BFE-filtrering**

BFE = 99,8 % (enligt laboratorietester som utförts i enlighet med standard UNI EN 14683:2019)

**Biologisk belastning**

UFC < 30 UFC (från laboratorietester som utförts i enlighet med standard UNI EN 14683:2019) **Luftpermeans (cm<sup>2</sup>/cm<sup>3</sup>/sek) ASTM E96** (Känd som ISO - 11092 eller Ret- eller Hohenstein-test)

Resultatet som erhållits på ansiktsmasker av serie BP2020 är 7,5, därför bra eller mycket välventilerade

**4 - Användningssätt och anvisningar**

Arbeta med rena och sanerade händer, så att ansiktsmasken fäster väl i ansiktet, i rätt position, det vill säga med den mindre delen mot näsan och den större mot mun och haka. **ÄNDRA INTE ANSIKTSMASKEN, SKÅR INTE AV GUMMIBANDEN, BÄR DEN PÅ RÄTA SIDAN** (som bilden visar)

**I annat fall förlorar ansiktsmasken sin skyddsfunktion.**



**5 - Tvätt**

Tvätta för hand eller i tvättmaskinen, med tvättmedel och upp till 60°C. **ANVÄND INTE BLEKMEDEL**

Om anvisningarna för användning och skötsel följs, håller produkten sina fysiska och tekniska egenskaper ända till cirka 500 tvättar.

**6 - Avyttring**

Ansiktsmasken ska avyttras som fast hushållsavfall (om den inte förorenats, i annat fall ska den avyttras som "särskilt avfall"). Den yttre påsen avyttras som plast.

 REF	Produktkod	 LOT	Satsnummer
	Tillverkare		Tillverkningsdatum
	Ej steril		Läs bruksanvisningen
	Den medicinska anordningen överensstämmer med direktivet 93/42 / EG		