



SVENSKA

**1 - Produktbeskrivning och avsedd användning**

Tvättbar ansiktsmask i tyg, 99 % polyester och 1 % kolfiber, avsedd till skydd för näsa och mun.

**2 - Klassificering**

Ansiktsmaskerna av serie BP2020V3 är klassificerade som Typ II enligt standard UNI EN 14683:2019.

**3 - Egenskaper**

Anordningen, som består av ett skikt kan tvättas i tvättmaskinen i upp till 60 °C (tyget håller i 150 °C) den är inte steril  
**PFE-värden: Filtrering av partiklar (%) 0,3 pm 0,5 pm vid 95%**

Tyget resulterat **EJ CYTOTOXISKT**, av test som utförts på fibroblaster i enlighet med standard UNI EN ISO 10993-5.

**BFE-filtrering**

BFE = 99,8 % (enligt laboratorietester som utförts i enlighet med standard UNI EN 14683:2019)

**Biologisk belastning**

UFC < 30 UFC (från laboratorietester som utförts i enlighet med standard UNI EN 14683:2019) **Luftpermeans (cm<sup>2</sup>/cm<sup>3</sup>/sek) ASTM E96** (Känd som ISO - 11092 eller Ret- eller Hohenstein-test)

Resultatet som erhållits på ansiktsmasker av serie BP2020 är 7,5, därför bra eller mycket välventilerade

**4 - Användningssätt och anvisningar**

Arbeta med rena och sanerade händer, så att ansiktsmasken fäster väl i ansiktet, i rätt position, det vill säga med den mindre delen mot näsan och den större mot mun och haka. **ÄNDRA INTE ANSIKTSMASKEN, SKÅR INTE AV GUMMIBANDEN, BÄR DEN PÅ RÄTA SIDAN** (som bilden visar)

**I annat fall förlorar ansiktsmasken sin skyddsfunktion.**

**5 - Tvätt**

Tvätta för hand eller i tvättmaskinen, med tvättmedel och upp till 60°C. **ANVÄND INTE BLEKMEDEL**

Om anvisningarna för användning och skötsel följs, håller produkten sina fysiska och tekniska egenskaper ända till cirka 500 tvättar.

**6 - Avyttring**

Ansiktsmasken ska avyttras som fast hushållsavfall (om den inte förorenats, i annat fall ska den avyttras som "särskilt avfall"). Den yttre påsen avyttras som plast.

|   |   |   |                      |
|---|---|---|----------------------|
|  REF | Produktkod  |  LOT | Satsnummer           |
|      | Tillverkare   |      | Tillverkningsdatum   |
|      | Ej steril   |      | Läs bruksanvisningen |
|      | Den medicinska anordningen överensstämmer med direktivet 93/42 / EG |   |                      |