


STÖVELÖVERDRAG - Typ PB6B

STÖVELÖVERDRAG - Typ PB6B med halksäker sula

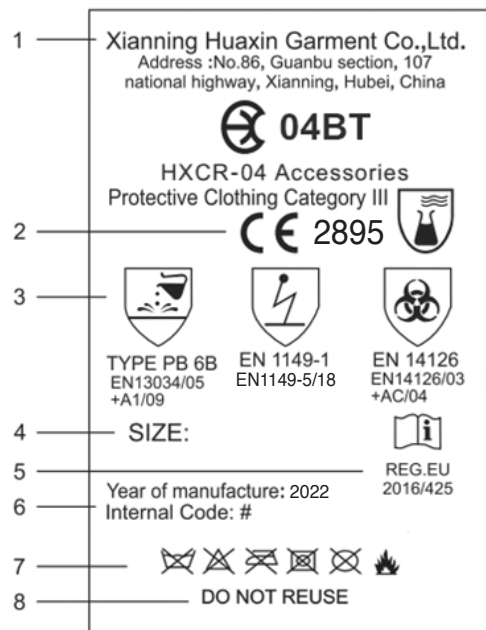

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

(PRODUKTKOD: 04BT)

Märkning:

Tillbehör bestående av:

04HD Huva; 04BT Stövlar; 04sc Skoskydd; 04LB Labbrock; 04SL Armskydd; 04AP Förkläde.

Tillbehören identifieras av en invändig etikett. Denna indikerar typen av skydd som erbjuds samt andra uppgifter.

1. Tillverkarens namn.

2. CE-märkning – Tillbehören uppfyller kraven för kategori III personlig skyddsutrustning i enlighet med FÖRORDNING (EU) 2016/425. Testning av prototypen och efterföljande CE-registrering utfördes av Shirley® Certification Services (det anmälda organets identifieringsnummer 2895).

3. Tillbehörens "skyddstyper" som uppfyllts av Xianning Huaxin Garment Co., Ltd. definierades av de europeiska standarderna för tillbehör: Typ PB 6B: EN 13034:2005. Tillbehören har testats mot biologiska (EN14126:2003) och statiska faror (EN1149-5:2018) och måste användas med kompatibla

tillbehör och mot kompatibla partiklar för att vara effektiva.

4. Storlek: varje tillbehör har en storlek.

5. Användaren måste läsa dessa användarinstruktioner.

6. Tillverkningsår

7. Internationella skötselsymboler: Tvätta, stryk, kemtvätta eller blek ej. Undvik öppna lågor och hög värme.

8. Endast lämplig för engångsbruk. Återanvänd ej.

PRESTANDATABELL

Materialets fysiska egenskaper		Klass
Nötningshårdighet	EN 530 Met.2	Klass 1
Motstånd mot skada vid böjning	ISO 7854 B	Klass 4
Rivhållfasthet vid trappsteg MD	ISO 9073-4	Klass 2
	CD	Klass 2
Motstånd mot punktering	EN863	Klass 1
Draghållfasthet MD	ISO 13934-1	Klass 1
	CD	Klass 1
Resistens mot smittsamma ämnen (fasta partiklar)	ISO 22612	Klass 3
Skydd mot antändning	EN 13274-4	Godkänd
Materialets kemiska egenskaper	Penetrering	Avstötning
Testmetod		
Skydd mot kemikalier	EN ISO 6530	
Svavelsyra 30 %	Klass 3	Klass 3
Natriumhydroxid 10 %	Klass 3	Klass 3
Ortoxolen	Klass 3	Klass 3
Butan-1-ol	Klass 3	Klass 3
Testresultat för heltäckande skyddsdräkt		
Typ 6 lätt stänk		
Metoder enligt definitionen i		
EN ISO 13034:2005	Godkänd	
EN 14126:2003	Godkänd	
Barriär mot smittsamma ämnen	Godkänd	
EN 1149-5:2018 antistatisk	Godkänd	
Skydd mot smittsamma ämnen EN14126		
ISO 16603	Klass 6	
ISO 16604	Klass 6	
EN ISO 22610	Klass 6	
ISO 22611	Klass 3	
ISO 22612	Klass 3	

Användningsområden:

Tillbehör utformade för att skydda mot farliga ämnen och kontaminering av så väl produkt som personal. De används vanligtvis som skydd mot torra partiklar och mindre farliga skvätt och stänk. Det slutgiltiga ansvaret för att avgöra tillbehörens lämplighet ligger hos användaren. Dräkten kan vara kontaminerad vid avtagandet och ska därför avlägsnas på ett sätt som gör att användaren undviker att kontamineras.

Begränsningar:

Vi användning av overallen med annan PSU och i syfte att helt uppfylla EN-kraven för tillbehör så måste alla öppningar, såsom vid handleder, fotleder, hals

o.s.v., tejpas på ett säkert sätt. Endast användaren avgör lämpligheten av det typ av skydd som krävs samt korrekta kombinationer av tillbehör och extrautrustning. Vid kontaminering, slitage eller skada skall tillbehören avlägsnas och bortscaffas på lämpligt sätt så snart som möjligt. Användaren måste alltid kontrollera att tillbehören är hela innan de används. Under väldigt varma förhållanden bör risken för värmestress beaktas. Värmestressen kan lindras eller elimineras med hjälp av användning av lämpliga underkläder och ventilationsutrustning. Extrem värme eller kyla kan påverka detta plaggs funktion negativt. Tillbehören ska inte användas om det finns en risk för vissa farliga kemiska ämnen som tillbehöret inte testats mot. Även om ett begränsat skydd kan ges mot olika kemikalier, var god referera till tillbehörens fysiska resultat i relation till testning av typ 6. Användaren måste även bära kompatibla kemikalieresistent handskar, stövlar och andningsskydd. Handskarna måste täcka de elastiska manschetterna. Användaren måste välja en lämplig storlek som garanterar obegränsad rörlighet för den risk som avses. Be tillverkare/distributör om råd vid behov.

Förvaring och bortscaffande:

Tillbehören kan förvaras i enlighet med normala förvaringsmetoder, men vi rekommenderar att den förvaras på en torr plats som är skyddad från ljuskällor, värme och direkt solljus. Begränsningar gällande bortscaffande beror enbart på kontaminering under användning. Tillverkaren kan inte ansvara för någon olämplig användning eller bortscaffande av tillbehör.

Utgångsdatum:

Vi rekommenderar att produkten används inom en period på 3 år från tillverknings-/produktionsdatumet som står skrivet på förpackningen.

Godkännanden:

CE-godkännanden av:

(Anmält organ: 2895)

Shirley® Port Tunnel Business Park, Office 13 Unit 21, Dublin 17, ROI Ireland

	Produktkod
	Satsnummer
	Tillverkare
	Läs bruksanvisningen
	Tillverkningsdatum
	Utgångsdatum
	Personlig skyddsutrustning av kategori III i FÖRORDNING (EU) 2016/425

REF

04BT (GIMA 21090)

STÖVELÖVERDRAG - Typ PB6B

04BT (GIMA 21091)

STÖVELÖVERDRAG - Typ PB6B med halksäker sula

Xianning Huaxin Garment Co., Ltd.
NO. 86, Guanbu Section, 107 National Highway
Xianning city, Hubei Province, China
Made in China

Importerad av:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com

export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

