



**SW ⚠ Varning!**  
*Säkerhetsanvisningar för lagring och hantering av hemoglobin-mikrokuvetter*

📖 Hemoglobin-mikrokuvetter är endast avsedda för fastställande av hemoglobin i kapillärt och venöst blod, och för användning med följande apparater: Hemo\_Control, Hemo\_Control Manager, Hemo\_Vet, Hemo\_Vet Manager. De får endast användas av kvalificerad yrkespersonal.

📖 För ytterligare information var god beakta betjäningssanvisningen av respektive apparat.

Kuvetterna får endast förvaras i sin originalförpackning vid temperaturer från 15°C till 30°C. Originalförslutna burkar kan användas ända fram till det befintliga hållbarhetsdatumet. Efter att en burk har öppnats förblir kuvetterna stabila under 3 månader under förutsättning att de hanteras korrekt under här angivna betingelser. Tag endast ut en kuvett åt gången ur burken. Återförslut burken noggrant efter uttagande av en kuvett (**se ill. 1.**). Säkerställ att locket av kuvettburken är fullständigt och tätt förslutet runt om (**se ill. 2.**).

Ifall locket ej tillsluts fullständigt (**se ill. 3.**) kan fukt tränga in i burken vilket kan leda till att reagenserna i kuvetterna förstörs. Användning av sådana kuvetter kan leda till felaktiga resultat. Använd aldrig kuvetter som härstammar ur en burk som ej varit korrekt tillsluten!

📖

