


- I Semi-maschere filtranti monouso
- GB Single-use filtering half-masks
- D Partikelfiltrierenden Einweg-Halbmasken
- F Demi-masques filtrants jetables
- E Semimáscaras filtrantes desechables
- P Semi-máscaras filtrantes de utilização única
- TR Tek kullanımlık filtreli yarım yüz maskeleri
- NL Halvegeleatsmasker met filter voor eenmalig gebruik
- S Filtrerande halvmasker för engångsbruk
- FIN Suodattavat kertakäyttöiset puolinaamarit
- CZ Filtrační polomaska na jedno použití
- PL Maski ochronne jednorazowego użycia
- GR Ημιμάσκες διήθησης μιας χρήσης
- HR Polu-maske s filtrom za jednokratno upotrebu

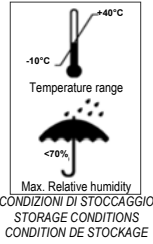

SVENSKA	BRUKSANVISNING			
<p>VIKTIGT! Dessa filtrerande halvmasker för engångsbruk finns i tre klasser - FFP1, FFP2 och FFP3. Kontrollera vilken klass masken tillhör enligt standard SS-EN 149:2001+A1:2009 och att den passar för det aktuella användningsområdet (klassen anges både på förpackningen och halvmasken). Produktens sista förbrukningsdag anges på förpackningen.</p> <p>ANVÄNDNINGSGRÄNSER: Skydd mot torra eller vätskeburna damm- och dimpartiklar (t.ex. oljedimor).</p>				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0; text-align: center;">FFP3</td> <td style="width: 33%; border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0; text-align: center;">FFP2</td> <td style="width: 33%; border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0; text-align: center;">FFP1</td> </tr> </table>		FFP3	FFP2	FFP1
FFP3	FFP2	FFP1		
<p>Kontrollera alltid att masken är hel före användning. Begär en ersättningsmask om masken uppvisar revor och/eller fläckar. Beteckningen NR i märkningen innebär att masken inte kan återanvändas utan ska kasseras när arbetsdagen är slut. Symbolen D anger att maskerna har klarat igensättningsstestet med dolomildamm. Skyddet som en filtrerande halvmask i klass FFP3 eller FFP2 erbjuder omfattar även det skydd som en mask i klass FFP1 ger.</p> <p>ANVISNINGAR FÖR TILLPASSNING AV MASKEN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stick in ett finger i masken. Böj till näsbygeln så att den passar näsans form. 2. Håll masken i handen och dra den nedre gummibandsdelen över huvudet och placera den runt nacken, nedanför öronen. 3. Lyft upp den övre gummibandsdelen och placera den uppe på huvudet, ovanför öronen. 4. Använd båda händerna för att forma till näsbyggans clips (om det finns). Justera spänningen på den övre resp. nedre gummibandsdelen med hjälp av spännet (vissa modeller) för att garantera att masken sluter tätt mot ansiktet. 5. (a) Tillpassningskontroll av mask utan ventil: Placera händerna på masken enligt figur 5 och andas ut kraftigt. (b) Tillpassningskontroll av mask med ventil: Placera händerna på masken enligt figur 5 och andas in kraftigt. Om det kommer ut eller in luft via maskens kanter ska du placera om masken på ansiktet och dra åt gummibandet (om försett med spänne/draganordningar). 6. Byt ut masken omgående om du märker att du får svårt att andas eller om masken skadas eller det är svårt att få masken att sluta tätt mot ansiktet. Läkta noggrant dessa anvisningar för att garantera en säker användning av andningskyddet. <p>VARNINGAR: [PPE - Personlig skyddsutrustning]</p> <p>Om det är omöjligt att få masken att sluta tätt mot ansiktet ska du inte beträda potentiellt farliga utrymmen. Försummelse av anvisningarna på detta informationsblad kan leda till en felaktig användning av den personliga skyddsutrustningen och försorsaka sjukdomar och t.o.m. dödsfall. Val av rätt andningskydd är grundläggande för att kunna värna om sin hälsa. Kontakta ditt skyddsombud eller en yrkeshygieniker som kan avgöra om användning är lämplig eller ej.</p> <p>Produkten tillför inte syre. Ska endast användas i välventilerade utrymmen där syrenivån är såpass hög att användaren av masken inte kan drabbas av syrebrist. Gränsvärdena avseende syrenivån för ett givet användningsområde för dessa masker kan variera från land till land. Ta reda på och följ gällande värden i användarlandet. Eleco s.r.l. avråder från användning i utrymmen där syrenivån understiger 19,5 %. Ska inte användas när koncentrationen av föroreningarna är farlig för hälsan eller livet. Ska inte användas i miljöer där explosionsrisk föreligger. Lämna omgående arbetsområdet om (a) du får svårt att andas eller (b) du drabbas av hjärtklappning eller yrsel. Skägg, mustascher o.s.v. samt vissa andningsbesvär eller sjukdomar i andningsorganen kan minska de filtrerande halvmaskernas verkan. Andra eller mixtra aldrig med den filtrerande halvmasken. Endast för engångsbruk. Underhållsfria. Kasta halvmasken efter en enda användning. Förvara de outnyttjade halvmaskerna i obrutna förpackningar på en plats där de inte utsätts för direkt solljus. - Modellens artikelnummer anges på förpackningen.</p>				