

VENTIL BIOSAFE

SV

INDIKATIONER:

Ventilen Biosafe är en anordning för provtagning och infusion av vätskor utan nål. Ventilen är kompatibel med följande medicintekniska produkter som är utrustade med luer-koppling med utvändig gänga: Administreringsstatser, Förlängningsstatser, Sprutor / Förfyllda sprutor, Centrala venösa katetrar, Kranramper, Kranar.

BRUKSANVISNING:

1. Öppna förpackningen från öppningsstället och ta bort skyddshättan (fig. 1).

2. Anslut kateterns eller förlängningens luer-koppling med invändig gänga till luer-kopplingen med utvändig gänga på Biosafe (fig. 2).

3. Öppna silikonplomberingen som finns på luer-kopplingen med invändig gänga på Biosafe av säkerhetsskäl. Var försiktig vid detta moment för att inte kontaminera anordningen.

4. Anslut infusionsanordningens eller sprutans ändkoppling med utvändig gänga till Biosafe genom att först trycka i och därefter vrida anordningen tills den låses fast. Bibehåll de två anordningarna i linje med varandra under detta moment. Använd inte nålar.

5. Frånkoppla genom att vrida infusionsanordningen eller sprutan åt motsatt håll tills den frigörs. Ta inte bort Biosafe från patientens kateter eller från infusionsanordningen (fig. 3).

6. Desinficera Biosafe med en icke-alkoholhaltig lösning efter varje användning för en bättre aseptisk teknik.

Biosafe är ett slutet system och behöver inte skyddshättor.

Steril och pyrogenfri produkt.




VARNINGAR:

- Använd en aseptisk teknik.
- Använd inte med nålar.
- Ska inte användas om förpackningen är skadad.

• Steriliteten garanteras endast vid obruten förpackning.

• Anordningen får bara användas en gång på en enda patient och ska kastas direkt efteråt. Återanvändning är inte tillåten eftersom anordningen då inte längre är steril. Risken som är förknippad med återanvändning är kontaminering av anordningen vilket kan ge patienten en infektion som i sin tur kan leda till sjukdom eller dödsfall.

ARIES understryker vikten av korrekt användning av anordningen enligt bruksanvisningen för oauktorerad medicinsk personal, för att undvika skador på patienten eller användaren/operatören.

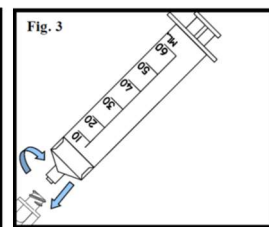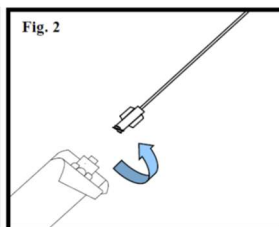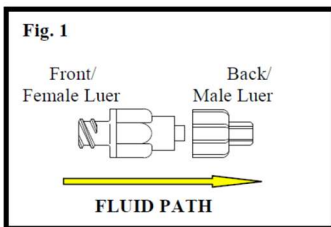

REF = Catalogue number

LOT = Batch code

= Use-by date

= Manufacturer

STERILE **EO** = Sterilized using Ethylene Oxide

= Disposable device. Do not re-use

= This device does not contain latex

= LATEX FREE

= Read instruction for use carefully

= Date of manufacture

= Fragile

= High

= Keep between 0+40 °C

= Keep dry

= Keep away from sunlight