

Ibruktagning

Stick in nätledens kabel på baksidan av plattformen för att förse vägen med ström.

Vägning

Stå helt enkelt på vägen (ingen inkoppling eller extra vidrörning behövs).

Längdmätning med BMI-indikering

Fäll försiktigt upp längdmätaren och skjut upp den. Lägg sedan huvuddelen på patientens huvud.

På displayen visas längden i cm och därefter automatiskt personens body mass index.

Tarering

Vägens kan tareras med funktionsknappen på baksidan av displayen. Tryck på knappen, på displayen visas »0,0 kg« och vägen är klar för vägning.

Mamma/barn-funktion

En vuxen person ställer sig på vägen.

> Visat värde t.ex. »47,6 kg«

- Tryck på funktionsknappen

> displayen visar »0,0 kg«

- Mamman kan stiga av vägen...

> displayen visar »-47,6 kg«

- ... och ställa sig på vägen igen tillsammans med barnet.

> Barnets vikt visas, t.ex. »5,1 kg«

Om båda lämnar vägen igen visar displayen i exemplet »-47,6 kg«.

Med funktionsknappen kan du ställa tillbaka vägen på »0,0 kg«.

Vägen går inte automatiskt till »0,0 kg« så att flera tareringar kan genomföras efter varandra.

Frånkoppling

Vägen kopplas automatiskt från om displayen står på »0,0 kg« i ca 15 sekunder.

Enhetskoppling


Som standard är enheten kg inställd.

Gör som följer om du vill koppla om vägen till en annan enhet:

- Dra ut nätkontakten.
- Tryck på funktionsknappen, håll den intryckt och stick samtidigt in nätkontakten.
- Displayen växlar till lb.

Upprepa den beskrivna processen för att ställa om till kg igen.

Lengtemetung met BMI-weergave
Højdemåler med BMI-display
Medición de altura con indicación de IMC
Misura di altezza con display BMI
Pituuden mittaus BMI-näytöllä
Längdmätning med BMI-indikering
Lengdemåling med BMI-visning
Μέτρηση ύψους με ένδειξη BMI (δείκτην μάζας σώματος)
BMI göstergesi ile boy ölçümü
Meranie výšky s údajom o BMI
Měření výšky s výpočtem BMI
Pomiar wzrostu i wskaźnik BMI
Измерение длины с индикацией индекса массы тела (BMI)

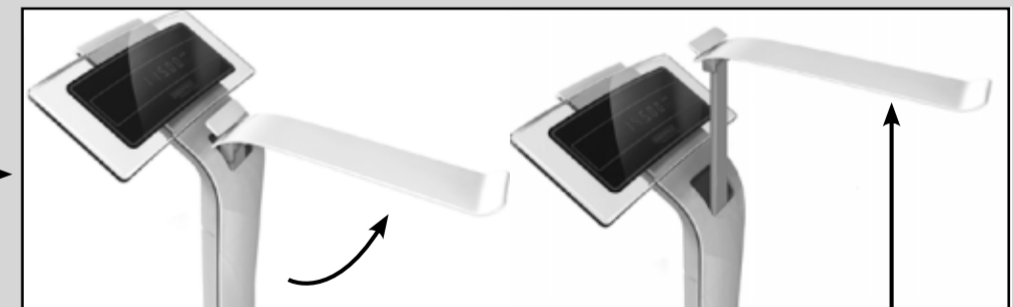

Functietoets
Funktionsknapp
Tecla de funci3n
Tasto funzione
Toimintopainike
Funktionsknapp
Funktionsstast
Πάκτρο λειτουργίας
Fonksjon tuşu
Funkčné tlačidlo
Funkční tlačítko
Przycisk funkcyjny
Функциональная клавиша

Resettoets
Reset-knapp
Tecla de reset
Tasto Reset
Nollauspainike
Reset-knapp
Resett-tast
Πάκτρο επαναφοράς
Reset tuşu
Tlačidlo Reset
Reset tlačítko
Przycisk reset
Кнопка сброса (Reset)

Service-interface. Opcie: USB-interface
Serviceinterface. Ekstraudstyr: USB-port
Interfaz de servicio. Opcional: Interfaz USB
Interfaccia di servizio. Opzione: Interfaccia USB
Huoltoliitäntä. Lisävaruste: USB-liitäntä
Servicegränssnitt. Tillval: USB-gränssnitt
Servicegränssnitt. Alternativ: USB-gränssnitt
Διεσοφή οεββίς. Προορτυκία: Διεσοφή USB
Servis bađlantı yeri. İsteđe bađlı: USB bađlantı yeri
Servisné rozhranie. Alternativa: USB rozhranie
Servisni rozhrani. Option: USB rozhrani
Złącze serwisowe. Opcja: interfejs USB
Сервисный интерфейс. Опция: USB-интерфейс

