

seca 745

seca
Precision for health

Hjärtliga gratulationer

Med spädbarnsvågen seca 745 har du fått ett exakt och robust instrument.

Sedan över 150 år bidrar seca med sina erfarenheter inom hälsovård och är i många länder normgivande för innovativ utveckling inom vägning och mätning.

Den mekaniska spädbarnsvågen seca 745 är avsedd för användning hos barnläkare eller på sjukhusens barnavdelningar.

Den består av en vit lackerad metallkåpa och en skål. Dessa kan lätt rengöras och sörjer för säker vägning av spädbarnet.

Dessutom förfogar seca 745 över en lätt avläsbar viktblock med 10g indelning.

Säkerhet


Innan den nya vågen används skall man ta sig tid till att läsa igenom följande säkerhetsanvisningar.

- Beakta anvisningarna i bruksanvisningen.
- Låt spädbarnet aldrig någonsin ligga utan tillsyn på vågen.
- Se till att vågskålen rengörs och desinficeras regelbundet för att undvika smittorisk.
- Vågen får inte utsättas för häftiga stötar.
- Alla reparationer skall utföras av auktoriserad fackpersonal
- Utför regelbundet service och efterjustering av taran

Upp- och inställning av vågen


1. Upppackning

Öppna kartongen och plocka upp skålen och vågen.

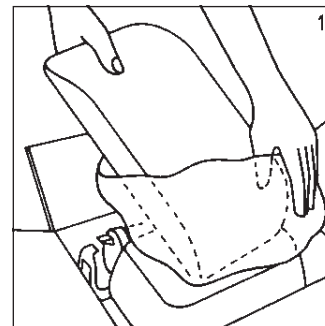


2. Ta bort transportsäkringen

Ta bort O-ring som säkrar skjutvikten och ta vara på den för vidare transporter.

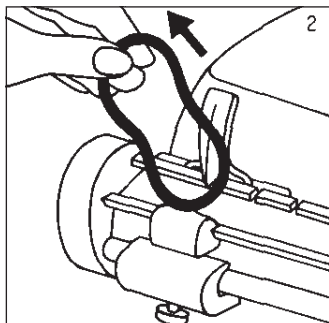


3. Säkra viktbalcken

Säkra viktbalcken genom att fälla ner låsanordningen.

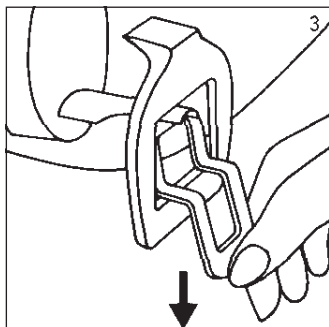


4. Sätt på vågskålen

Sätt vågskålen mitt på vågen. Låsspaken måste gripa tag under kåpan.

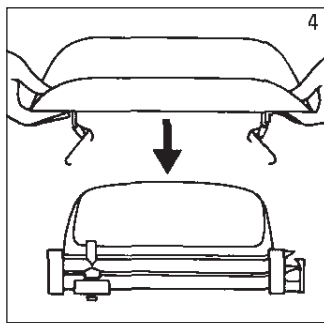


5. Sätt fast skålen

Fäst skålen på vågen genom att trycka ner låsspaken.

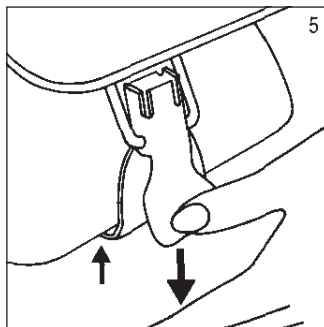


6. Lossa låsningen

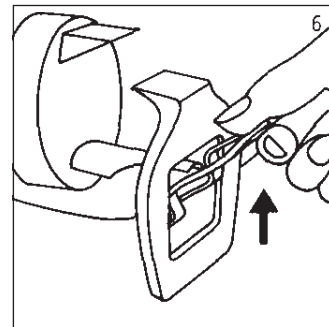


7. Grovinställning

Först måste vågen ställas in på 0 kg för att kunna ge korrekta viktvärden. Skjut nu de båda vikterna till noll på viktbalcken. När nu de båda visarna inte står mitt för varandra måste man ställa in nollvärdet med taran. Lossa inställningsmuttern (se fig. 8) och skjut taran så långt på stången tills de båda visarna står mitt för varandra.

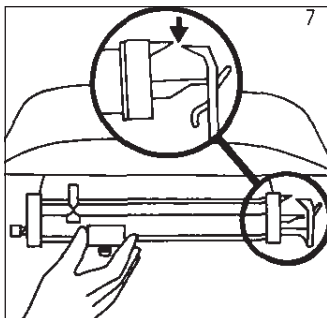


8. Fixering av taran

Fixera taran med inställningsmuttern. Med inställd tara kan man kompensera för föremål t.ex. underlägg osv. upp till 3000g.

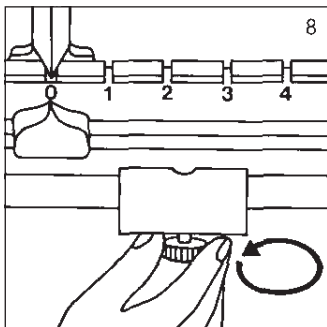

9. Fininställning

Visarna kan ställas in exakt med tareringsskruven. Genom att vrida tareringsskruven mot höger eller vänster, kan de båda visarna, ställas in exakt mitt för varandra.

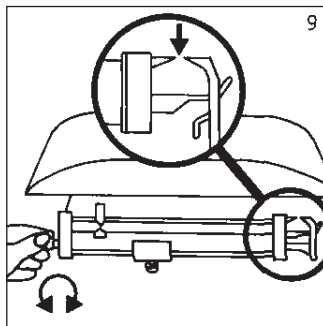

Användning

Efter det vågen har förberetts så som beskrivs i kapitel "Upp- och inställning av vågen" kan man nu börja väga.

Lägg spädbarnet i skålen och förskjut först den stora vikten till uppskattad vikt.

Med den mindre vikten kan nu den exakta vikten bestämmas genom att den skjuts till det läge där de båda visarna står mitt för varandra.

Rengöring

Rengör kåpan och skålen efter behov med ett vanligt hushållsrengöringsmedel eller desinfektionsmedel. Beakta tillverkarens anvisningar.

Vad gör man när...

... ingen vikt visas trots belastning?

- Kontrollera att transports-
åkringsspaken (se fig. 6) är lossad
- Kontrollera att transportsäkring, dvs. O-ringen har tagits bort.

Underhåll

Genomför underhåll och efterjustering efter fyra år. Underhåll och justering får endast utföras av auktoriserad personal. Ta kontakt med kundtjänst.

Tekniska data

Bärkraft:	16 kg
Indelning:	10 g
Mått (BxHxD):	550 mm 190 mm 305 mm
Vikt:	ca. 6 kg
Temperatur- område:	+10°C till +40°C
Kalibrering enligt direktiv 90/384/EWG:	medicinsk kalibrering, klass III
Medicinsk produkt enligt direktiv 93/42/EWG:	klass I
Exakthet vid första kalibrering:	till 5 kg : +/- 5 g över 5 kg : +/- 10 g

Sophantering

När vågen inte längre kan användas skall den lämnas till föreskriven sophantering.

Garanti

För brister vilka kan hänföras till material- eller fabriktionsfel lämnas en garantifrist på två år från leveransdatum. Undantagna från detta är alla rörliga delar, som t.ex. batterier, kablar, nätaggregat, laddningsbara batterier osv.. Brister vilka faller under garantin åtgärdas utan kostnad för kunden mot förevisande av köpkvittot. Övriga anspråk kan inte lämnas. Kunden står för transportkostnaderna när apparaten befinner sig på annan ort än kundens huvudadress. Vid transportskador kan garantianspråk endast göras gällande när för transporten den kompletta originalförpackningen använts och vågen säkrats och fixerats i originalförpackat tillstånd. Ta därför vara på alla förpackningsdelar.

Garantin upphör att gälla när apparaten öppnats av person som inte uttryckligen auktoriserats av seca.

Kunder i utlandet ber vi att i garantifall ta kontakt med representanten i respektive land.

seca deutschland

Medical Scales and Measuring Systems

seca gmbh & co. kg.

Hammer Steindamm 9-25

22089 Hamburg • Germany

Phone • +49 (0)40 20 00 00 0

Fax • +49 (0)40 20 00 00 50

E-mail • info@seca.com

All contact data under www.seca.com

seca
group

seca deutschland

seca france

seca united kingdom

seca north america

seca schweiz

seca zhong guo

seca nihon

seca mexico

seca austria