

**CALIBRO PER NEONATI**  
**BABY MEASURING ROD WITH CALIPERS**  
**JAUGE POUR BÉBÉ**  
**CALIBRE PARA BEBÉS**  
**MEDIDOR PARA RECÉM-NASCIDOS**  
**MESSSCHIEBER FÜR NEUGEBORENE**  
**PEDIOMETRU TIP RIGLĂ PENTRU NOU-NĂSCUȚI**  
**KROPPSMÄTARE FÖR SPÄDBARN**  
**SUWMIARKA DLA NOWORODKÓW**  
**ΒΡΕΦΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ**

Manuale utente - User manual - Mode d'emploi - Manual de uso - Manual do utilizador - Benutzerhandbuch -  
Manual de utilizare și întreținere - Instruktioner för användning och underhåll  
Instrukcja użytkownika - Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης

**ATTENZIONE:** Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

**ATTENTION:** The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.

**AVIS:** Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.

**ATENCIÓN:** Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.

**CUIDADO:** Os operadores devem ler e compreender este manual completamente antes de usar o produto.

**VORSICHT:** Bediener müssen dieses Handbuch vollständig lesen und verstehen, bevor sie das Produkt verwenden.

**ATENȚIE:** Operatorii trebuie să citească și să înțeleagă complet acest manual înainte de a utiliza produsul.

**FÖRSIKTIGHET:** Operatörer måste läsa och förstå denna manual helt innan de använder produkten.

**UWAGA:** Operatorzy muszą w całości przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję przed użyciem produktu.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Οι χειριστές πρέπει να διαβάσουν και να κατανοήσουν πλήρως αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση του προϊόντος.

## GIMA 27326



Metrica S.p.A.,  
Via A. Grandi 18, 20097  
San Donato Milanese (MI) - Italy  
Made in Italy



**10455**





Gima S.p.A.  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)



0425



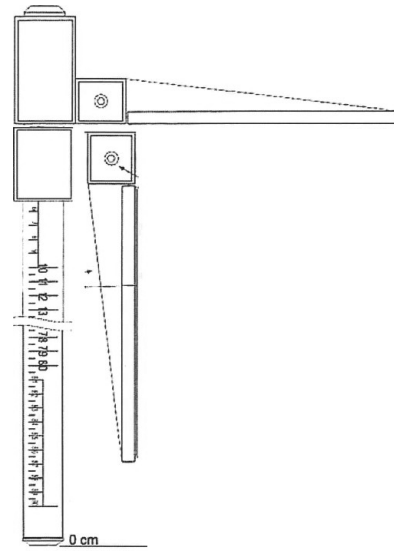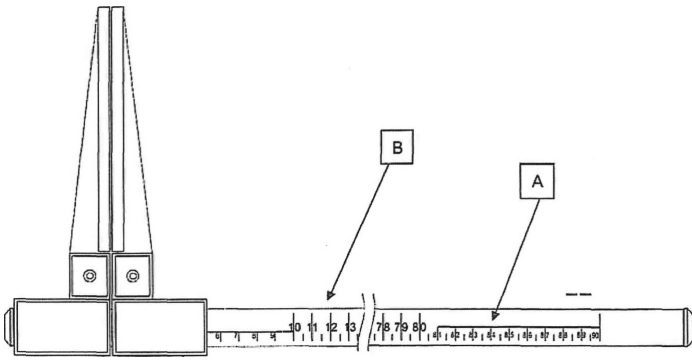

**GARANTIVILLKOR GIMA**

Man tillämpar standard garanti B2B Gima på 12 månader.

**SVENSKA****FÖRORD**

Syftet med denna bruksanvisning är att ge kunden alla möjliga indikationer om KROPPSMÄTAREN FÖR SPÄDBARN förutom de instruktioner för användning och skötsel som tillåter att bevara både prestanda och effektivitet hos KROPPSMÄTAREN FÖR SPÄDBARN.

Bruksanvisningen ska förvaras i gott skick och läggas på åtkomlig plats för snabb konsultation.

**AVSEDD ANVÄNDNING**

Denna KROPPSMÄTARE FÖR SPÄDBARN är ett instrument som har i funktion att mäta i cm, med en precision på  $\pm 1$  cm, längden på spädbarnets kropp, eller dess kroppsdelar.

**BRUKSANVISNING**

För de två mätspetsarna till den del av kroppen som ska mätas och läs av värdet som anges på den graderade skalans index.

Anordningen har en graderad stav med två typer av skala för måttet: in cm

A) skalan med det minsta tecknet från 0-90 cm steg 0,5 cm – tolerans  $\pm 0,5$  cm

B) den större skalan från 0-90 cm steg 0,5 cm – tolerans  $\pm 0,5$  cm

Kan även användas vertikalt genom att rikta den inre mätspetsen i 90° genom att föra den mot den graderade staven

**ANVISNINGAR/SKÖTSEL**














KROPPSMÄTAREN FÖR SPÄDBARN får endast användas av kvalificerad personal.

Använd inte om den är skadad. Utför inte reparationer själv, kontakta tillverkaren vid behov. Då förpackningen öppnats, kontrollera alla delar som produkten består av. Kontrollera att allt finns och är i perfekt skick. Rengöringen av KROPPSMÄTAREN FÖR SPÄDBARN ska utföras med en trasa som fuktats med substanser som inte förstör aluminium, som till exempel, alkohol eller fönsterputsmedel. KROPPSMÄTAREN har konstruerats för att vara i tiden: den är beständig mot de flesta kemiska produkter, med undantag för metyletylketoner (M.E.K.), spädningemedel och lösningar för naglar. KROPPSMÄTAREN ska alltid förvaras i sitt foder i torr miljö.

**BESKRIVNING AV RESERVDLAR**

Detalj nr	Beskrivning av delen
1	Mätspetsar
2	Mobilt stöd
3	Fast stöd
4	Graderad aluminiumstav
5	Plastlock

För utbyte av komponenterna ska instrumentet skickas till tillverkaren.

	Produktkod		Satsnummer
	Skyddas från solljus		Förvara på svalt och torrt ställe
	Den medicintekniska produkten överensstämmer med förordning (EU) 2017/745		Tillverkare
	Medicinteknisk produkt		Tillverkningsdatum
	Varsamhet: läs anvisningarna (varningar) noga		Läs bruksanvisningen
	Serienummer		Distribueras av
	Unik enhetsidentifierare		