

POLTRONA PODOLOGIA MECCANICA
PODOLOGY MECHANICAL CHAIR
FAUTEUIL DE PODOLOGIE MÉCANIQUE
MECHANIKUS PODOLÓGIAI SZÉK
SCAUN DE PODOLOGIE MECANIC
MEKANISK PODOLOGISTOL

GIMA 28021

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Gyártó / Producent / Tillverkare:

SILVERFOX CORPORATION LIMITED

No. 18, 1st TongLe Road, TangXia Town, Pengjiang District,

JiangMen City, GuangDong Province, China

amy.liang@silverfox.cn

Made in China

REF 2231A

Importato da / Imported by / Importé par / Importálta / Importat de / Importerad av:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

1 INTRODUKTION TILL ANVÄNDNINGEN AV DENNA MANUAL


Denna manual är avsedd endast som referens för användningen av denna särskilda modell. Om manualen skulle användas för andra avsikter tar vi inget som helst ansvar för några följder. Alla informationerna i denna manual är skyddade av upphovsrätt och får inte reproduceras, kopieras och översättas, inte heller delvis utan föregående skriftligt samtycke från företaget.

2 VARNINGSTEXTER



- Koppla bort produkten från strömförsörjningen vid byte av elektriska komponenter eller under underhålls- och rengöringsprocedurer.
- Stickkontakten måste sättas in i ett korrekt installerat och jordat uttag för att undvika risk för brand och elektriska stötar.
- Kliv inte upp på produkten.
- Låt inte barn leka med produkten och placera den utom deras räckhåll; Justera ryggstödet till högsta läget när det inte används.
- Placera inte produkten på fuktiga platser, såsom badrummet, för att undvika elektriska stötar eller andra fel; kontrollerna får inte komma i kontakt med vatten.
- Placera och använd inte produkten i miljöer som karaktäriseras av belagda/målade ytor eller där syrgasförsörjning utförs.
- Barn och personer med fysiska problem, känselstörningar, psykiska störningar och utan erfarenhet eller sunt förnuft får endast använda apparaten om de har fått tillräcklig instruktion eller under överinseende av personal som ansvarar för deras säkerhet.
- Kontakta distributören, servicecentret eller personal med lämplig kompetens och erfarenhet för att utföra reparationer i händelse av en skadad eller farlig kontakt.
- Se till att det inte finns några tillgängliga föremål i närheten när du använder britsen.
- Britsen får endast användas av kvalificerade fackmän.

3 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Utrustningen måste användas av sakkunnig personal som är bekant med produktens struktur, prestanda och användningsmetoder. Dessutom rekommenderas det att utföra det planerade underhållet regelbundet.
- Läs denna manual noggrant innan du fortsätter med installation, användning och justering av produkten. Håll produkten i gott skick.
- Denna produkt får inte användas genom att belasta den i sidled eller på en enda punkt.
- Följ instruktionerna för säker användning, överbelasta inte produkten under användning och se till att produktens skyddsanordningar är intakta och tillförlitliga, för att omedelbart eliminera alla riskfaktorer.
- Dra åt bultar och muttrar regelbundet för att undvika eventuella fel orsakade av lösa delar som kan röra sig, generera vibrationer eller falla.
- Under underhåll får operatören inte demontera någon del av sängen efter eget gottfinnande.
- Denna produkt får inte användas i händelse av fel. Om ett onormalt fenomen eller onormalt ljud upptäcks, avbryt omedelbart användningen och utför en noggrann inspektion och återuppta arbetet först efter att eventuella fel har avhjälpats.
- Operatören måste känna till de försiktighetsåtgärder som beskrivs i varje avsnitt i manualen för att garantera personens och produktens säkerhet.
- Den elektriska britsen är utrustad med en tretrådig nätsladd. Nätsladden måste vara ansluten till ett trestiftsuttag som är korrekt installerat och jordat. Detta förhindrar inte bara risken för elektriska stötar, utan säkerställer också att britsen fungerar korrekt.
- Det rekommenderas att använda apparaten i enlighet med säkerhetsinstruktionerna som visas på varningsetiketten på produkterna.
- När du höjer hela britsen måste knappen hållas in kontinuerligt tills britsen når önskat läge.
- Observera att britsen kan användas kontinuerligt i max 2 minuter, och sedan måste den lämnas att vila i 18 minuter, om du använder motorn.
- Underhåll måste utföras av kvalificerad personal.
- Efter varje behandling, använd ett neutralt medel för att ta bort damm, fläckar på läder eller delar i trä.
- När du justerar ryggstödet, sittdynan eller fotstödet eller lyfter hela britsen med det manuella reglaget eller fotkontrollen som är installerad på produkten, rekommenderas att hålla händer, fötter och huvud borta från utrustningen i rörelse (se bilden till höger).

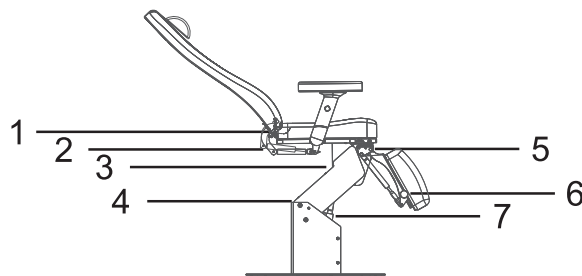

FÖRBJUDET!

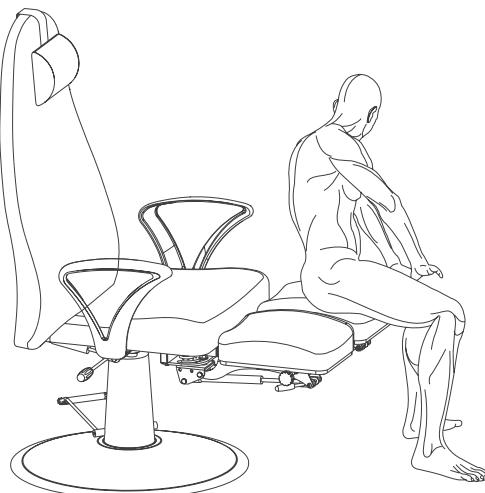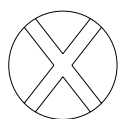

4 TILLÄMPNINGSSOMRÅDE


Dessa produkter är designade för skönhetsbehandlingar, massage och manikyr.

5 INSTALLATION

1. Placera britsen i en lämplig position, med hänsyn till den allmänna miljön, solljus eller artificiellt ljus och användningsförhållandena i vardagsrummet eller hemmet. Förvara den i en ren, torr och sval miljö.
2. Öppna förpackningskartongen för att kontrollera om britsen är hel och om tillbehören eller reservdelarna är kompletta. Kontakta distributören eller tillverkaren för alla typer av problem.
3. Installation
Se till att britsen står på ett plant och stabilt golv, för att undvika alla typer av olyckor.

6 SÄNGSTRUKTUR FÖR SPA-CENTER


- Du kan justera vinkeln på ryggstödet, kudden, fotstödet och höja hela britsen, eftersom det är en kompakt och hel struktur.

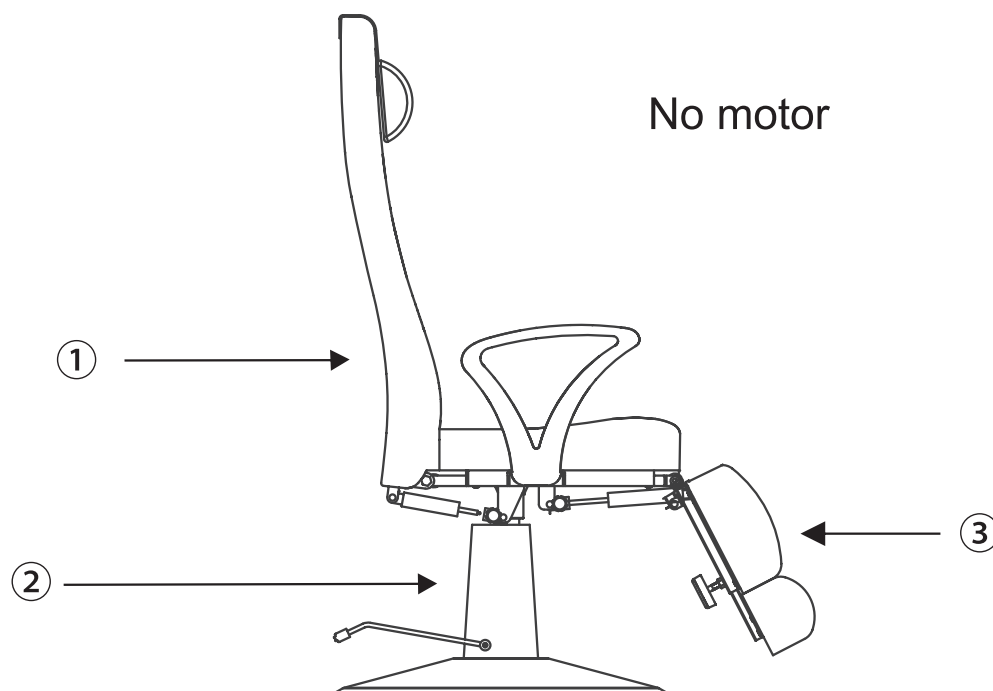

- ① justering av ryggstödet vinkel (manuell justering)
- ② justering av hela britsen lyftposition (manuell justering)
- ③ justering av fotstödet vinkel (manuell justering)

7 TEKNISKA PARAMETRAR

Miljötemperatur	0°C~+40°C
Relativ fuktighet	30%~90%
Nominell lyftlast	175 kg

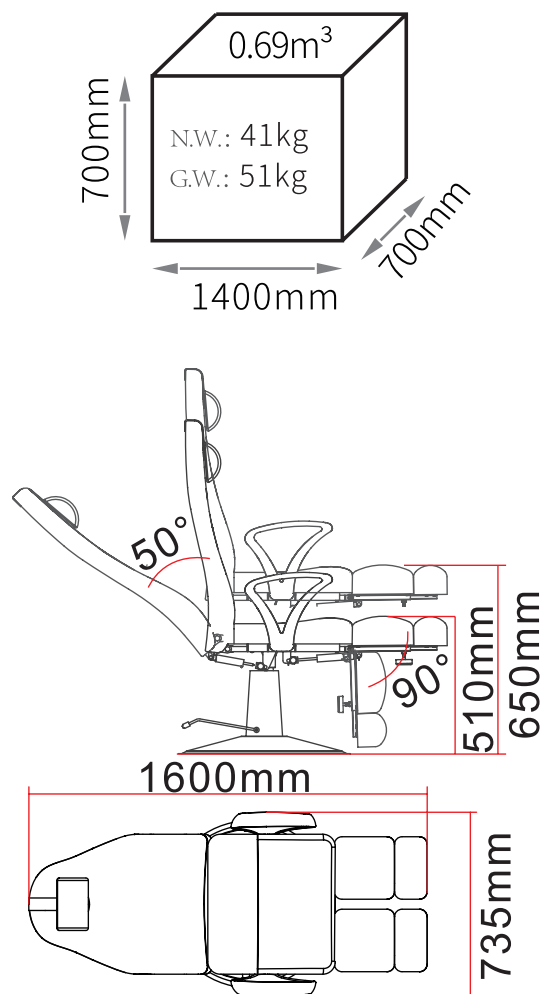

8 UNDERHÅLL

1. Efter varje behandling, använd en neutral lösning för att ta bort damm, fläckar på lädret, metalldelarna eller plastskyddet. Använd inte desinficerande lösningar som alkohol, syror eller alkaliska lösningar. Detta kan minska livslängden på läderdelarna och plasthöljet.
2. Smörj de rörliga delarna regelbundet (en gång om året).

9 FELSÖKNING

FEL	ANLEDNING	LÖSNING
Onormalt ljud	1. De roterande delarna är inte korrekt smörjda	1. Tillsätt smörjolja
	2. Rotationsleder (som gångjärn, POM-komponentsatser) är inte ordentligt smörjda	2. Tillsätt smörjolja

Om problemet kvarstår även efter att de åtgärder som beskrivs ovan har utförts, kontakta servicecentret eller leverantören för att lösa det.

GIMA GARANTIVILLKOR

Gima tillämpar 12 månaders B2B-standardgaranti.