

MATERASSO A PRESSIONE ALTERNATA
ALTERNATING PRESSURE MATTRESS
MATELAS À PRESSION ALTERNÉE
WECHSELDRUCKMATRATZE
COLCHÓN DE PRESIÓN ALTERNANTE
COLCHÃO DE PRESSÃO ALTERNADA
ΣΤΡΩΜΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
MATERAC ZMIENNOCIŚNIENIOWY
SALTEA CU PRESIUNE ALTERNATIVĂ
MADRASS MED VÄXELTRYCK

Manuale d'uso - User manual - Mode d'emploi - Bedienungsanleitung - Manual de uso - Manual de utilização - Εγχειρίδιο
χρήσης - Instrukcja obsługi - Manual de utilizare - Bruksanvisning

REF QDC-8010+P3000A2QB3 (Gima 28580)
QDC-8080+P3000A2QB3 (Gima 28582)



Guangdong Yuehua Medical Instrument Factory Co., Ltd.
Rongsheng Science and Technology Zone,
Daxue Road, Shantou, Guangdong, China
Made in China



SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Alla allvarliga olyckor som inträffar i relation till vår medicintekniska produkt ska meddelas tillverkaren och kompetent myndighet i medlemsstaten där du bor.

KIT 8010 MADRASS MED VÄXELTRYCK AV NYLON PVC+PUMP - PROFESSIONELL ANVÄNDNING

KIT 8080 MADRASS MED VÄXELTRYCK AV NYLON TPU+PUMP - PROFESSIONELL ANVÄNDNING

INSTRUKTIONER

Madrassen med växeltryck består av två delar: madrass och pump. Den senare använder en liten kompressor med dämpat ljud och energieffektivitet. Kontrollpanelen är enkel och mycket lätt att använda. Madrassen lättar trycket vid växlande urlåsning och pumpning av luftcellerna i cirka 12 minuter. Det är vida känt att det konstanta trycket från ett utskjutande ben är huvudorsaken till trycksår på huden. Den kontinuerliga rörelsen på produkten minskar områdena med konstant tryck och ökar cirkulationen.

ANVÄNDNING

1. Placera madrassen på sänggramen med slangänden vid sängens fotände.
2. Genom att använda de integrerade krokarna, hängs pumpen säkert fast i fotänden eller på en plan yta.
3. Koppla luftslangarna från madrassen till pumpen.
4. Koppla pumpen till ett vägguttag. Se till att elsladden sitter på avstånd från möjliga faror.
5. Tryck på strömställaren på pumpens kontrollpanel. Pumpen börjar pumpa madrassen.
6. Efter pumpningen regleras madrassen med pumpens vridhandtag.

VARNING

1. Rök inte över eller i närheten av pumpen.
2. Håll pumpen på avstånd från uppvärmda ytor.
3. Risk för explosion vid användning i närvaro av brandfarliga bedövningsmedel.
4. Byt ut säkringen med följande egenskaper: T1A 250 V. Kraft: ~ 220 V - 50 Hz - 0,1 A

PRODUKTSPECIFIKATIONER

KAPACITET		ELEKTRISKA SPECIFIKATIONER	
Patientens maximala vikt	150 kg (331lbs)	Driftström:	~ 220 V 50 Hz 0,1 A max.
		Säkringar:	T1A 250 V
MILJÖVILLKOR			
FUNKTIONSVILLKOR		VILLKOR FÖR FÖRVARING OCH FRAKT	
Miljötemperatur:	Från 10 °C till 40 °C (från 50 °F till 104 °F)	Miljötemperatur:	Från -18°C till +43°C (från 0°F till 110°F)
Relativ fuktighet:	Från 10 % till 75 %	Relativ fuktighet:	Från 10 % till 95%

	Förvara på svalt och torrt ställe		Skyddas från solljus		Varsamhet: läs anvisningarna (varningar) noga
	Avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)		Tillverkare		Den medicintekniska produkten överensstämmer med förordning (EU) 2017/745
	Följ bruksanvisningen		Typ BF tillämpad del		Klass II tillämpad
	Produktkod		Satsnummer		Medicinteknisk produkt
	Tillverkningsdatum		Temperaturgräns		Fuktighetsgräns
	Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen		Importerad av		Serienummer



Avyttring: Produkten får inte avyttras med annat hushållsavfall. Användarna ska avyttra utrustningar som ska skrotas genom att föra dem till den indikerade uppsamlingsplatsen för återvinning av elektriska och elektroniska utrustningar

GIMA GARANTIVILLKOR

Gima tillämpar 12 månaders B2B-standardgaranti