



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

LAMPADA FRONTALE MEDICA LED 70 KL GIMA 3W
 LAMPADA FRONTALE CHIRURGICA LED 50 KL GIMA 5W
 GIMA 70 KL LED MEDICAL HEADLIGHT 3W
 GIMA 50 KL SURGICAL LED HEADLIGHT 5W
 LAMPE FRONTALE MÉDICALE À LED 3W, GIMA 70 KL
 LAMPE FRONTALE CHIRURGICALE À LED 5W, GIMA 50 KL
 LÁMPARA FRONTAL MÉDICA CON LUZ LED DE 3W, 70 KL DE GIMA
 LÁMPARA FRONTAL QUIRÚRGICA CON LUZ LED DE 5W, 50 KL DE GIMA
 LÂMPADA FRONTAL MÉDICA LED 3W GIMA 70 KL
 LÂMPADA FRONTAL MÉDICA LED 5W GIMA 50 KL
 GIMA 70 KL MEDIZINISCHE LED-STIRNLAMPE MIT 3W
 GIMA 50 KL CHIRURGISCHE LED-STIRNLAMPE MIT 5W
 CZOŁOWA LEDOWA LAMPA MEDYCZNA GIMA 70 KL 3W
 CZOŁOWA LEDOWA LAMPA CHIRURGICZNA GIMA 50 KL 5W
 GIMA 70 KL ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ LED 3W
 GIMA 50 KL ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ LED 5W
 70 KL LAMPĂ DE CAP CU LED PENTRU UZ MEDICAL 3W
 50 KL LAMPĂ DE CAP PENTRU UZ CHIRURGICAL 5W
 70 KL MEDICINSK PANNLAMPA MED LED 3W
 50 KL KIRURGISK PANNLAMPA MED LED 5W
 70 KL LED LEKÁRSKY SVETLOMET 3W
 50 KL CHIRURGICKÝ LED SVETLOMET 5W
 70 KL LED MEDICINSKO SVJETLO ZA GLAVU 3 W
 50 KL KIRURŠKO LED SVJETLO ZA GLAVU 5 W
 70 KL LED ORVOSI FEJLÁMPA 3 W
 50 KL LED SEBÉSZI FEJLÁMPA 5 W
 70 KL LED PANDELAMPE TIL MEDICINSK BRUG 3W
 50 KL KIRURGISK LED-PANDELAMPE 5W

REF KS-H1N (GIMA 30879) KS-W03 (GIMA 30936)



Shantou Easywell Electronic Technologies Co., Ltd
 5th Floor and No.1 West Side Of 6th Floor, H5 Industrial
 Building, No.16 Lianjiang Road, Longhu District, Shantou,
 China - Made in China



Kingsmead Service B.V.
 Zonnehof 36, 2632 BE, Nootdorp, Netherland



Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
 gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Alla allvarliga olyckor som rör medicintekniska produkter från oss måste meddelas tillverkaren och kompetent myndighet i medlemsstaten där ditt registreringskontor befinner sig.

1. Inledning

Lampan ger användaren en ljusstråle som är mycket enhetlig och uppvisar inga färgförändringar av luppens skärpedjup. Inbyggt i batterienheten har pannlampan en kontrolljustering av steglös ljusintensitet. Detta gör att användaren har exakt kontroll över pannlampans ljusstyrka och kan se objekt i maximal detalj.

2. Modeller

30879

70 KL MEDICINSK PANNLAMPAN MED LED GIMA 3W

Enkel optisk lins med rak optisk väg
Inget inre ljusgaller



30936

50 KL KIRURGISK PANNLAMPAN MED LED GIMA 5W

Inre ljusgaller för multioptisk lins med L-format optisk väg



3. Tekniska data

Pannlampa med LED						
Kod	Glöd-lampa med LED	Intensitet	Led-lampans livslängd	Punktstorlek	Batteriets laddningstid	Batteriets varaktighet
KS-H1N	3W	20000-70000 lux	50000 timmar	40-90 mm med 20-50 cm	2 timmar	2-12 timmar
KS-W03	5W	10000-50000 lux	50000 timmar	50-100 mm med 20-50cm	2 timmar	2-12 timmar

4. Illustration

30879

GIMA 70 KL Medicinsk pannlampa med led 3W är modellen med enkel optisk lins. LED-lampans hölje är gjort av aluminium, så det är hållbart och väger lite. Inbyggd i batterienheten har GIMA 70 KL medicinska pannlampa med led 3W kontrolljustering av steglös ljusintensitet. Detta gör att användaren har exakt kontroll över pannlampans ljusstyrka och kan se objekt i maximal detalj.

GIMA 70 KL MEDICINSK PANNLAMP MED LED 3W

1. Hygieniska och bekväma läderdynor
2. Justera bredden på pannbandet
3. Omladdningsbart batteri
4. Batterivolym för LED-display
5. På/Av-brytare
6. Ljusstyrkekontroll



30936

GIMA 50 KL Kirurgisk pannlampa med led 5W tillämpar L-formad optisk väg som har god koaxialitet mellan ljusstråle och sikt.

Minimal och låg vikt endast 200 g.

Justerbar punktstorlek genom det inre miniljusgallret.

Integrerad trådlös design med likström och snabbt utbyttbar.

Exakt ljusavbildning från multioptisk lens, enhetlig och distinkt utan ljusförorening. Trådlös pannlampa med led och enkelt batteri.

GIMA 50 KL KIRURGISK PANNLAMP MED LED 5W

1. Justera pannbandets höjd
2. Justera pannbandets bredd
3. Omladdningsbart batteri
4. Batterivolym på LED-display
5. På/Av-brytare
6. Ljusstyrkekontroll
7. Justering av ljuspunkt
8. Justering av höjd på lamphuvudet
9. Hygieniska och bekväma läderdynor



5. Packlista

Packlista för pannlampa:

1. Pannlampa med led: 1 var
2. Adapter: 1 var
3. Batteri: 1 var eller 2 (om konfigurerat)
4. EPE kartonglåda: 1 aluminiumhölje var: (alternativ)

6. Justering

Enligt individuellt förhållande justeras höjden och omkretsen på pannbandet.

7. Varsamhet

Se upp med LED-lampan, undvik att rikta direkt mot ögonen. Håll enheten torr, använd inte på fuktiga ställen.

Fäst inte det optiska glaset med något hårt eller handen. Torka inte av glaset med något hårt eller smutsigt.



Titta inte direkt mot solen när du bär den medicinska luppen.

8. Underhåll

1. Första gången den används eller efter lång inaktivitetstid, ladda i mer än sex timmar.
2. Använd originaladaptorn för att undvika skada på delar.
3. Använd fuktig och ren mjuk trasa för att rengöra denna enhet, och torka sedan med torr trasa för att avlägsna vattnet.
4. Tvätta inte eller förvara inte i hög temperatur eller högt tryck.
5. Urladdat batteri: hantera enligt relaterade bestämmelser, kassera inte med annat hushållsavfall.
6. Lägga enheten i lådan när du slutat använda den.
7. När glaset är smutsigt, rengör med mjuk trasa eller hårborste.
8. Använd alkohol för att rengöra optiskt glas och justera skruvdelarna;

9. Efterförsäljning

Garantitid: 12 månader efter inköp. Batteriets garantitid: 3 månader efter inköp.

Under garantitiden erbjuder vi gratis korrigerings och utbyte, i fall att produkten används och underhålls korrekt, om fel uppstår som orsakats av produktens kvalitet.

Fritt underhåll ges inte under följande förhållanden:

1. Fel på grund av installationsfel och fel drift.
2. Skada på grund av demontering av underhållstekniker som inte auktoriserats av vårt företag.
3. Skada på grund av kundens felaktiga förvaring och underhåll.
4. Fel och skada orsakade av force majeure.
5. Luppen är ömtålig, ingen garanti.

10. Arbetsvillkor

1. Miljötemperatur: 5 °C~40 °C
2. Relativ fuktighet: ≤ 80 %
3. Atmosfärtryck: 50 kPa~106 kPa



Symboler			
	Medicinteknisk produkt i överensstämmelse med Förordning (EU) 2017/745		Produktkod
	Varsamhet: läs anvisningarna (varningar) noga		Satsnummer
	Följ bruksanvisningen		Tillverkare
	Förvara på svalt och torrt ställe		Skyddas från solljus
	Avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)		Klass II tillämpad
	Tillverkningsdatum		Medicinteknisk produkt
	Importerad av		Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen



Bortskaffande: *Produkten får inte bortskaffas med annat hushållsavfall. Användarna ska bortskaffa utrustningarna som ska skrotas, genom att ta dem till en uppsamlingsplats, som anges för återvinning av elektriska och elektroniska utrustningar.*

GIMA GARANTIVILLKOR

12 månaders garanti från avsändningshamn.