



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

CASCHETTO 2 LED CON 5 LENTI

**2 LED HEADBAND ILLUMINATED MAGNIFIER
WITH 5 LENSES**

**LOUPE LUMINEUSE FRONTALE 2 LED
AVEC 5 LENTILLES**

LUPA ILUMINADA FRONTAL 2 LED CON 5 LENTES

**LUPA COM FAIXA DE CABEÇA, ILUMINADA
POR 2 LED, COM 5 LENTES**

2-LED-KOPFBANDLUPE MIT 5 LINSEN

**2 PANNBAND FÖRSTORINGSGLAS MED LED-LJUS
MED 5 LINSER**

**ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ
2 LED με 5 φακούς**

REF MG8001-H (GIMA 31168)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante /
Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής / Tillverkare
NINGBO ANMAS OPTOELECTRONIC CO., LTD
A-1507, Sunshine International, Yuyao, Zhejiang, China
Made in China

Importato da/Imported by/ Importé par/
Importiert von/ Importado por/ Importado por/
Εισάγεται από:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com


CE



2 PANNBAND FÖRSTORINGSGLAS MED LED-LJUS MED 5 LINSER

(Med bärbar avtagbar LED-ljuskälla och 11 typer av förstoringar)


Tack för att du köpt detta multifunktionella tvåvägsreglerade huvudförstoringsglas med det senaste patentet! Denna produkt kan användas för fiske, läsning, trädgårdsskötsel, mekanisk bearbetning, elektroniskt underhåll etc. Läs denna instruktion noggrant för att säkerställa korrekt användning.

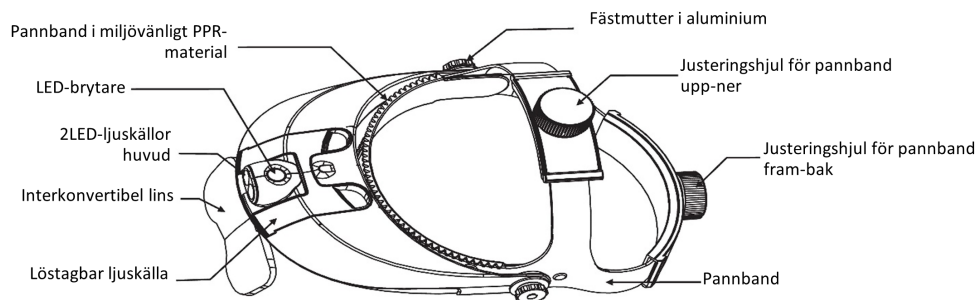


Huvudsakliga egenskaper:

1. Vanligt huvudburet förstoringsglas tillämpar fram-bak justeringsläge. Långvarig användning av förstoringsglas kan orsaka visst tryck på öronen och göra öronen smärtsamma. Detta pannband använder tvåvägsreglering för att lösa ovanstående problem.
2. Pannbandets läderhölje på det vanliga pannbandsförstoringsglas är gjort av PVC-konstläder, som lätt härdar i kallt vinterväder och är lufttät i varmt sommarväder, vilket orsakar obehag. Pannbandshöljet på denna produkt är utformat i ett steg av miljövänlig PPR, och halvfärisk design på dess yta är luftgenomsläpplig och bekväm. Pannbandshöljet har heller ingen skärkant.
3. Vanligt huvudförstoringsglas är endast försett med fyra utbytbara linser. Men detta huvudförstoringsglas har fem linser (med olika förstoringar), vilket kan säkerställa 11 olika förstoringar och bredare användningsområde.


Så här använder du den bärbara avtagbara ljuskällan:

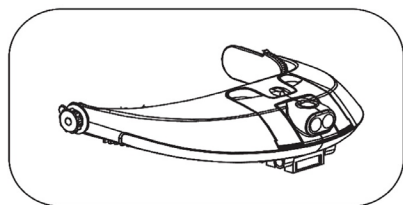


Ljushållaren kan inte roteras när ljuskällan inte är utdragen;

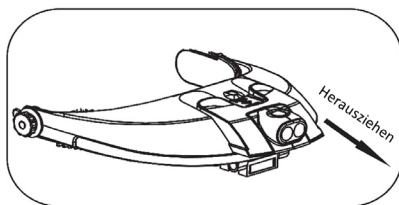

Tryck på två konkava fläckar på ljuskällan med fingret och dra sedan ut ljuskällan något

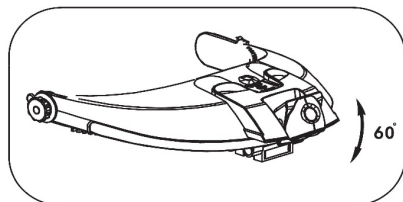

Nu kan LED-ljushållaren vridas upp och ned;

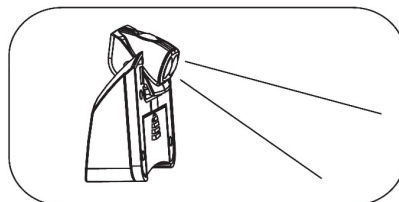

Ljuskällan kan användas separat som ljuskälla efter demontering


Installation och demontering av lins:

1. Installation av lins


- Torka av linsens yta med mjukt rent papper eller en duk för att undvika att skrapa linsens yta;
- Placera linsens konvexa yta utåt, och den platta ytan mot ögonen;
- Det krävs endast att föra in en sida av linsen (med kurvad yta) nedåt för att föra in i linsens håll.

2. Demontering av linsen: utför denna proceduren i omvänd ordning.

3. Vid frekvent installation och demontering av linsen, vänligen placera eller flytta linsen parallellt; annars kan den övre delen av linsen lätt skadas om den placeras slumpmässigt efter att den tagits ut.

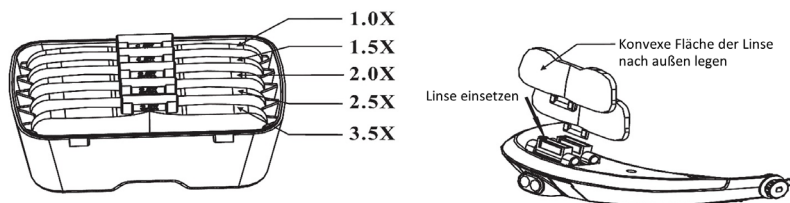


Lins med 5 typer av förstoringar

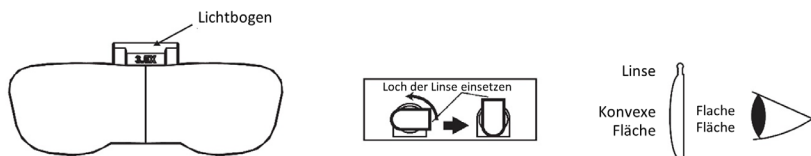


Metod för justering av pannbandet:


1. Var god vrid huvudjusteringsvredet (A) till lämpligt område vid justering av huvudstorleken.
2. Och vrid hög-låg justeringsvredet (B) till lämpligt vid tillfället för justering av pannbandets höjd.
3. Fästmutter i aluminium (C) kan justera linsernas upp-och-ner positioner
- 4.

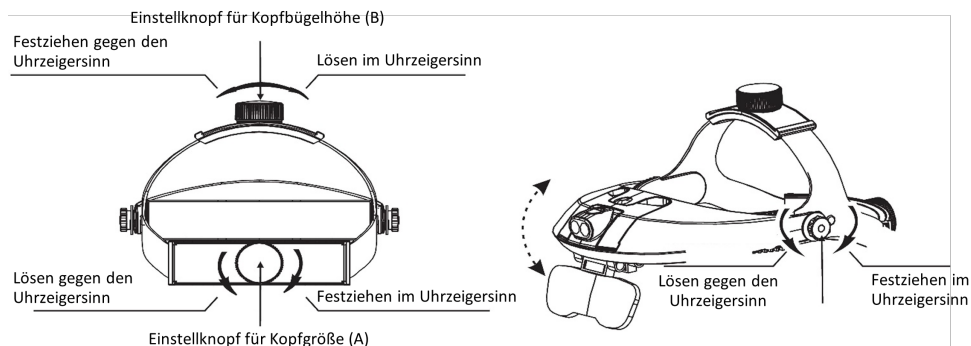

Utbyte av lins:

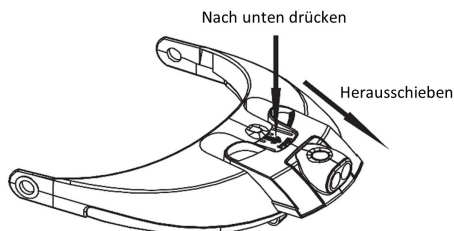


Tryck ner knoppen markerad PUSH, tryck ut ljuskällan

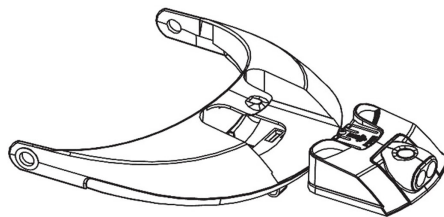

Ta ut ljuskällan

Drücken Sie die Batterieabdeckung

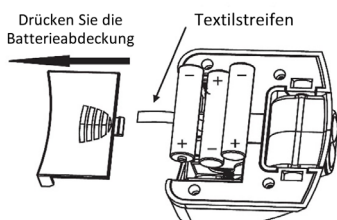

1. Batteriläckage, värme och sprickor är en av orsakerna till felfunktion och skador på LED-lamporna;
2. Vänligen använd inte batterier av olika storlek, form och prestanda;
3. Var god tag ut batterierna när LED-lampan inte används under en lång tid

Tryck batterilocket utåt enligt pilens riktning, dra tygremsan uppåt och ta ut 3 uttjänta batterier och sätt i nya batterier

Förstorngar	Avstånd till det granskade objektet
1.0x	300~350 mm
1.5x	240~ 260 mm
2.0x	215~ 235mm
2.5x	205~ 225mm
3.0x	160~ 180mm
3.5x	135~ 145mm
4.0x	125~13 5mm
4.5x	110~ 130mm
5.0x	100~ 120mm
5.5x	80~ 95mm
6.0x	60~ 85mm

Förstorngar av lins:









1. Förstorngar av lins med enkel platta är 1.0X, 1.5X, 2.0X, 2.5X, 3.5X.
2. Förstorngar av lins med dubbel platta är 3.0X, 4.0X, 4.5X, 5.0X, 5.5X, 6.0X.
3. Förstorngarna är markerade mitt på linsen.
4. Höger tabell visar avståndsproportionen mellan förstorngar och granskat objekt

GARANTIVILLKOR GIMA

Man tillämpar standard garanti B2B Gima på 12 månader



Bortskaffande: Produkten får inte bortskaffas med annat hushållsavfall.
Användarna ska bortskaffa utrustningarna som ska skrotas, genom att ta dem till en uppsamlingsplats, som anges för återvinning av elektriska och elektroniska utrustningar

	<p>IT - Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB - Caution: read instructions (warnings) carefully FR - Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) ES - Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente PT - Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente DE - Achtung: Anweisungen (Warnings) sorgfältig lesen SV - Varsamhet: läs anvisningarna (varningar) noga GR - Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενοστάσεις)</p>
	<p>IT - Codice prodotto GB - Product code FR - Code produit ES - Código producto PT - Código produto DE - Erzeugniscode SV - Produktkod GR - Κωδικός προϊόντος</p>
	<p>IT - Numero di lotto GB - Lot Number FR - Numéro de lot ES - Número de lote PT - Número de lote DE - Chargennummer SV - Satsnummer GR - Αριθμός παρτίδας</p>
	<p>IT - Data di fabbricazione GB - Date of Manufacturing FR - Date de fabrication ES - Fecha de fabricación PT - Data de fabrico DE - Herstellungsdatum SV - Tillverkningsdatum GR - Ημερομηνία παραγωγής</p>
	<p>IT - Conservare in luogo fresco ed asciutto GB - Keep in a cool, dry place FR - À conserver dans un endroit frais et sec ES - Conservar en un lugar fresco y seco PT - Armazenar em local fresco e seco DE - An einem kühlen und trockenen Ort lagern SV - Förvara på svalt och torrt ställe GR - Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον</p>
	<p>IT - Conservare al riparo dalla luce solare GB - Keep away from sunlight FR - À conserver à l'abri de la lumière du soleil ES - Conservar al amparo de la luz solar PT - Guardar ao abrigo da luz solar DE - Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern SV - Skyddas från solljus GR - Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία</p>
	<p>IT - Smaltimento RAEE GB - WEEE disposal FR - Disposition DEEE ES - Disposición WEEE PT - Disposición WEEE DE - Beseitigung WEEE SV - Avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) GR - Διάθεση WEEE</p>
	<p>IT - Prodotto conforme alla Direttiva Europea GB - Product complies with European Directive FR - Ce produit est conforme à la directive européenne ES - Producto conforme a la Directiva Europea PT - Produto em conformidade com a Diretiva Europeia DE - Produkt gemäß EU-Richtlinie SV - Produkt som överensstämmer med EU-direktiv GR - Προϊόν σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Οδηγία</p>