



# Littmann® CORE Stethoscope

Connects to Eko Software

Eko

3M



en	English	pp. 1	sl	Slovenski	pp. 33
fr	Français	pp. 3	et	Eesti	pp. 35
de	Deutsch	pp. 5	lv	Latviesu	pp. 37
it	Italiano	pp. 7	lt	Lietuviskai	pp. 39
es	Español	pp. 9	ro	Romana	pp. 41
nl	Nederlands	pp. 11	hr	Hrvatski	pp. 43
sv	Svenska	pp. 13	bg	Български	pp. 45
da	Dansk	pp. 15			
no	Norsk	pp. 17			
fi	Suomi	pp. 19			
pt	Português	pp. 21			
el	Ελληνικά	pp. 23			
pl	Polski	pp. 25			
hu	Magyar	pp. 27			
cs	Čeština	pp. 29			
sk	Slovensky	pp. 31			

# 3M™ Littmann® CORE digitalt stetoskop

## Snabbstartsguide

Ladda ner Eko-Appen från Apple App Store® eller Google Play Store®.

Slå på Bluetooth® trådlösa teknologin på din mobiltelefon eller surfplatta, starta appen och slå på CORE-stetoskopet.

Eko


SV

## I boxen

- Eko CORE digitaltillbehör och 3M™ Littmann® Cardiology IV™ stetoskop
- Ytterligare sats med 3M Littmann Öronoliver som sitter sätt och har en mjuk tätning (liten)
- Klockskydd på bröststycket för att isolera mot kyla
- USB-laddningskabel
- Snabbstartsguide

## Öronoliver

Sätt i öronoliverna i en framåtgående riktning.

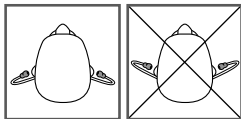

## Volym

Använd knapparna (+) och (-) för att reglera volymen. Det finns sju volymsteg.

## Sätta På och stänga Av

När CORE-stetoskopet är avstängt, fungerar det som ett stetoskop utan ljudförstärkning.

Tryck in strömbrytaren för att sätta på CORE-stetoskopet. Lampan börjar blinka. Du kommer nu att höra ljudet förstärkt och filtrerat i öronoliverna.

## Telemedicin och AI-funktioner

Eko erbjuder telemedicin och AI-funktioner som kräver ett programabonnemang (säljs separat där det finns tillgängligt).

Du kan ställa in prenumerationen online på [www.ekohealth.com](http://www.ekohealth.com)

## Aktiv brusreducering

CORE-stetoskopet innehåller en aktiv brusreduceringseffekt för att ta bort omgivande brus i omgivningen. Den aktiva brusreduceringen kan stängas av eller sättas på via Eko-appen.



## Meddelanden

(@) (blinker)

CORE-stetoskopet är på och söker enhet

● (gul)

CORE-stetoskopet är avstängt och laddas

(●●) (gul)

CORE-stetoskopets batteriladdning är låg

○

CORE-stetoskopet är på och anslutet

● (grön)


CORE-stetoskopet är fullständigt laddat

(●●) (blå)

CORE-stetoskopet håller på att spela in

## Inspelning

När du är ansluten till Eko-appen, tryck på (o)-knappen för att starta inspelningen.

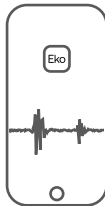

## Laddar

Anslut mikro-USB-kabeln till CORE-stetoskopet och använd en UL-certifierad eller CE-märkt 5 V USB-väggsladdare. Det tar cirka två timmar för att ladda CORE-stetoskopet helt. Lampan blir grön när laddningen är fullständig.

## Bruksanvisning

Läs bruksanvisningen noga innan du använder ditt Littmann CORE-stetoskop. Besök följande webbplats för att visa bruksanvisningen:

[www.ekohealth.com/getstarted](http://www.ekohealth.com/getstarted)

För mer information om 3M-enheter, besök [HCBRegulatory.3M.com](http://HCBRegulatory.3M.com)

## Service och support

I USA, besök webbplatsen [www.littmann.com/service](http://www.littmann.com/service) eller ring 1-800-228-3957. Om du befinner dig utanför USA, besök webbplatsen [www.littmann.com](http://www.littmann.com) för kontaktinformation till ditt lokala 3M-kontor.

SV

Apple App Store är ett varumärke som tillhör Apple Inc.  
Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC.

Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör

Bluetooth SIG  
LBL 143 Rev B

System assembled by 3M Company



**3M Deutschland GmbH**  
Health Care Business

[www.littmann.com](http://www.littmann.com)



Made in USA with  
Globally Sourced Materials

**3M Company**  
2510 Conway Ave.  
St. Paul, MN 55144 USA

**MD**

**CE**

EC REP **3M Deutschland GmbH**  
Health Care Business  
Carl-Schurz-Str. 1  
41453 Neuss, Germany



Made in Malaysia

**Eko Devices, Inc.**  
1212 Broadway, Suite 100  
Oakland, CA 94612 USA

**MD**

**CE**

**0537**

EC REP **Emergo Europe**  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

©2020 3M; Eko Devices Inc. All rights reserved.

3M, Littmann, the L Littmann logo, the L, and Cardiology IV are marks and/or registered marks of 3M.  
Unauthorized use prohibited.

Eko trademarks, including CORE, are marks and/or registered marks of Eko Devices Inc.

Issue Date: 2020-11  
34-8726-3344-0