

ECG Electrodes

Instructions for use

These instructions for use are intended for the following
Ambu ECG electrodes: L, M, N, P, Q, QR, R, SP, SU, T, VL and VLC.

Instructions for use

Инструкции за употреба

Návod k použití

Brugervejledning

Bedienungsanleitung

Οδηγίες χρήσης

Instrucciones de uso

Kasutusjuhend

Käyttöohjeet

Mode d'emploi

Upute za upotrebu

Használati útmutató

Istruzioni per l'uso

使用説明書

Naudojimo instrukcija

Lietošanas pamācība

Gebruiksaanwijzing

Bruksanvisning

Instrukcja użycia

Instruções de utilização

Instrucţiuni de utilizare

Инструкция по применению

Návod na použitie

Navodila za uporabo

Bruksanvisning

Kullanım talimatları

使用说明



Bruksanvisning

EKG-elektroder

SV

1.0 Avsedd användning

Elektroden appliceras på kroppens yta i syfte att sända de elektriska signalerna vid kroppsytan till en registrerings- och övervakningsanordning som genererar ett elektro- eller vektorkardiogram.

1.1 Kontraindikationer

Inga kända.

1.2 Varningar och försiktighetsåtgärder

Varningar

- Ytelektroder får endast appliceras på oskadad, rengjord hud (dvs. inte på öppna sår, eller skadad, infekterad eller inflammerad hud).
- Endast för engångsbruk. Om produkten återanvänds kan det orsaka kontamination vilket kan leda till infektioner.

Försiktighet

- Under kirurgiska ingrepp ska elektroder placeras så långt bort som möjligt från det elektrokirurgiska området för att minimera oönskat flöde av RF-ström som kan orsaka brännskador på huden.
- Elektroder får endast användas av eller i samråd med en vårdgivare med kännedom om hur de ska placeras och användas.
- Elektroderna får inte blötäggas, sköljas eller steriliseras eftersom dessa processer kan lämna kvar skadliga rester eller leda till att elektroden inte fungerar.
- För att minimera risken för hudirritation vid byte av

- När du har lossat elektroden från skyddsarket ska du slänga det i en lämplig avfallsbehållare.
- Undantag för SU-00-C: Avlägsna elektroden från patienten vid MRT eftersom den kan orsaka brännskador på patientens hud.

- elektroder ska de nya placeras på ett annat hudområde.
- Elektroder kan skada huden om de avlägsnas ovarsamt.
- Enligt gällande lagstiftning i USA får denna utrustning endast försälas till läkare eller på beställning av läkare.
- Elektroder som saknar ansluten kabel får endast användas med kablar som överensstämmer med SS-EN/IEC 60601-1.
- Endast för SU-00-C: Vid MRT får elektroder endast användas med MRT-godkända kablar.

1.3 Potentiellt negativa händelser

Potentiellt negativa händelser i samband med användning av ytelektroder är hudreaktioner som exempelvis brännskada, rodnad, irritation och små blåsor.

1.4 Allmänna observanda

Om allvarliga negativa händelser eller tillbud har inträffat vid användning av denna enhet eller på grund av att den har använts ska detta rapporteras till tillverkaren och till Läkemedelsverket.

2.0 Förklaring av använda symboler

Symboler för Ambu EKG-elektroder	Betydelse	Symboler för Ambu EKG-elektroder	Betydelse	Symboler för Ambu EKG-elektroder	Betydelse
	Medicinteknisk produkt		Skumplast		Mikroporös
	Tillverkningsland		Vät gel		Polymer
	Röntgengenomsläpplig		Elsäkerhet: typ BF, applicerad del		
	MR-villkorlig. Statiskt magnetfält på 1,5 och 3 tesla, med ett maximalt spatialt gradientfält på 12 900 G/cm eller 129 T/m. Maximal specifik absorptionsnivå (SAR), medelvärde för hela kroppen (WBA), på 2 W/kg (maximal temperaturökning 2,2 °C (1,5 tesla) och 1,5 °C (3 tesla)) eller 4 W/kg (maximal temperaturökning 4,4 °C (1,5 tesla) och 3,1 °C (3 tesla)) vid 15 minuters bildtagning.				

3.0 Bruksanvisning

- Rengör vid behov appliceringsområdena med mild tvål och vatten och torka noga.
- Endast vuxna individer: Klipp vid behov av hår på mycket håriga områden. Skrubba bara försiktigt om hudimpedansen är för hög.
- Korrekt placering av elektroden avgörs i normala fall av sjukhuset/läkaren och/eller sjukhusets regler/procedurer.
- Skyddsark kan ha vassa hörn, så var därför försiktig när elektroden tas upp ur påsen. Dra loss elektroden från skyddsarket och placera den på huden. Kasta skyddsarket så fort du har tagit loss elektrodena.
- Vid användning av elektroder med kontakter eller redan anslutna kablar ska kontakten eller kablarna placeras så att alla kablar löper i samma riktning, mot utrustningen.
- Placera elektroden på huden genom att försiktigt trycka runt den självhäftande kanten med jämna och fasta cirkulära rörelser.
- Anslut kabeln från EKG-apparaten till elektroden. Om elektroden är försedd med en redan ansluten kabel kan den anslutas direkt till EKG-apparaten.
- Avlägsna elektroden: Lyft försiktigt fliken eller hörnet på elektroden och dra sakta loss elektroden så tätt intill huden som möjligt. Håll emot huden där elektroden suttit till dess att elektroden har avlägsnats helt. Se till att elektroden hålls tätt intill huden medan den dras bakåt över sig själv. Undvik att avlägsna elektroden i en 45-gradig vinkel, för att minimera risken för mekanisk skada.
- Självhäftande elektroder bör bytas ut om de inte längre går att fästa ordentligt mot huden.
- Gelrester kan avlägsnas med pappershanddukar eller vatten.
- Elektroder i en öppnad påse kan torka ut. Öppna därför inte påsen förrän det är nödvändigt.
- Elektroden är avsedd för engångsbruk och ska kasseras i enlighet med sjukhusets vedertagna rutiner.

4.0 Appliceringstid (i timmar)

Artikelnummer	Gelsystem	Vidhäftningssystem	Sensormaterial	Patientindikation	Appliceringstid
L	Vät gel	Akryl	Ag/AgCl (silver/silverklorid)	Vuxna	72
M	Vät gel	Akryl	Ag/AgCl (silver/silverklorid)	Vuxna	24
N	Vät gel	Akryl	Ag/AgCl (silver/silverklorid)	Barn	24
P	Vät gel	Akryl	Ag/AgCl (silver/silverklorid)	Barn	24
Q	Vät gel	Akryl	Ag/AgCl (silver/silverklorid)	Vuxna	24
QR	Vät gel	Akryl	Ag/AgCl (silver/silverklorid)	Vuxna	24
R	Vät gel	Akryl	Ag/AgCl (silver/silverklorid)	Vuxna	24
SP	Vät gel	Akryl	Ag/AgCl (silver/silverklorid)	Vuxna	24
SU	Vät gel	Akryl	Ag/AgCl (silver/silverklorid)	Vuxna	24
T	Vät gel	Akryl	Ag/AgCl (silver/silverklorid)	Vuxna	24
VL	Vät gel	Akryl	Ag/AgCl (silver/silverklorid)	Vuxna	72
VLC	Vät gel	Akryl	Ag/AgCl (silver/silverklorid)	Vuxna	72