

Bruksanvisning

SVENSKA

HEINE Classic+® och SANALON+® fiber optik laryngoskopblad.

Var god läs noga igenom dessa instruktioner före användning av HEINE laryngoskopblad. Spara anvisningarna för framtida behov.

Säkerhetsinformation

Användningsområde: Laryngoskopbladen är designade speciellt för endotrakeal intubation. De bör endast användas av personer som fått träning i endotrakeal intubation.

Användningssäkerhet: Använd endast laryngoskophandtag med ett grönt identifikationsmärke för att försäkra att instrumentet fungerar korrekt. Fäll upp bladet i normalt arbetsläge och kontrollera att ljusstyrkan är korrekt. Använd inte laryngoskopet i närheten av starka magnetfält (ex magnetröntgen).

Ljusstyrkan kan minska under användning om det uppladdningsbara batteriet inte var tillräckligt uppladdat före användning. Vi rekommenderar minst 10 minuters laddning för uppladdningsbara batterier som laddas med laddare från HEINE. Efter några minuters användning kommer glödlampen i laryngoskopet att vara varm.

Generell säkerhet: För att undvika överföring av infektioner måste laryngoskopet rengöras och desinficeras eller steriliseras efter varje användning (se instruktioner för rengöring).

Om laryngoskopet används regelbundet rekommenderar vi att reservlampor, batterier och instrument finns tillhanda.

Rengöring, desinfektion och sterilisering

Följande instruktioner måste inkorporeras i sjukhusets eller klinikens användningsprocedurer. Nationella riktlinjer och reglementen (t.ex. gällande CJK / vCJK) samt relevanta standarder och lagar måste efterföljas. Dessa användningsprocedurer måste utföras av lämpligt kvalificerad personal.

Procedur efter användning

Ta bort alla spår av kontaminering omedelbart efter användning för att undvika intorkning.

Manuell rengöring/desinfektion

Använd endast rengöring och desinfektionsprodukter vilka rekommenderas av tillverkaren för användning till fiberoptik och plast (endast **SANALON+®**). Följ tillverkarens instruktioner angående koncentration och tid exakt. Efter denna process, skölj bladen med avmineraliserat vatten och försäkra dig om att det inte finns kvar några avlagringar på dem.

Varning: Användande av felaktiga rengörings- eller desinfektionsprodukter eller rengöringsmetoder kan orsaka irreparabel skada på laryngoskopet.

Ultraljudsrengöring är inte tillåten!

Automatisk rengöring/desinfektion

Laryngoskopet kan rengöras eller desinficeras med värme upp till 93 °C i en automatisk maskin. Använd endast rengöringsprodukter, vilka rekommenderas för användning till rostfritt stål och plast (endast **SANALON+®**). Avsköljningen måste tillförse att det inte finns avlagringar kvar av produkten. Använd endast avmineraliserat vatten för den slutliga sköljningen.

Sterilisering

Bladen kan ångsteriliseras med mättad ånga vid 134 °C i 5 minuter. Sterilisering under 18 minuter är även möjligt. Det kan uppstå en reducering i ljustransmission vid upprepad långtids-ångsterilisering, särskilt om ångkvaliteten inte är idealisk. Alla funktionalitetskontroller ska inkludera denna faktor.

Gas-plasmasterilisering är enbart för **HEINE Classic+® F.O. laryngoskop**.

Tillämpade standarder: EN ISO 7376

Garanti

Vi lämnar garanti på dessa laryngoskop i fem år, upp till 4000 autoklaveringsperioder på 134 °C / 5 minuter från inköpsdatum. Vi garanterar en funktionell produkt under förutsättning att den används på det sätt som tillverkare och instruktionsblad föreskriver. Fel som uppstår under garantitiden kommer att åtgärdas utan att kunden debiteras, under förutsättning att felet uppkommit på grund av fel i material, design eller produktion. Vid åberopande av defekt produkt under garantitiden skall köparen bevisa att defekten fanns då produkten levererades. Vi lämnar inte någon som helst garanti för defekter som uppkommit på grund av felaktigt användande eller vid nyttjande av icke-original HEINE tillbehör och reservdelar. Garantin gäller heller inte reparationer och/eller modifieringar gjorda av person som inte är auktoriserad av HEINE, eller när kund inte följer de anvisningar som levererats med produkten. Modifiering av en HEINE produkt med delar eller tillbehör som inte överensstämmer med de ursprungliga HEINE specifikationerna innebär att garantin för produkten och produktens korrekta funktion upphör. Övriga ansökningar för ersättning, särskilt ersättning för skada ej direkt relaterad till HEINE produkten, är exkluderade.

För **reparationer**, var vänlig kontakta den återförsäljare som kan returnera varorna till oss eller våra auktoriserade agenter.

Köpt hos

Datum



CE 93/42/EWG/CEE/EEC