

## SE BRUKSANVISNING:

Öppna förpackningen och ta ur kompressen. Lägg på kompressen på skadan och håll över resterande gel från påsen. Fixera kompressen löst med fixérbinda. Låt sitta på max 3 timmar. Gel produkter: Applicera gelen rikligt över skadan. Gnid inte!

### **Kemiska brännskador**

Skölj med vatten eller neutraliserande vätska enligt föreskrift för den aktuella kemikalien. Då skadan är helt fri från kemikalien kan behandling med BurnFree påbörjas för lindring.