



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

CALZE A COMPRESSIONE FUNNY
FUNNY COMPRESSION SOCKS
CHAUSSETTES DE COMPRESSION FUNNY
CALCETINES DE COMPRESIÓN FUNNY
MEIAS DE COMPRESSÃO FUNNY
FUNNY KOMPRESSIONSSTRÜMPFE
ΑΣΤΕΙΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
FUNNY KOMPRESSIONSSTRUMPOR
FUNNY SKARPETKI UCISKOWE

Cat. No. 6115100000 (GIMA 41200)
6115100000 (GIMA 41201)
6115100000 (GIMA 41205)
6115100000 (GIMA 41206)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής
/ Tillverkare / Producent
Shanghai Amigo Textile Co., Ltd.
Room 301, Lane 222, Yehui Road,
Qingpu District, Shanghai
Made in China

BRUKSANVISNING

Kompressionsstrumpor

Tack för att du valt en Shanghai Amigo produkt. Våra produkter är synonym med komfort och personligt välbefinnande. Den behagliga känslan av lätthet och välbefinnande erhålls tack vare den dynamiska effekten av produktens graderade kompression. Kompressionen minskar från fotleden och uppåt.

Hälsektionen ger:

- Korrekt placering av hälen i hälfickan ger därmed större stabilitet.
- Korrekt placering vid maximal kompressionspunkt, samt bättre passform och större bärbarhet och elasticitet runt fotledens omkrets.

Shanghai Amigo produkterna är inte medicinsktekniska enheter. De är särskilt effektiva för att lindra känslan av tyngd och trötthet i benen.

Instruktioner och rekommendationer för användning av kompressionsstrumpor

Det rekommenderas att ta på kompressionsstrumporna så snart du kommer upp på morgonen.

Kompressionsstrumporna ska skyddas mot kontakt med eventuella oljor, krämer eller smörjmedel som används på benen av medicinska eller kosmetiska skäl.

Grova naglar eller ringar med vassa kanter kan potentiellt skada produktens väv.

Om huden är våt, applicera talk på foten för att underlätta införandet av den i strumporna.

1. Vänd strumpor ut och in, med undantag för fotdelen. Det är bäst att vända strumpor ut och in till den grad att hälen förblir utanför.
 - Använd båda händerna för att vidga fotdelen och skjut in foten i strumporna upp till hälen.
 - Vik tillbaka strumpornas ut och in, var noga med att placera hälen korrekt.
2. För in resten av benet upp till knät, släta ut väven med handflatan. Dra aldrig direkt i strumpornas överkant.
 - I händelse av strumpbyxor, följ samma procedur som beskrivits ovan tills strumpbyxan når i nivå med knät på båda benen.
3. Rulla den återstående delen av strumpbyxan uppåt till grenen, släta ut väven med händerna och kontrollera att kompressionen är enhetlig.

Allmänna kontraindikationer

Avancerat tillstånd av perifer arteriell ocklusiv sjukdom - Massiva ödem i de nedre extremiteterna av patologisk karaktär - Septisk flebit - Svår flebit, såsom phlegmasia cerulea dolens - Lymfangit - Avancerade perifera neuropatier (d.v.s. diabetes mellitus) - Andra sensoriska störningar i armar och ben - Intoleranser/allergier relaterade till materialet i kompressionsstrumporna.

Relativa kontraindikationer

Sår och öppna sår - Fuktig dermatos - Orörlighet - Dermatitstas - Valvulär inkontinens i det ytliga och djupa vensystemet. - Djup ventrombos eller akut tromboflebit - Post-tromboflebitsyndrom - För strumpor med silikonkanter kan hudirritation uppstå vid överkänslighet mot själva materialet

Särskilda varningar

Shanghai Amigo kompressionsstrumpor ska användas endast efter läkares rekommendation.

I händelse av att smärta eller hudirritation skulle uppstå när du bär kompressionsstrumpor, ta av strumporna omedelbart och kontakta en läkare eller din återförsäljare.

Materialets sammansättning

Nylon 65% - polyester 30% - spandex 5%

Tillgängliga storlekar: small – medium – large – extra large

Tvättråd

Strumporna kan tvättas för hand eller i tvättmaskin.

- Handtvätt: använd tvättmedel för ömtåliga material. Skölj noggrant. Vrid inte. Lufttorka.
- Tvättmaskin: placera plagget i en lämplig påse eller i ett örngott. Blek inte. Maskintorka inte.

- Kemtvätta inte. Stryk inte.



Varning

Tillverkaren tar inget ansvar för eventuella personsador och/eller egendomssador som kan uppstå i händelse av att produkten används felaktigt eller för andra ändamål än de som den är avsedd för.

GARANTIVILLKOR GIMA

Man tillämpar standard garanti B2B Gima på 12 månader.