

LÄS ALLA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING. KONSULTERA LÄKARE FÖRE ANVÄNDNING.

KOTNRAINDIKATIONER: Inte avsedd för personer med vikt över 242 lbs (110 kg) - Inte avsedd för isiga eller hala tillstånd. - Inte avsedd för personer med latex-allergier.

VÄGLEDNING: För att fälla ut din käpp, håll i handtaget och låt de vikbara skaftsegmenten fällas ut mot golvet. För att förhindra fall bör du alltid kontrollera att de enskilda axelsegmenten (bild 1) är ordentligt låsta på plats.

WARNING Demontera INTE käppens kropp. Käppen har ett elastiskt snöre inuti. Okontrollerat utsläpp av det elastiska snöret inuti kan orsaka allvarliga skador på oskyddade kroppsdelar, särskilt ögonen. Om det elastiska snöret skärs av, slits eller skadas, avbryt användningen.

STRÄCK INTE snöret mer än nödvändigt för att demontera eller montera segmenten.

SA HÄR JUSTERAR DU HÖJDEN PÅ DIN KÄPP: Lossa vriddåset genom att vrida det medurs flera varv. Tryck ner låsknappen och dra upp handtaget för att förlänga det, eller tryck ner handtaget för att förkorta det. Kom ihåg att dra åt vriddåset efter att du har justerat käppen till önskad höjd.

WARNING För att förhindra fall, se alltid till att de enskilda skaftsegmenten är ordentligt låsta på plats och att låsknappen är helt engagerad. Se alltid till att käppens svängbara fot är ordentligt fastskruvad på käppen för att undvika fall.

FÖR ATT FÄLLA IHOP KÄPPEN: Din käpp är enkelt fällbar till en bekväm reserestorlek genom att separera de 4 individuella skaftsegmenten från varandra. Håll varje uppsättning skaftsegment nära leden och dra isär dem. De enskilda skaftsegmenten kommer att vikas ihop snyggt.



SA HÄR ANVÄNDER DU LAMPORNA PÅ DIN KÄPP: Knappen på ovanpå käpphandtaget aktiverar lamporna. Genom att trycka på knappen en gång aktiveras lamporna på käppens framsida. Genom att trycka igen tänds även den röda lamporna vid basen av handtaget. Genom att trycka en tredje gång släcks de. Framlampan kan roteras för att rikta ljuset dit du behöver det.

SOS-SIGNAL: För att aktivera SOS-signalen, tryck på knappen på handtagets sida. Lamporna vid basen blinkar och käppen avger ett larm ljud.

BATTERIBYTE: Öppna batterilocket på baksidan av handtaget. Ta bort alla uttjanta batterier och kassera dem på rätt sätt. Använd 2 AAA-batterier och sätt i dem med rätt polaritet (pluspolen utåt där fjädern sitter). Stäng batterilocket. Kontrollera regelbundet batterinivån för tecken på slitage, inklusive eventuell fränsning av det elastiska snöret eller slitage på gummifötterna. Om du ser tecken på slitage, sluta använda det omedelbart.

WARNING Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda inte alkaliska, standardbatterier (kol-zink) eller laddningsbara batterier (nickel-kadmium).

GIMA GARANTIVILLKOR: Gima 12-månaders standardgaranti B2B gäller.

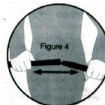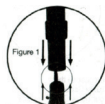

Gima 43050 - 43052

REF GB-806(1FOOT) GB-806(SKID PROOF)

Fabbricato da/Manufactured by/Fabrique par/Fabricado por/Hergestellt von/
Fabricado por/Κατασκευάστηκε από/Произведено от/У виробчі/Фremstillet af/
Tootaja/Vaimistaja/Proizvoditel/Gyártó/Razots/Gamintojas/Produziert av/
Geïfabriceerd door/Wyprowadzowane przez/Fabricat de/Vyrába/Proizvajalec/
Tilverlad av/تولید شده با/تولید شده با
Ningbo Gaobo Sports Co., Ltd
No.1, Xiajin, Dali, Shenzhen Town, Ninghai County
Ningbo 315514, China
Made in China

importato da/imported by/importé par/importado por/importiert von/
importado por/Εισαγυγί από/Ввезено от/Dovezeno uvozelem/importeret
af/importörja/ Tuojä/Uvezeno od strane/importälta/importörja/importavo/
importiert av/Geimporteerd door/importowane przez/importat de/Dovážal/
Uvozi/importerad av/مستورد بواسطة
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

