



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

---

***DEAMBULATORE A 4 RUOTE***  
***WALKING FRAME WITH 4 WHEELS***  
***DÉAMBULATEUR 4 ROUES***  
***ROLLATOR MED 4 HJUL***



Det är nödvändigt att meddela tillverkaren och de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten, om alla allvarliga olyckor som inträffat i samband med den medicintekniska utrustning som levererats av oss.

### INTRODUKTION

Syftet med denna manual är att ge instruktioner för en normal och korrekt användning av hjälpmedlet av både patienten och hans/hennes assistent/följeslagare.

### AVSEDD ANVÄNDNING

Rollatorn har utformats och tillverkats för att användas inomhus av patienter med otillräcklig användning/stöd av de nedre extremiteterna. Den har avsikten att ge stöd till kroppen som, använd med båda armarna, bidrar till eller tillåter rörligheten som annars skulle vara omöjlig eller nedsatt.

**OBS!** Rollatorn är i första hand avsedd för inomhusanvändning och på plana ytor. Om det skulle vara nödvändigt att använda denna rollator utomhus, rekommenderar vi att iaktta trafikreglerna, som vilken fotgängare som helst.

Före varje användning måste man se till att:

- Gårmen har reglerats till rätt höjd.
- Doppskorna är i gott skick. Om de är slitna eller saknas måste man byta ut dem.
- Se till att gåramens ben har reglerats till samma höjd.

### UNDERHÅLL

Rollatorn kräver inte något särskilt underhåll för det ordinarie underhållet. Vi rekommenderar emellertid att regelbundet utföra:

- en kontroll av de olika komponenternas integritet
- kontroll att skruvar och muttrar är väl åtdragna
- kontroll av de mekaniska delarna i rörelse och, om nödvändigt, att smörja dem.
- rengöring med neutralt rengöringsmedel (använd inte frätande eller skadliga produkter) och lagring i en torr och genomluftad miljö.



### VARNINGAR!

Använd inte hjälpmedlet om du upptäcker skador eller avsaknad av delar. Använd inte för annorlunda avsikter än de för vilka detta hjälpmedel har projekterats. Kör inte över hinder eller på ojämna eller inte plana golv eller på golv som är våta eller hala. Användningen av anordningen avråds för personer med nedsatt funktion av händer eller armar.

Använd endast originaldelar. Användningen av tillbehör som inte är original kan medföra risk för fallolyckor och personskador. Får inte användas i trappor. Användningen av gårmen i vatten (duschar, badkar, simbassänger o.s.v.) kan leda till oxidering hos funktionsmekanismerna, vilket kan skada gårmen och/eller orsaka personskador.

Maximal belastning 100kg

### MONTERING

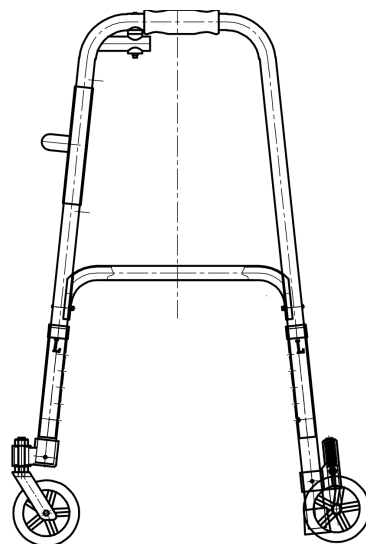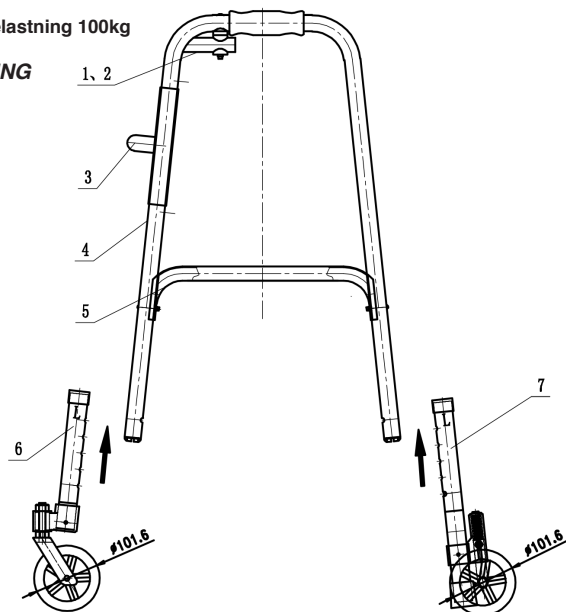

Montera den främre och bakre hjulgruppen enligt direktionen av pilen på bilden (obs: hjulgruppen är delad i vänster och höger).

| Nr | Namn                         | Specificeringar | Antal |
|----|------------------------------|-----------------|-------|
| 1  | Teleskopiskt rör             | Ø19             | 1     |
| 2  | Utvändigt teleskopiskt rör   | Ø22             | 1     |
| 3  | Rör "H"                      |                 | 1     |
| 4  | Ledstång                     | Ø25             | 2     |
| 5  | Klämt rör                    | Ø22             | 2     |
| 6  | Montering av den bakre foten |                 | 2     |
| 7  | Montering av den bakre foten |                 | 2     |

|               |   |            |   |
|---------------|---|------------|---|
|               | Tillverkare   |            | Förvara på svalt och torrt ställe             |
|               | Läs bruksanvisningen  |            | Skyddas från solljus                          |
| <b>REF</b>    | Produktkod  | <b>LOT</b> | Satsnummer                                    |
|               | Tillverkningsdatum  | <b>MD</b>  | Medicinteknisk produkt                        |
| <b>EC REP</b> | Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen                        |            | Varsamhet: läs anvisningarna (varningar) noga |
| <b>CE</b>     | Den medicintekniska produkten överensstämmer med förordning (EU) 2017/745 |            |   |

### GARANTIVILLKOR GIMA

Man tillämpar standard garanti B2B Gima på 12 månader.

## REF FS9128L (43130)



**Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory (LTD.)**  
5 Xingfu Road, Zone A, Shishan Industrial Park,  
Nanhai District, Foshan City, China, 528000  
Made in China



**MedNet EC-Rep GmbH**  
Borkstrasse 10. 48163 Muenster. Germany

Importato da / Imported by / Importé par / Importerad av:

**Gima S.p.A.**

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

