



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

***DEAMBULATORE A 3 RUOTE
ROLLATOR WITH 3 WHEELS
DÉAMBULATEUR 3 ROUES
ROLLATOR MED 3 HJUL***



Det är nödvändigt att meddela tillverkaren och de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten, om alla allvarliga olyckor som inträffat i samband med den medicintekniska utrustning som levererats av oss.

INTRODUKTION

Syftet med denna manual är att ge instruktioner för en normal och korrekt användning av hjälpmedlet av både patienten och hans/hennes assistent/följeslagare.

AVSEDD ANVÄNDNING

Rollatorn har utformats och tillverkats för att användas inomhus av patienter med otillräcklig användning/stöd av de nedre extremiteterna. Den har avsikten att ge stöd till kroppen som, använd med båda armarna, bidrar till eller tillåter rörligheten som annars skulle vara omöjlig eller nedsatt.

OBS! Rollatorn är i första hand avsedd för inomhusanvändning och på plana ytor. Om det skulle vara nödvändigt att använda denna rollator utomhus, rekommenderar vi att iakttä trafikkreglerna, som vilken fotgängare som helst.

Före varje användning måste man se till att:

- Gårampen har reglerats till rätt höjd.
- Doppskorna är i gott skick. Om de är slitna eller saknas måste man byta ut dem.
- Se till att gåramens ben har reglerats till samma höjd.

UNDERHÅLL

Rollatorn kräver inte något särskilt underhåll för det ordinarie underhållet. Vi rekommenderar emellertid att regelbundet utföra:

- en kontroll av de olika komponenternas integritet
- kontroll att skruvar och muttrar är väl åtdragna
- kontroll av de mekaniska delarna i rörelse och, om nödvändigt, att smörja dem.
- rengöring med neutralt rengöringsmedel (använd inte frätande eller skadliga produkter) och lagring i en torr och genomluftad miljö.

VARNINGAR!

Använd inte hjälpmedlet om du upptäcker skador eller avsaknad av delar. Använd inte för annorlunda avsikter än de för vilka detta hjälpmedel har projekterats. Kör inte över hinder eller på ojämna eller inte plana golv eller på golv som är våta eller hala. Användningen av anordningen avråds för personer med nedsatt funktion av händer eller armar.



Använd endast originaldelar. Användningen av tillbehör som inte är original kan medföra risk för fallolyckor och personsador. Får inte användas i trappor. Användningen av gåramen i vatten (duschar, badkar, simbassänger o.s.v.) kan leda till oxidering hos funktionsmekanismerna, vilket kan skada gåramen och/eller orsaka personsador.

Maximal belastning 100kg

MONTERINGSINSTRUKTIONER

Steg 1:

öppna den hopvikta "ramen", i riktningen som visas på bilden

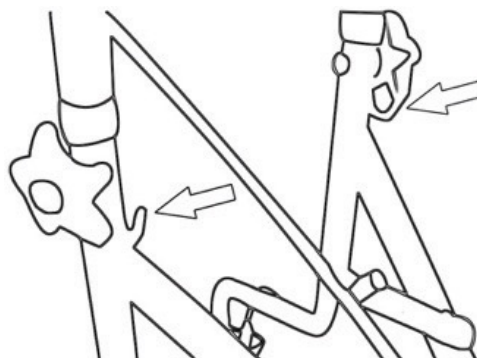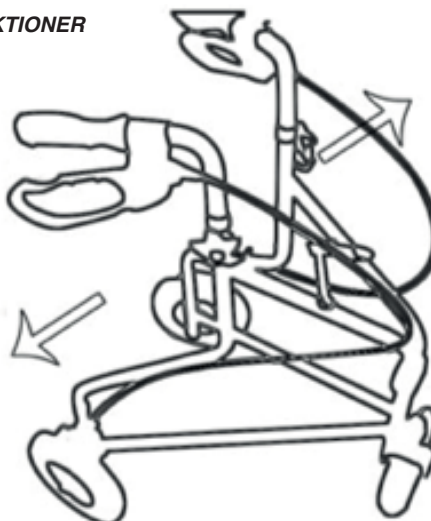

Steg 2:

häng upp korgen på krokarna



Steg 3:

placera handtagets rör omkring ramens två sidor, justera produkten till lämplig höjd och lås muttern. Försök att skjuta på rollatorn, kontrollera bromsens tillförlitlighet, justera den korrekt beroende på personens egenskaper.

	Tillverkare		Förvara på svalt och torrt ställe
	Läs bruksanvisningen		Skyddas från solljus
REF	Produktkod	LOT	Satsnummer
	Tillverkningsdatum	MD	Medicinteknisk produkt
EC REP	Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen		Varsamhet: läs anvisningarna (varningar) noga
CE	Den medicintekniska produkten överensstämmer med förordning (EU) 2017/745		

GARANTIVILLKOR GIMA

Man tillämpar standard garanti B2B Gima på 12 månader.

REF FS969H (43140)



Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory (LTD.)
5 Xingfu Road, Zone A, Shishan Industrial Park,
Nanhai District, Foshan City, China, 528000
Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importerad av:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com



MedNet EC-Rep GmbH

Borkstrasse 10. 48163 Muenster. Germany

