

**VENTIL BIOSAFE**

SL

**UPORABA:**

Ventil Biosafe je pripomoček za odvzemanje in vbrizgavanje tekočin brez igle. Ventil je združljiv z naslednjimi medicinskimi pripomočki, opremljenimi z moškimi priključki po Luerju: Infuzijski sistemi, Cevni podaljški, Injekcijske brizgalkе/napolnjene injekcijske brizgalkе, Centralni venski katetri, Razdelilniki z zapornimi ventili, Zaporni ventili.




**NAVODILA ZA UPORABO:**

1. Odprite embalažo na mestu za odpiranje in odstranite zaščitni zamašek (Slika 1).
2. Ženski priključek po Luerju na katetru ali cevnem podaljšku povežite z moškim priključkom po Luerju na pripomočku Biosafe (Slika 2).
3. Za varnejšo uporabo očistite silikonsko tesnilo ženskega priključka po Luerju na pripomočku Biosafe. Pazite, da pri tem ne okužite pripomočka.
4. Moški priključek na pripomočku za infuzijo ali injekcijski brizgalki povežite s pripomočkom Biosafe tako, da ga najprej potisnete in nato zavrtite, dokler ni trdno pritrjen. Pri tem morata biti oba pripomočka poravnana. Ne uporabljajte igel.
5. Za odstranitev zavrtite pripomoček za infuzijo ali injekcijsko brizgalko v obratni smeri urnega kazalca, tako da se loči od pripomočka Biosafe. Pripomočka Biosafe ne odstranjujte s katetra bolnika ali pripomočka za infuzijo (Slika 3).
6. Za učinkovitejšo aseptično tehniko pripomoček Biosafe po vsaki uporabi razkužite z raztopino na brezalkoholni osnovi.

Pripomoček Biosafe je zaprti sistem in ne potrebuje zaščitnega zamaška. Izdelek je sterilen in apirogen.

**OPOZORILA:**

- Uporabljajte aseptično tehniko.
- Ne uporabljajte igel.
- Pripomoček uporabljajte samo, če embalaža ni poškodovana.
- Sterilnost je zagotovljena samo v primeru nepoškodovane embalaže.
- Pripomoček je namenjen za enkratno uporabo za enega bolnika in ga je treba zavreči takoj po uporabi. Ponovna uporaba ni predvidena zaradi izgube sterilnosti. Tveganje, povezano s ponovno uporabo pripomočka, je okužba pripomočka, ki lahko povzroči okužbo bolnika oziroma je lahko vzrok za bolezen ali smrt bolnika. Podjetje ARIES poudarja pomembnost pravilne uporabe pripomočka v skladu z navodili za uporabo pripomočka, ki ga lahko uporablja samo pooblaščen zdravstveno osebje, da se prepreči povzročanje škode bolniku ali uporabniku/upravitelju pripomočka.

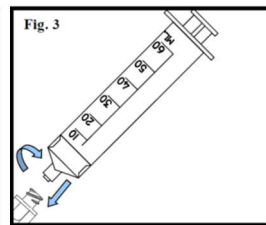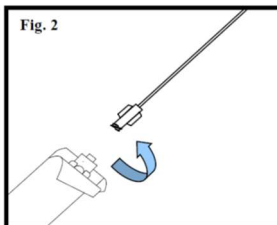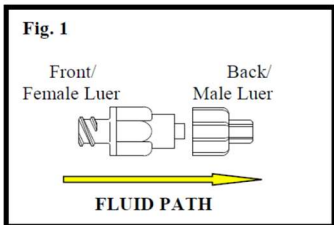

**REF** = Catalogue number

**LOT** = Batch code

= Use-by date

= Manufacturer

**STERILE** **EO** = Sterilized using Ethylene Oxide

= Disposable device. Do not re-use

= This device does not contain latex

**LATEX FREE**  
Read instruction for use carefully

= Date of manufacture

= Fragile

= High

= Keep between 0+40 °C

= Keep dry

= Keep away from sunlight