


1 Namestitev baterij


Priročnik z navodili 2

IM2-HEM-6181-E-SL-05-04/2022

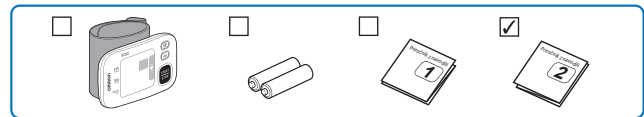


Pred uporabo preberite priročnik z navodili 1 in 2.

All for Healthcare

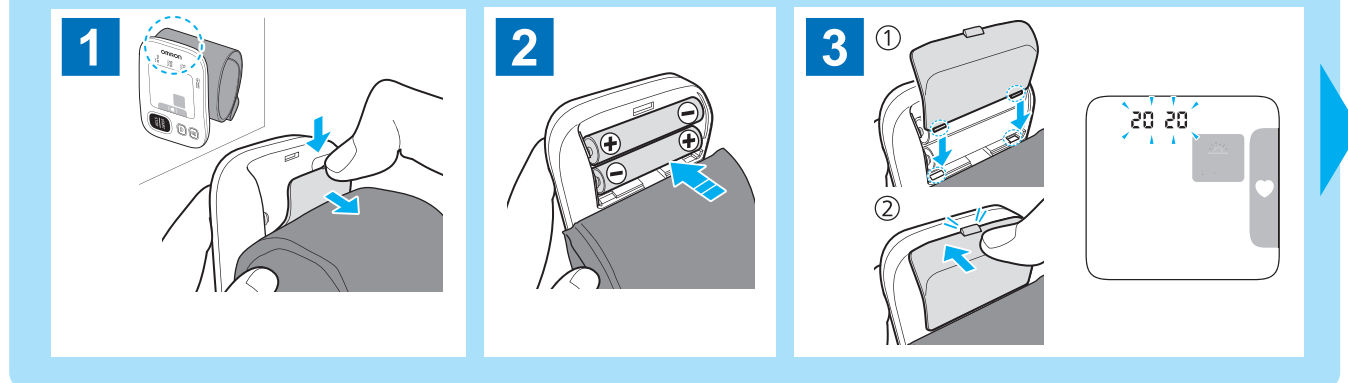


2 Nastavitev datuma in časa

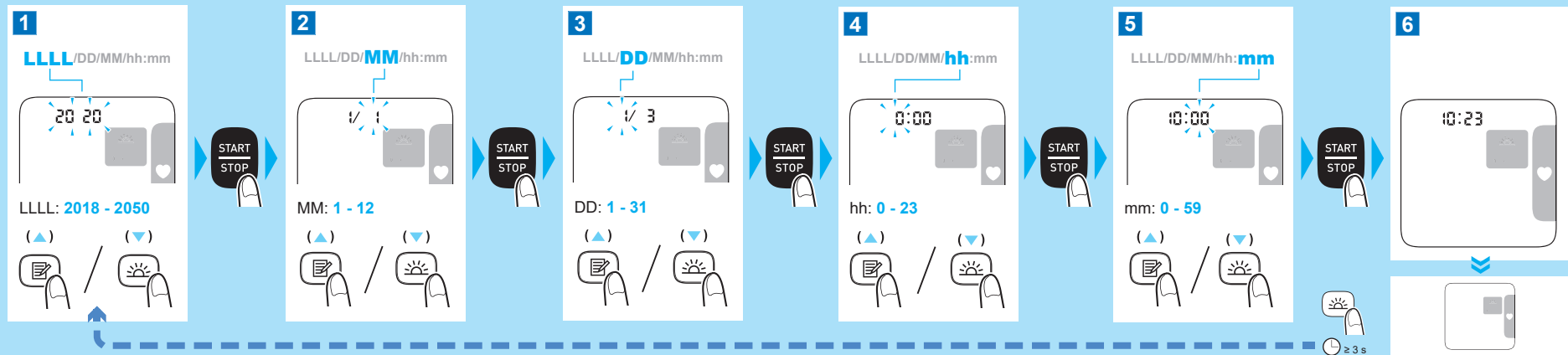


3 Nameščanje zapestne manšete



4 Pravilna postavitev


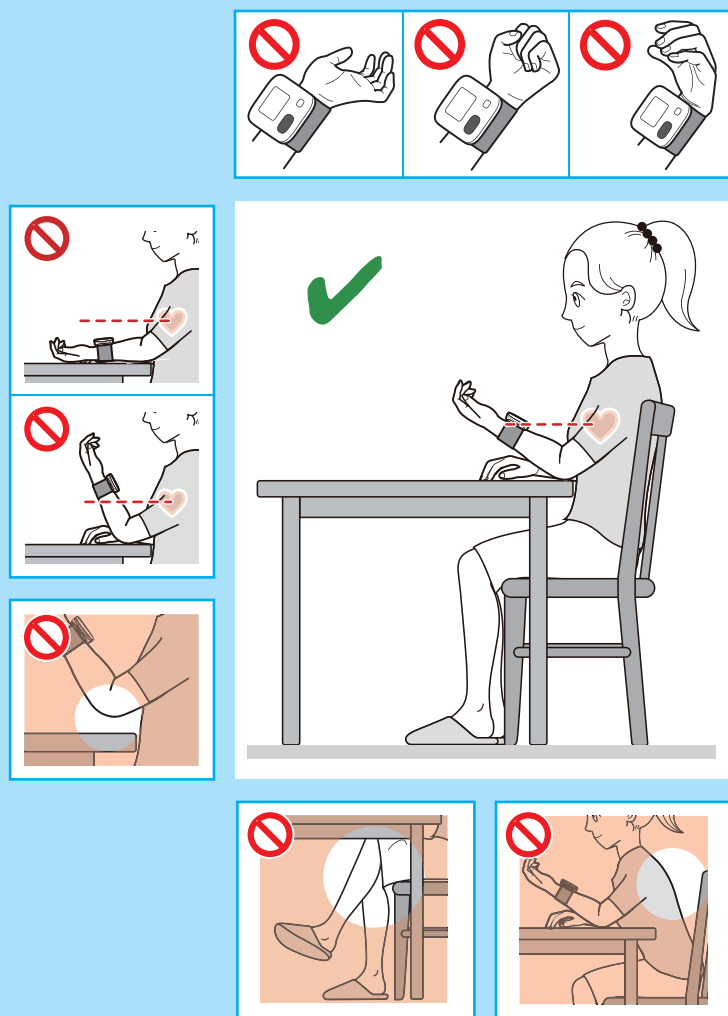


5 Izvajanje meritve

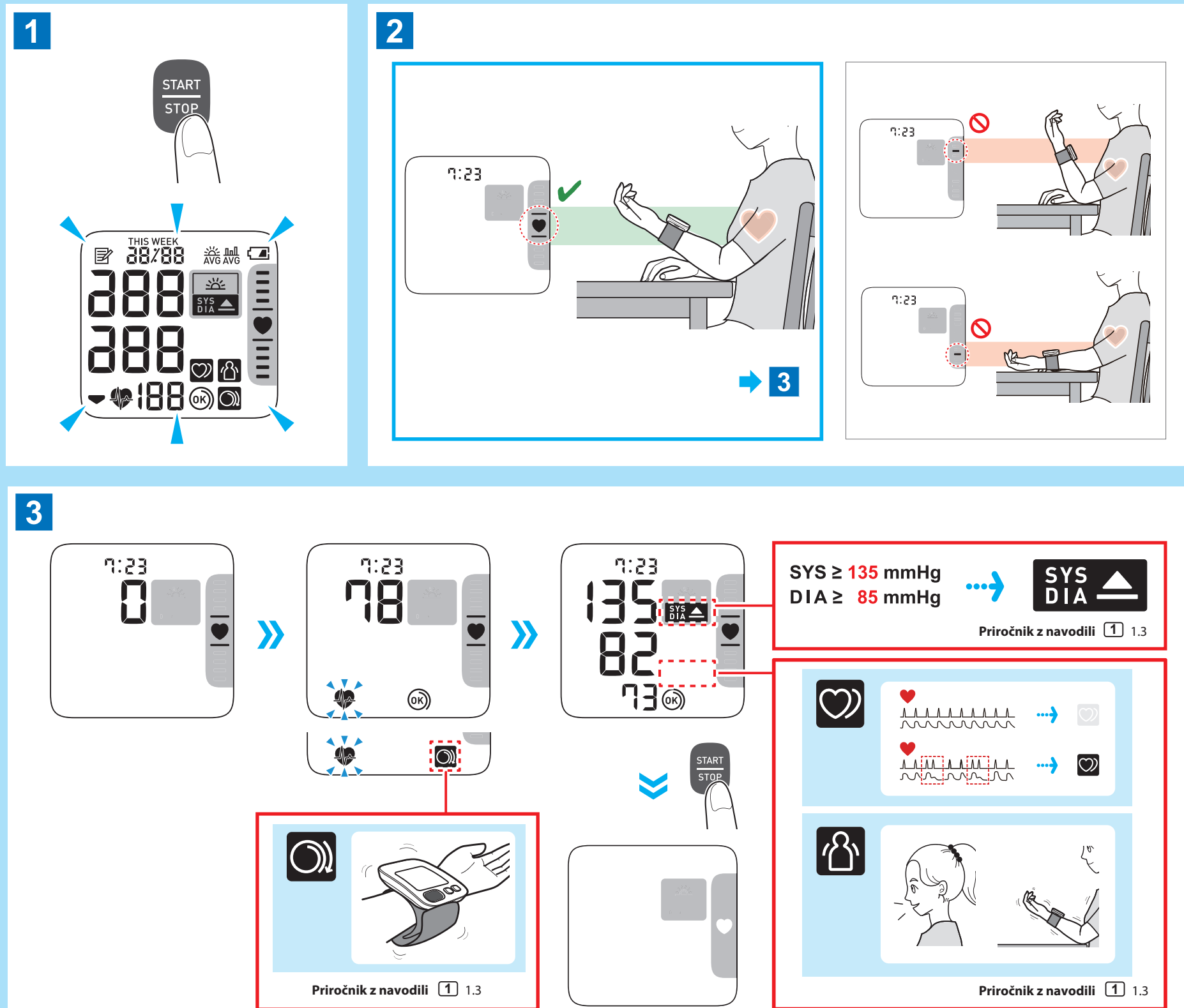




Ogled meritev, shranjenih v pomnilniku

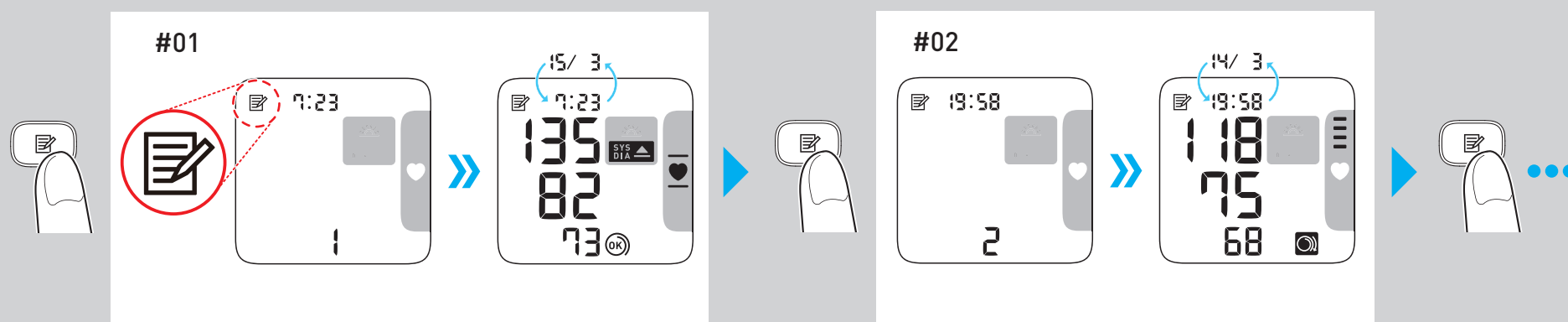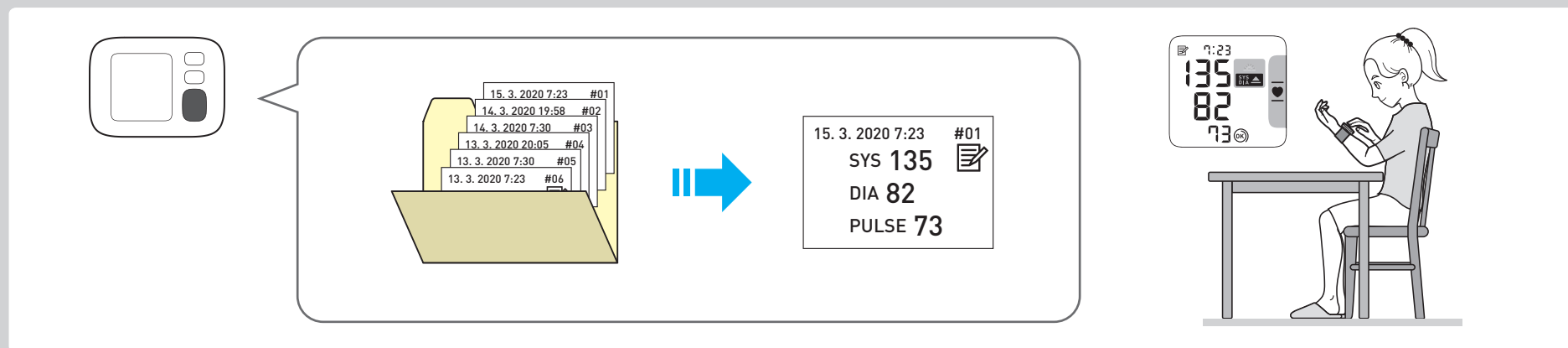

Brisanje vseh meritev, shranjenih v pomnilniku

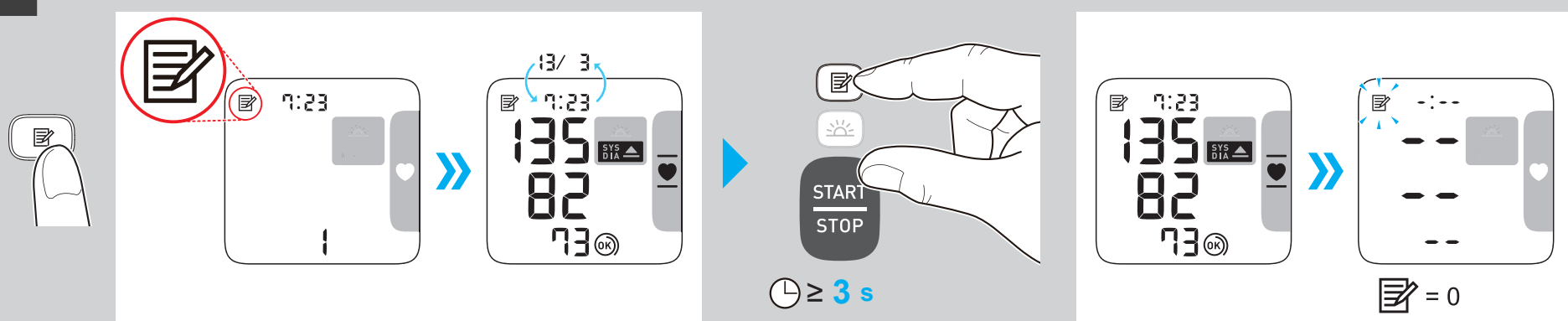

Opis simbolov

	Del v stiku z bolnikom – pripomoček tipa BF: stopnja zaščite pred električnim udarom (uhajavi tok)		Omejitev temperature
	Kaže pravilen položaj merilnika na zapetju. Obseg zapetja za meritve 13.5-21.5cm		Omejitev vlažnosti
IP XX	Stopnja zaščite pred vdorom tuje snovi zagotovljena po IEC 60529		Omejitev atmosferskega tlaka
CE	Oznaka CE		Uporabnik mora prebrati priročnik z navodili.
UK CA	Oznaka UKCA		Uporabnik mora za svojo varnost dosledno upoštevati ta priročnik z navodili.
SN	Serijska številka		Baterija/galvanski člen
UDI	Edinstveni identifikator pripomočka		Enosmerni tok
MD	Medicinski pripomoček		Datum izdelave

Proizvajalec		OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPONSKA
EU predstavnik		OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, NIZOZEMSKA www.omron-healthcare.com
Uvoznik v EU		
Proizvodni obrat		OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD. No.28 VSIP II, Street 2, Vietnam-Singapore Industrial Park II, Binh Duong Industry-Services-Urban Complex, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam
Podružnice	Uvoznik v Združenem kraljestvu in odgovorna oseba v Združenem kraljestvu	OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com/distributors
		OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH www.omron-healthcare.com/distributors
		OMRON SANTÉ FRANCE SAS www.omron-healthcare.com/distributors
Izdano		2022-06-27