

Koncentrirano dezinfekcijsko sredstvo
za neinvazivne medicinske pripomočke
s čistilnim delovanjem

NEVARNOST

Lastnosti

GERMOCID INODORE je koncentrirana raztopina, ki hitro in učinkovito očisti in dezinficira površine. Aktivna je proti gram pozitivnim in gram negativnim bakterijam, glivam, mikobakterijam in virusom (Adenovirus, HIV, HBV, HCV). GERMOCID INODORE je specifično sredstvo za čiščenje in dezinfekcijo površin in neinvazivnih medicinskih pripomočkov kot so obrazne maske in zobozdravniška oprema ter za obdelavo različne opreme/predmetov, kot so pisalne mize, rokonasloni, ročaji zdravstvenih in zobozdravstvenih ordinacij. Sredstvo, ki je v prisotnosti organskih snovi (kri - slina - organski izločki) visoko učinkovito in hitro delujoče tako kot dezinfekcijsko kot čistilno sredstvo, omogoča uporabo na vseh medicinskih, zobozdravstvenih, kirurških in estetskih instrumentih. Odstranjevanje nečistoč ne zahteva mehanskega delovanja.

Način uporabe: Izdelek, razredčen na 5-10 % in s 15' stika uporabite za baktericidno delovanje, na 10 % in s 15' stika za fungicidno delovanje, na 10 % in s 60' za mikrobaktericidno delovanje, na 1 % in s 60' za virucidno delovanje vs. Adenovirus, ter na 15% in s 60' stika za virucidno delovanje vs. HIV, HVC, HBV. Sredstvo na pralne stene in površine nanesite z gobicami, krpami, brizgalkami, ročnimi ali mehanskimi črpalkami ali na kakršen koli drug način. Pustite delovati in sperite. Razredčena raztopina je ob pravilni uporabi stabilna en teden, brez kontaminacije s snovmi in/ali zunanji sredstvi.

Sestava: 100,0 g izdelka vsebuje: Benzalkonjev klorid 10,0 g; O-fenilfenol 1,0 g; pomožne snovi; prečiščena voda po potrebi do 100,0 g.

Opozorila: H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H400 Zelo strupeno za vodne organizme. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice in zaščito za oči/zaščito za obraz. P303-P361-P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305-P351-P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Vsebuje: Kvarterne amonijeve spojine. Pred uporabo pretresite. Izdelek ni združljiv z anionskimi detergenti in površinsko aktivnimi snovmi. Hraniti na hladnem in suhem mestu, stran od virov toplote. Če izdelek po odprtju hranite pravilno, ohrani veljavnost, navedeno na etiketi. Ne uporabite pakiranja, če je poškodovano. Za profesionalno uporabo.

Čistilno sredstvo, skladno z uredbo ES št. 648/2004

Veljavnost: 5 leta

Št. serije in zapadlost: glej navedbo na embalaži

CE MEDICINSKI PRIPOMOČEK 0546 Evropska direktiva 93/42/EGS

Proizvajalec:

GERMO s.p.a. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) - Tel. št.: 02 663 01 938

www.germo.it - info@germodis.com

PROIZVEDENO V ITALIJI

Opozorila se lahko razlikujejo glede na posodobitve varnostnega lista izdelka