

SLOVENČINA

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY. PRED POUŽITÍM SA PORAŽTE S LEKÁROM.

KONTRAINDIKÁCIE: Nie je určený pre osoby nad 242 lbs (110 kg) - Nie je určený pre poľadovicu alebo šmyklivé podmienky. - Nie je určený pre osoby s alergiami na latex.

NAVOD NA POUŽITIE: Na rozloženie vychádzkovej palice držte rukoväť a rozložte segmenty sklopnej násady smerom k podlahe. Aby sa zabránilo padnutiam, vždy by ste sa mali uistiť, či jednotlivé segmenty násady (obr. 1) sú bezpečne zaistené na mieste.

VÝSTRAHA NEROZOBĚRAJTE telo vychádzkovej palice. Vnútro vychádzkovej palice obsahuje elastickú šnúru. Nekontrolované uvoľnenie elastickej šnúry vnútri môže spôsobiť vážne zranenie nechránených častí tela, najmä očí. Ak je elastická šnúra odrezaná, rozstrapkaná alebo poškodená, prestaňte palicu používať.

NENATAHUJTE šnúru viac ako je potrebné na demontáž alebo montáž segmentov.

NA NASTAVENIE VÝSKY VYCHÁDZKOVEJ PALICE: Uvoľnite otočný zámok jeho niekoľkonásobným otočením v smere hodinových ručičiek. Stlačte uzamykacie tlačidlo a potiahnite hore na rukoväti na predĺženie alebo potlačte nadol na skrátenie. Nezabudnite znovu utiahnuť otočný zámok po nastavení palice na požadovanú výšku.

VÝSTRAHA Aby sa zabránilo padnutiam, vždy zabezpečte, aby jednotlivé segmenty násady boli bezpečne zablokované na mieste a uzamykacie tlačidlo je úplne zapojené. Vždy zabezpečte, aby otočná noha palice bola pevne priskrutkovaná k palici, aby sa zabránilo padnutiam.

POSTUP ZLOŽENIA VYCHÁDZKOVEJ PALICE: Vaša vychádzková palica je ľahko sklopná do pohodlnej cestovnej veľkosti oddelením 4 jednotlivých segmentov násady od seba. Držte každú sadu segmentov násady pri spoji a potiahnite ich od seba. Jednotlivé segmenty násady sa uľhľadne zložia dohromady.



POUŽITIE SVETIEL NA VYCHÁDZKOVEJ PALICI: Tlačidlo na vrchu rukoväte vychádzkovej palice aktivuje svetlá. Ak tlačidlo stlačíte raz, aktivuje sa svetlo v prednej časti palice, opakovaným stlačením sa zapne aj červené svetlo na podstavci rukoväte, tretie stlačenie ich vypne. Predné svetlo sa môže otáčať na nasmerovanie svetla, kam potrebujete.

SIGNAL SOS: Signál SOS aktivujete stlačením tlačidla na boku rukoväte, svetlo na podstavci bude blikať a palica vydá zvukový signál.

YMEŇA BATÉRIÍ: Otvorte priestor na batérie na zadnej strane rukoväte. Vyberte všetky nefunkčné batérie a správne ich zlikvidujte. Použite 2 AAA batérie, vložte ich so správnou polaritou (kladný pól do vonkajšej strany, kde sa nachádza pružina). Zatvorte kryt priestoru na batérie. Pravidelne kontrolujte palicu, či nevykazuje znaky opotrebovania vrátane rozstrapkania elastickej šnúry alebo opotrebovania gumenej nohy.

VÝSTRAHA Nemiešajte staré a nové batérie. Nemiešajte alkalické, štandardné (uhlík-zinok) alebo nabíjateľné (nikel - kadmium) batérie.

ZARÚČNE PODMIENKY SPOLOČNOSTI GIMA: Platí 12-mesačná záruka štandardu B2B spoločnosti Gima.

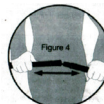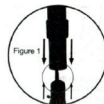

Gima 43050 - 43052

REF GB-806(1FOOT) GB-806(SKID PROOF)

Fabricato da/Manufactured by/Fabrique par/Fabricado por/Hergestellt von/
Fabricado por/Κατασκευάστηκε από/Произведено от/Vyrobce/Fremstillet af/
Tootja/Vaimistaja/Proizvodat/Gyártó/Ražots/Gamintojas/Produsert av/
Gefabriceerd door/Wyprodukowane przez/Fabricat de/Vyrába/Proizvajalec/
Tilbered av/تصنيع بواسطة
Ningbo Gaobo Sports Co., Ltd
No.1, Xiajin, Dali, Shenzhen Town, Ninghai County
Ningbo 315514, China
Made in China

Importato da/Imported by/importé par/importado por/importiert von/
Importado por/Εισαγυγί από/Довезено от/Dovezeno od/Dovezeno uživatelem/importeret
af/Importēja/ Tuoja:/Uvezeno od strane/Importálta:/importēja/importavo/
Importert av/Geimporteerd door/importowane przez/importat de/Dovážal/
Uvozi/Importerad av/توريد بواسطة
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

