

CENTRIFUGAČNÉ SKÚMAVKY

DIAGNOSTICKÁ POMÔCKA IN VITRO CE
Na profesionálne zdravotnícke použitie

Typ vzorky: vzorka krvi, séra alebo moču

NÁVOD NA POUŽITIE

- 1) Overtte si informácie o produkte a skontrolujte integritu balenia.
- 2) Napíšte na štítok príslušné informácie (meno pacienta, test, vzorka atď.).
- 3) Otvorte centrifugačnú skúmavku.
- 4) Pomocou vhodného nástroja vložte do skúmavky vzorku za účelom jej riedenia, skladovania, centrifugácie, bakteriálnej kultivácie alebo iného použitia.
- 5) Centrifugačnú skúmavku dobre uzavrite uzáverom, aby ste predišli akémukoľvek úniku počas centrifugácie.

ODPORÚČANIA NA POUŽITIE

- Pomôcka je určená na použitie zdravotníckymi pracovníkmi.
- Používajte ochranné rukavice.
- Neumiestňujte pomôcku do blízkosti plameňa.
- Nepoužívajte produkt, ak je po dátume spotreby, je poškodený alebo má otvorené balenie.
- Nemeňte účel použitia, akékoľvek iné použitie sa považuje za nesprávne.
- Udržujte mimo dosahu detí.
- Pomôcku používajte len s vhodným príslušenstvom.
- Skladujte na suchom mieste, mimo zdrojov tepla a priameho slnečného žiarenia.
- Tento produkt zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi v nádobe na biologický odpad.
- Pomôcka je na jedno použitie. Opätovné použitie pomôcky bude mať za následok stratu všetkých výkonov a vlastností.
- Každá závažná udalosť, ktorá sa vyskytne v súvislosti s pomôckou, sa musí nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu štátu, v ktorom má pacient bydlisko.



F.L. Medical s.r.l. Unipersonale – Via Enrico Mattei, 20- 35038 Torreglia (PD) – Italy
Phone +390495211475 – Fax +390495212566 – mail info@flmedical.com

