

**PRED UPORABO PREBERITE VSA NAVODILA. PRED UPORABO SE POSVETUJTE Z ZDRAVNIKOM.**

**KONTRAINDIKACIJE:** Ni primerno za osebe, težje od 110 kg (242 lbs) - Ni primerno za uporabo na ledenih ali spolzkih površinah. - Ni primerno za osebe, alergične na lateks.

**NAVODILA ZA UPORABO:** Da razprete palico, primate ročaj in pustite, da se zložljivi deli droga razprejo proti tlom. Da bi preprečili padce, morate vedno preveriti, ali so posamezni segmenti droga (sl. 1) varno pritrjeni na svoje mesto.

**OPOZORILO NE** razstavljajte telesa palice. V palici je elastična vrvica. Nenadzorovana sprostitve elastične vrvice v notranjosti lahko povzroči hude poškodbe nezaščitenih delov telesa, zlasti oči. Če se elastična vrvica prereže, obrabi ali poškoduje, prenehajte z uporabo. Vrvico NE raztegujte več, kot je potrebno za razstavljanje ali sestavljanje segmentov.

**ZA NAIJAVLJANJE VISINE PALICE:** Sprostite vrtljivo zaporo tako, da jo večkrat zavrtite v smeri urinega kazalca. Pritisnite zaporni gumb in potegnite ročaj navzgor, da ga podaljšate, ali potisnite ročaj navzdol, da ga skrajšate. Ne pozabite ponovno zategniti vrtljive zapore, ko palico nastavite na želeno višino.

**OPOZORILO** Da bi preprečili padce, vedno preverite, ali so posamezni segmenti droga varno zaklenjeni na svojem mestu in ali je zaporni gumb povsem zaskočen. Vedno se prepričajte, ali je vrtljiva noga palice trdno privita na palico, da se izognete padcem.

**DA BI ZLOŽILI PALICO:** Palico lahko enostavno zložite v priročno potovalno velikost, tako da ločite 4 posamezne dele droga. Držite vsak sklop segmentov droga v bližini spoja in jih potegnite narazen. Posamezni deli droga se bodo lepo zložili skupaj.



**ZA UPORABO LUČI NA PALICI:** Gumb na vrhu ročaja palice vklopi luči. S prvim pritiskom na gumb se vklopi lučka na sprednjem delu palice, z drugim pritiskom se vklopi tudi rdeča lučka na dnu ročaja, s tretjim pritiskom pa se obe lučki izklopita. Sprednjo lučko lahko vrtite, da svetlobo usmerite tja, kjer jo potrebujete.

**SIGNAL SOS:** Za aktiviranje SOS signala pritisnite gumb na strani ročaja, lučka na dnu bo utripala in palica bo sprožila zvočni alarm.

**ZAMENJAVA BATERIJ:** Odprite pokrov predela za baterije na zadnji strani ročaja. Odstranite vse iztrošene baterije in jih ustrezno odstranite. Vstavite 2 bateriji AAA z upoštevanjem pravilne polaritete (pozitivni pol naj bo obrnjen navzven, kjer je vzmet). Zaprite pokrov predela za baterije. Redno pregledujte palico za znake obrabe, vključno z obrabo elastične vrvice ali obrabo gumijastih nogic. Če opazite znake obrabe, takoj prenehajte z uporabo.

**OPOZORILO** Ne mešajte starih in novih baterij. Ne mešajte alkalnih, standardnih (cink-ogljikovih) ali akumulatorskih (nikelj-kadmijevih) baterij.

**GARANCIJSKI POGOJI DRUŽBE GIMA:** Velja 12-mesečna standardna garancija B2B družbe Gima.

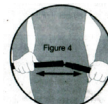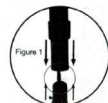

Gima 43050 - 43052

REF GB-806(1FOOT) GB-806(SKID PROOF)

Fabricato da/Manufactured by/Fabrique par/Fabricado por/Hergestellt von/  
Fabricado por/Κατασκευάστηκε από/Произведено от/Vyrobce/Fremstillet af/  
Tootja/Vaimistaja/Proizvodat/Gyártó/Ražots/Gamintojas/Produsert av/  
Geïfabriceerd door/Wyprodukowane przez/Fabricat de/Vyrába/Proizvajalec/  
Tilbered av/تصنيع بواسطة  
Ningbo Gaobo Sports Co., Ltd  
No.1, Xiajin, Dali, Shenzhen Town, Ninghai County  
Ningbo 315514, China  
Made in China

Importato da/Imported by/Importé par/Importado por/Importiert von/  
Importado por/Εισαγυγί από/Dovezeno od/Importat de/Importat de/  
af/Importija/ Tuoja:/Uvezeno od strane/Importálta:/Importēja/Importavo/  
Importert av/Geïmporteerde door/Importowane przez/Importat de/Dovážal/  
Uvozi/Importat av/توزيع بواسطة  
Gima S.p.A.  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
www.gimaitaly.com

