



TR ⚠ Dikkat!

Hemoglobin mikro küvetlerinin saklama ve kullanımına dair güvenlik talimatları

🔍 Hemoglobin mikro küvetleri , kapiller ve venöz kandaki hemoglobinin kantitatif tespiti ve sadece müteakipteki cihazlarla kullanımı için tasarlanmıştır: Hemo_Control, Hemo_Control Manager, Hemo_Vet, Hemo_Vet Manager. Küvetler sadece yetkili uzman personel tarafından kullanılabilir.

📄 Diğer bilgiler için ilgili cihazın kullanım talimatları dikkate alınmalıdır.

Küvetler sadece orijinal ambalajlarında 15°C - 30°C arası sıcaklıkta muhafaza edilmelidir. Orijinal kapalı kutular, üzerinde yazılı bulunan son kullanım tarihine kadar kullanılabilir. Kutu açıldığında küvetler uygun kullanım şartlarında, belirtilen koşullarda 3 aya kadar özelliğini korur.

Kutudan sadece tek bir küvet bir defada çıkarılmalıdır. Küvet çıkarıldıktan hemen sonra kutu itinalı bir şekilde kapatılmalıdır (**bkz. şekil 1.**). Her seferinde, kapağın etrafının tamamen kapalı olmasını kontrol edin (**bkz. şekil 2.**).

Kapağın tamamen kapalı olmaması halinde (**bkz. şekil 3.**) kutuya nem sızıp küvetteki reaktifte zarar verebilir. Bu tür küvetlerin kullanımı hatalı sonuçlara neden olabilir. Doğru şekilde kapatılmamış bir kutudan asla küvet kullanmayın!