


- I Semi-maschere filtranti monouso
GB Single-use filtering half-masks
D Partikelfiltrierenden Einweg-Halbmasken
F Demi-masques filtrants jetables
E Semimáscaras filtrantes desechables
P Semimáscaras filtrantes de utilização única
TR Tek kullanımlık filtreli yarım yüz maskeleri
NL Halvegeelatsmasker met filter voor eenmalig gebruik
S Filterande halvmasker för engångsbruk
FIN Suodattavat kertakäyttöiset puolinaamarit
CZ Filtrační polomaska na jedno použití
PL Maski ochronne jednorazowego użycia
GR Ημιμάσκες διήθησης μιας χρήσης
HR Polu-maske s filtrom za jednokratno upotrebu

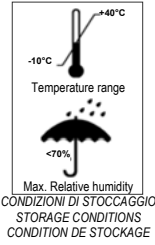

| TÜRKÇE | KULLANIM TALİMATLARI |
|--------|----------------------|
|--------|----------------------|

ÖNEMLİ : Burada açıklanan tek kullanımlık filtreli yarım yüz maskeleri 3 sınıfa - FFP1, FFP2 ve FFP3 - ayrılır. Kullanımdan önce EN149:2001+A1:2009 standardı uyarınca yüz maskesinin hangi sınıfa ait olduğunu ve kullanım ortamı için uygunluğu kontrol ediniz - sınıfın işareti kutunun üzerinde ve yarım yüz maskesinin üzerinde bulunur. Ürünün son kullanma tarihi, söz konusu ürünün ambalajının üzerinde bulunur.

UYGULAMALAR : katı ve sıvı toz ve aerosol (örn. yağlı sis) karşı koruma



Kullanımdan önce yüz maskesinin sağlamlığının kontrol edilmesi tavsiye edilir. Yırtıklar ve/veya lekeler görmeniz halinde bunun yerine başka bir yüz maskesi talep ediniz.

Markalamadaki NR işareti, yüz maskesinin tekrar kullanılabilir olmadığını ve iş vardiyesinin sonunda atılması gerektiğini belirtir.

D sembolü, yüz maskelerinin dolomit tozuyla tıkanma testini geçtiğini belirtir.

FFP3 veya FFP2 filtreli yarım yüz maskesi tarafından sunulan koruma, FFP1 sınıfı tarafından sunulan korumayı kapsar.

YÜZ MASKESİNİN UYARLANMASI İÇİN TALİMATLAR:

1. Yüz maskesinin içine bir parmak geçirin. Yüz maskesine burnun şeklini vermek için burun köprüsünü parmağın etrafında eğiniz.
2. Yüz maskesini elinizde tutup, kulakların altına yerleştirerek lastiğin alt kısmını ense arkasında baş üzerine geçirin.
3. Lastiğin üst kısmını kaldırınız ve başın üst kısmına, kulakların üstüne yaslayınız.
4. Her iki elinizi de kullanarak muhtemelen mevcut klipsi burnun etrafında şekillendiriniz ve yüzü iyi oturma sağlamak için mevcut olduğunda özel delik aracılığı ile lastiğin üst ve alt kısmının gerginliğini ayarlayınız.
5. (a) Valf ile donatılmamış yüz maskesinin doğru konumlandırıldığına dair kontrol testi: Ellerinizi resim 5 içinde gösterilmiş olduğu gibi yüz maskesinin üzerine getiriniz ve güçlü şekilde nefes veriniz. (b) Valf ile donatılmış yüz maskesinin doğru konumlandırıldığına dair kontrol testi: Ellerinizi resim 5 içinde gösterilmiş olduğu gibi yüz maskesinin üzerine getiriniz ve güçlü şekilde nefes alınız. Havanın, yüz maskesinin kenarlarından dışarı çıkması veya söz konusu yüz maskesinin içinde akması halinde yarım yüz maskesini kenarlardan yeniden yüz üzerine yerleştiriniz ve gerekmesi durumunda delik/germe mekanizmaları ile donatılmış olduğunda lastiği sıkıştırınız.
6. Solunum zorluğu hissedilmesi, yüz maskesinin hasar görmesi veya yüz oturma problemlerinin bulunması halinde, yüz maskesini derhal değiştiriniz. Bu talimatlara dikkatle uyulması, respiratörün güvenli kullanımını için esastır.

UYARILAR : [KKD – Kişisel Koruyucu Donanım]

Yüz maskesinin yüzün profiline uygun şekilde oturmasını elde etmenin imkansız olması halinde, potansiyel riskli ortamlara girmeyiniz. / Bu nota bulunan talimatlara uyulmaması, KKD'nin hatalı kullanımına ve bu doğrultuda hastalıklara ve ölüme neden olabilir. / Uygun şekilde seçilmiş bir respiratör sağlığını korumak için esastır. KKD'yi kullanmadan önce, kullanıma uygun olup olmadığını belirlemek için Sanayi Hijyeni konusunda eğitilmiş geçirilmiş bir kişiye veya İş Güvenliği konusunda uzman personele danışınız. / Bu ürün oksijen vermez. Sadece yaşam için gerekli yeterli derecede oksijen kapsayan uygun şekilde havalandırılan ortamlarda kullanınız. Bu yüz maskelerinin kullanılması için belli bir ortamdaki oksijen mevcudiyetine ilişkin limitler, ülkede ülkeye değişebilir, kullanım ülkesinde belirlenmiş parametrelerin referans alınması rica edilir. Her halükarda Eleco s.r.l. firması, %19.5 altı oksijen konsantrasyonlu ortamlarda kullanımı tavsiye etmez. / Kontaminant konsantrasyonları sağlık veya yaşam açısından direkt olarak tehlikeli olduklarında kullanmayınız. / Patlama tehlikesi mevcut olan atmosferde kullanmayınız. / (a) Solunum zorlaştığında veya (b) korku hissi veya baş dönmesi hissedildiğinde derhal çalışma alanını terk ediniz. / Sakal kulları ve solunum hastalıkları, söz konusu filtreli yarım yüz maskelerinin verimliliğini azaltabilir. / Filtreli yarım yüz maskesini hiçbir şekilde değiştirmeyiniz veya kuralamayınız. / Sadece tek kullanımlık. Bakım gerektirmez. / Yarım yüz maskesini tek kullanımdan sonra atınız. / Halen kullanılmamış yarım yüz maskelerini, güneş ışığından uzak ortamlarda, kapalı ambalajları içinde muhafaza ediniz. – Modelin identifikasyon kodu, ürünün ambalajının üzerinde bulunur.

Certificazione CE secondo direttiva / EC Certification according to directive / Certification CE selon - 89/686/EEC
DPI valutati secondo i rit fi norma / PPE evaluated on the basis of / EPI évalués selon norme - EN149:2001+A1:2009
DPI certificati dall'ente notificato / PPE certified by the notified body / EPI certifiés par l'organisme notifié - No.0086
BSI - P.O.Box 6221, Kitemark Court, Davy Avenue, Milton Keynes, MK1 9EP - UK

