

BIOSAFE VANA**TALİMATLAR:**

Biosafe Vana, iğne kullanmadan sıvı infüzyonu veya çekilmesini sağlayan bir cihazdır.

Vana, Erkek luer bağlantısı ile donatılmış aşağıdaki medikal cihazlarla uyumludur:

İnfüzyon, Uzatma setleri, Şırıngalar/Önceden doldurulmuş şırıngalar, Santral venöz kateterler, Manifoldlar, Musluklar.

KULLANIM TALİMATLARI:

1. Açma noktasından ambalajı açın ve koruyucu kapağı sökün (Şekil 1).
2. Bir uzatma hattının veya bir kateterin dişi luer bağlantısını erkek Biosafe konnektöre bağlayın (Şekil 2).
3. Güvenlik nedeniyle dişi Biosafe Luer Kilidinin tepesindeki silikon mührü temizleyin. Bu işlem sırasında cihazı kirlenmeye özen gösterin.
4. İnfüzyon cihazının veya şırınganın erkek luer kilidini Biosafe'e bağlayın. Sabitlenene kadar cihazı bastırıp çevirin. İğne kullanmayın.
5. Bağlantıyı ayırmak için infüzyon sistemini veya şırıngayı ayrılanaya kadar ters yöne çevirin, Biosafe vanasını hastanın kateterinden veya infüzyon sisteminden çıkarmayın (Şekil 3).
6. Daha iyi bir aseptik teknik için Biosafe vanayı alkolüz solüsyonla dezenfekte edin.

Biosafe kapalı bir sistemdir ve koruma kapağına ihtiyaç duymaz.

Cihaz Steril ve Apirojendir.

UYARILAR:

- Aseptik bir teknik kullanın.
- İğne ile kullanmayın.
- Ambalaj hasar görmüşse kullanmayın.
- Sterilite yalnızca ambalajın bozulmamış olması durumunda garanti edilir.
- Bu cihaz, tek bir hasta için sadece bir kez kullanılmalı ve kullanıldıktan sonra hemen atılmalıdır. Cihaz sterilliğini kaybettiği için yeniden kullanmayın. Yeniden kullanılması, cihazın kirlenmesi riskini doğurarak hastanın enfeksiyon kapmasına, hastalanmasına veya ölümüne yol açabilir. ARIES, cihazın hastaya veya son kullanıcıya/operatöre zarar vermesini engellemek üzere yetkin tıbbi personelin uygulayabilmesi için cihazın uygun kullanılması gerektiğini önemle vurgulamaktadır.

Fig. 1

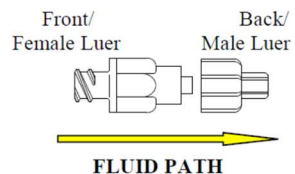


Fig. 2





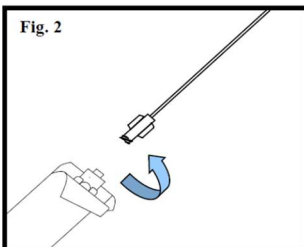


Fig. 3

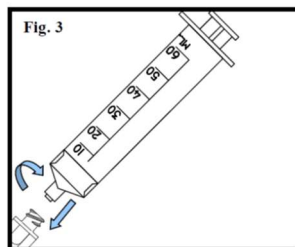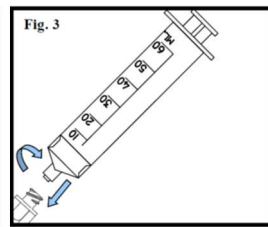

Via XXV Luglio, 43
41037 Mirandola (MO) ITALY
Tel. 0535/610773 - Fax 0535/610774

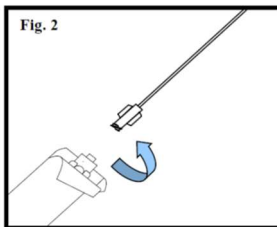

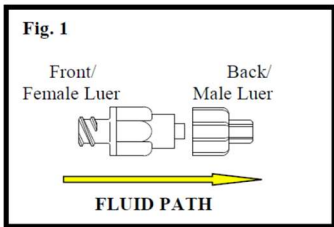

REF = Catalogue number

LOT = Batch code

= Use-by date

= Manufacturer

STERILE **EO** = Sterilized using Ethylene Oxide

= Disposable device. Do not re-use

= This device does not contain latex

= Read instruction for use carefully

= Date of manufacture

= Fragile

= High

= Keep between 0+40 °C

= Keep dry

= Keep away from sunlight