


## TEST RAPIDO STREP-A: RISULTATI ACCURATI IN 5 MINUTI

- 24522 TEST STREP-A - cassetta - conf. da 20 test
- 24523 TEST STREP-A - striscia - conf. da 25 test

Forniscono risultati accurati in pochi minuti. Di utilizzo facile, con indicazioni chiare e precise. La diagnosi immediata facilita le scelte di trattamento contestualmente alla visita al paziente. Si conservano a temperatura ambiente.


Comprendono 20 cassette o 25 strisce per test imbustati singolarmente, 2 reagenti, 20 (o 25) tubetti e tamponi. Manuale multilingue. Per uso professionale.

Procedura: aggiungere il reagente A, poi il reagente B (4 gocce ciascuno) - ruotare 10 volte il tampone, aspettare 1 minuto quindi rimuovere il tampone premendo il tubo per far uscire il liquido Appoggiare la punta del contagocce in cima al tubo - aggiungere 3 gocce del campione (24522) - immergere la striscia nel campione (24523) - leggere il risultato dopo 5 minuti

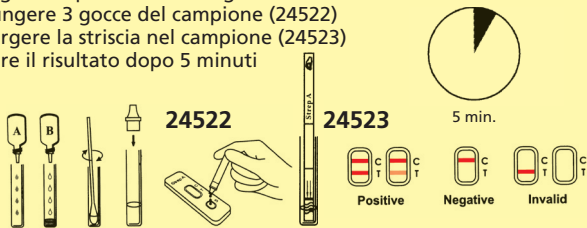

- 24524 STREP-A - twister - conf. da 25 test
- Come il codice 24522 ma con un sistema innovativo che integra in un'unica soluzione la cassetta e la provetta per la raccolta. Questo rende la procedura estremamente agevole e veloce.

Include 25 cassette twister, 2 reagenti, 25 tamponi. Manuale e scatola multilingue. Per uso professionale.

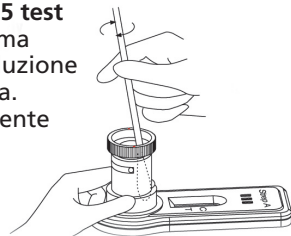

## STRISCE URINE: INFEZIONI URINARIE, GLU/CHET E 10 PARAMETRI

**Benefici delle strisce urine OTC**

- **Praticità:** consentono di effettuare l'autocontrollo delle urine nella tranquillità della propria abitazione, il test è facile da eseguire ed interpretare
- **Precisione:** risultati affidabili poiché sono le stesse strisce utilizzate dal Vs. medico
- **Convenienza:** test economico non necessita di apparecchi di lettura
- **Rapidità:** risultati istantanei in 2 minuti
- Scadenza di 18 mesi per le strisce imbustate contro 3 mesi per le strisce che restano in una confezione tradizionale aperta

• **24065 STRISCE GLU/CHET - conf. da 3 bustine da 3 strisce - per autodiagnosi**  
 Glucosio: rileva e controlla il livello eccessivo di glucosio nei diabetici per un esame dello stato generale di salute


Chetoni: controlla il diabete attraverso la rilevazione di un eccesso di chetoni dovuto a bassi livelli di insulina. Verifica il livello dei chetoni per monitorare l'adeguatezza del loro livello durante le diete a basse calorie e pochi carboidrati.

• **24066 STRISCE UTI - INFEZIONI URINARIE - conf. da 3 buste da 3 strisce - per autodiagnosi**

- controllo efficace dei nitriti e dei leucociti in un solo test per la verifica del tratto urinario
- rileva l'infezione del tratto urinario prima che si verifichino i sintomi o che compaia il dolore

• **24070 STRISCIA 10 PARAMETRI - conf. da 3 buste da 3 strisce - per autodiagnosi**  
 Queste strisce sono compatibili con il lettore Bayer Clinitek 100.

- controllo delle condizioni generali di salute
- attesta il livello dei leucociti, nitrato, urobilinogeno, proteine, pH, sangue, gravità specifica, chetoni, bilirubina e glicemia in un'unica striscia, monitora un'alimentazione sana, infezioni del tratto urinario, tumori, danni ai reni, gotta, febbre, cirrosi, epatite virale, malattie al fegato, insufficienza cardiaca congestizia, ittero, diabete e gravi insufficienze renali.

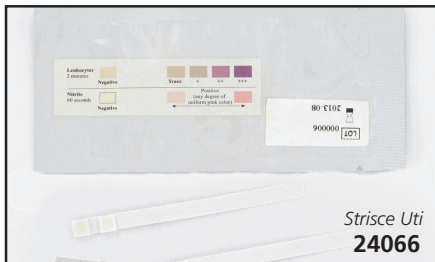

ATTENZIONE: TEST A SCADENZA BREVE. I test hanno 24 mesi di durata dalla data di produzione. Lo stock potrebbe variare da 10 a 22 mesi.